

Veroval®



Veroval®



Il contenuto di questo video può anche essere scaricato in formato pdf.

Veroval®



In questo breve video viene spiegato come i dati del vostro dispositivo Veroval® misuratore di pressione con funzione ECG...

Veroval®



**...possono essere facilmente trasferiti nel software Veroval®
medi.connect.**

Veroval®

Veroval® medi.connect

Mario Rossi

HARTMANN

Panoramica Pressione arteriosa ECG Peso Temperatura Self-test Impostazioni

ultima misurazione ultima settimana Ultimo Mese

Pressione arteriosa

Sistole Diastole

Polso

Peso

Kg

BMI

Temperatura

mattina a mezzogiorno sera

Self-test

Test	Data	Risultato	prossimo test
Colesterolo	-	-	-
Intestino	-	-	-
Stomaco	-	-	-

ECG

OK SLOW FAST ERROR

PAUSE RHYTHM WAVE

Visualizzare valutazione dettagliata

Per prima cosa occorre aprire Veroval® medi.connect sul PC...

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web application interface. At the top left, the logo 'Veroval® medi.connect' is visible. The user's name 'Mario Rossi' is shown in the top right, along with the 'HARTMANN' logo. A navigation bar contains several menu items: 'Panoramica', 'Pressione arteriosa', 'ECG', 'Peso', 'Temperatura', 'Self-test', and 'Impostazioni'. Below this bar, there are three tabs for data viewing: 'ultima misurazione', 'ultima settimana', and 'Ultimo Mese'. The main content area is divided into three panels: 'Pressione arteriosa' (Blood Pressure) with fields for 'Sistole', 'Diastole', and 'Polso'; 'Peso' (Weight) with fields for 'Kg' and 'BMI'; and 'Temperatura' (Temperature) with a field for temperature and three time slots: 'mattina', 'a mezzogiorno', and 'sera'. A black mouse cursor is pointing at the 'Impostazioni' menu item.

... cliccare su «Impostazioni»...

Veroval®

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web application interface. At the top, the user is identified as Mario Rossi. The main navigation bar includes tabs for 'Panoramica', 'Pressione arteriosa', 'ECG', 'Peso', 'Temperatura', 'Self-test', and 'Impostazioni'. Below this, a secondary navigation bar shows 'Il mio profilo', 'Sistema', 'Pressione arteriosa', 'ECG', 'Peso', 'Temperatura', and 'Promemoria'. The 'Il mio profilo' section is active, showing a form with the following fields:

Sesso *	<input type="radio"/> uomo <input checked="" type="radio"/> donna	Via	<input type="text"/>
Nome *	<input type="text" value="Mario"/>	CAP	<input type="text"/>
Cognome *	<input type="text" value="Rossi"/>	Città	<input type="text"/>
Data di nascita *	<input type="text" value="01/01/1980"/> <input type="text" value="15"/>	Età (anni)	<input type="text" value="37"/>
Altezza *	<input type="text" value="190"/>	Centimetri	
Password	<input type="text" value="Protezione con password non impostata"/> <input type="checkbox"/>		

...e nella riga sottostante selezionare «ECG».

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web interface. At the top left, the logo "Veroval® medi.connect" is shown with a colorful horizontal bar below it. In the top right corner, the user's name "Mario Rossi" is displayed next to a profile icon. Below the name is a row of utility icons: a printer, an envelope, a download arrow, a PDF icon, a document icon, an information 'i' icon, and a power icon. A navigation bar below the header contains several menu items: "Panoramica", "Pressione arteriosa", "ECG", "Peso", "Temperatura", "Self-test", and "Impostazioni". The "Impostazioni" item is currently selected, indicated by a white triangle pointing upwards. Below the navigation bar, a secondary menu shows "Il mio profilo", "Sistema", "Pressione arteriosa", "ECG", "Peso", "Temperatura", and "Promemoria". The main content area is titled "ECG" and features a "Selezione del dispositivo" section with a minus sign icon. This section contains a single device option: a checkbox, a small image of the device, and the text "Veroval misuratore di pressione da braccio con funzione ECG". At the bottom of this section are two buttons: "Salva" and "Azzerà".

A questo punto nelle impostazioni dell'«ECG» ...

Veroval®

Veroval® medi.connect

Mario Rossi

HARTMANN

Panoramica Pressione arteriosa ECG Peso Temperatura Self-test Impostazioni

Il mio profilo Sistema Pressione arteriosa ECG Peso Temperatura Promemoria

ECG

Selezione del dispositivo

Veroval misuratore di pressione da braccio con funzione ECG Selezione memoria utente

Salva Annulla

...mettere il flag sul dispositivo scelto Veroval® misuratore di pressione con funzione ECG...

Veroval® medi.connect

Mario Rossi

HARTMANN

Panoramica Pressione arteriosa ECG Peso Temperatura Self-test Impostazioni

Il mio profilo Sistema Pressione arteriosa ECG Peso Temperatura Promemoria

ECG

Selezione del dispositivo

Veroval misuratore di pressione da braccio con funzione ECG

Seleziona memoria utente

- 1. Memoria utente del dispositivo
- 2. Memoria utente del dispositivo

Salva Azzera

**...selezionare la memoria utente desiderata e salvare.
Questo passaggio deve essere eseguito solo una volta!**

Veroval®

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web interface. At the top, the user's name "Mario Rossi" is visible next to a profile icon. Below this, a navigation bar contains several menu items: "Panoramica", "Pressione arteriosa", "ECG", "Peso", and "Temperatura". A mouse cursor is pointing at the "ECG" menu item. Below the navigation bar, the "ECG" section is active, showing a "PDF" icon and a search filter for the date range "07/07/2017" to "13/07/2017". A "Ricerca" button and an "Excel" icon are also present. At the bottom of the section, a message states: "Per questo intervallo di tempo non vi sono dati disponibili."


Per il trasferimento dei dati, fare clic su «ECG» nella riga superiore.

Veroval[®]




Inserire l'adattatore USB-Bluetooth...

Veroval®

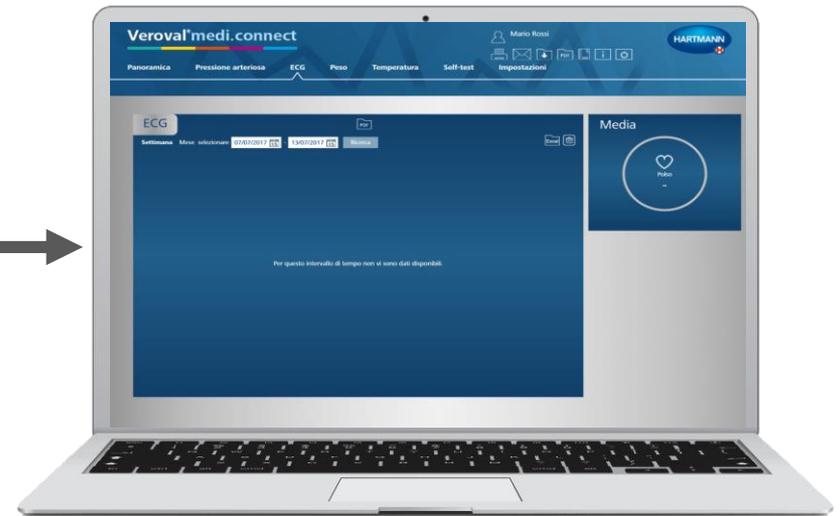

...nella porta USB del vostro PC.

Veroval®

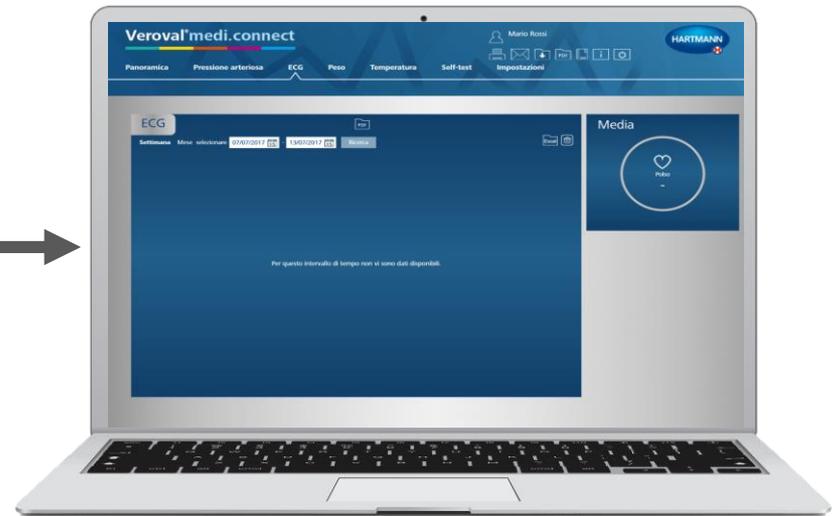


Se l'adattatore diventa verde...

Veroval®




...accendere il dispositivo cliccando sul tasto memoria in basso a destra.

Veroval®

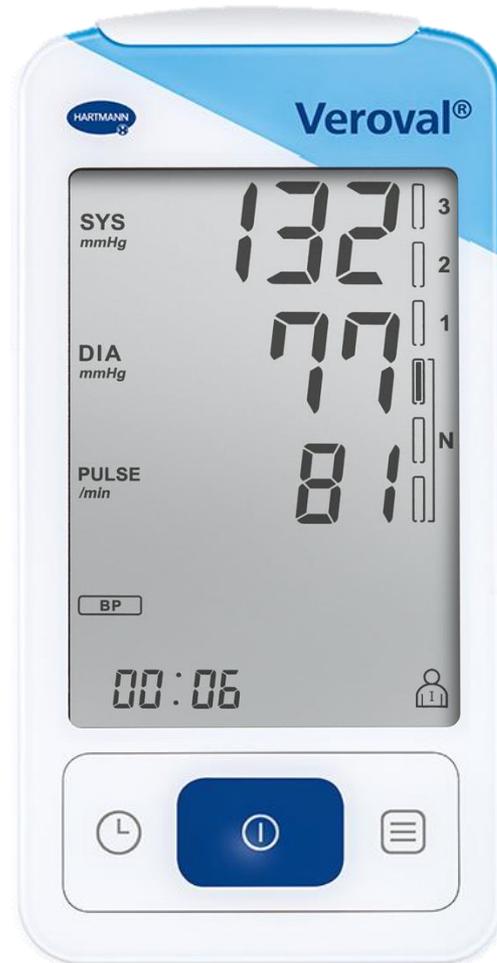


Quando il trasferimento dei dati non viene avviato entro 30 secondi...

Veroval®

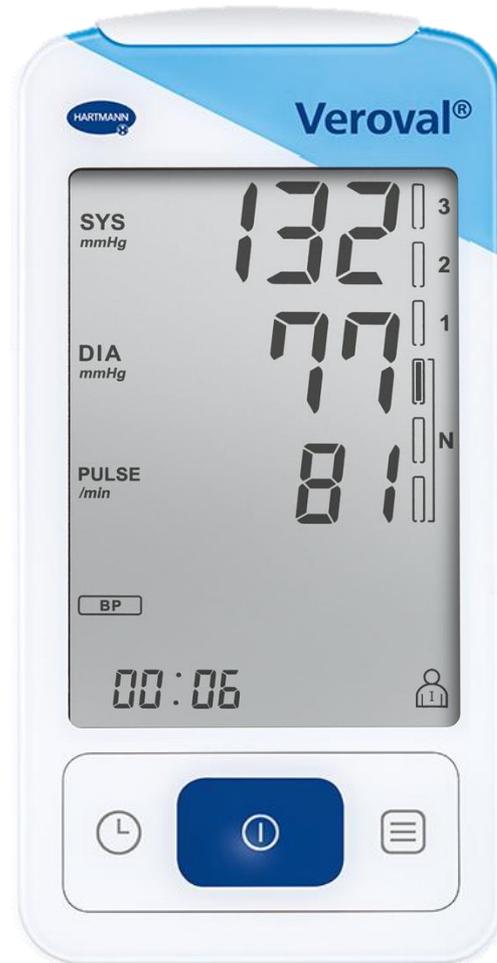

...il dispositivo passa in modalità standby. In questo caso occorre ricominciare.

Veroval®

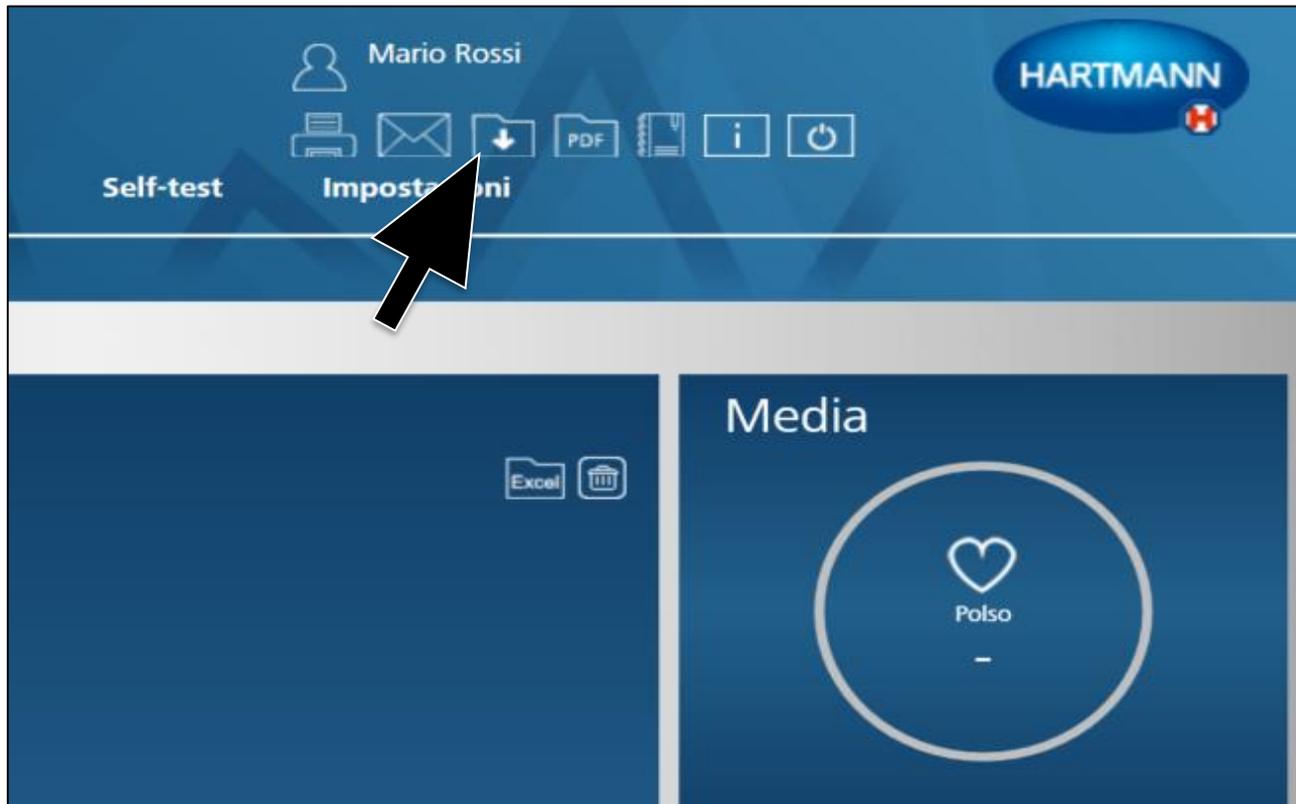

Cliccare sull'icona «trasferimento dati» in alto a destra.

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web interface. At the top, the user is identified as Mario Rossi (M1, M2) with the HARTMANN logo. The navigation menu includes: Panoramica, Pressione arteriosa, ECG, Peso, Temperatura, Self-test, and Impostazioni. The ECG section is active, showing a date range from 07/07/2017 to 13/07/2017 and a search button. A dialog box titled "Selezionare dispositivo" is open, listing two device options: "Veroval misuratore di pressione da braccio con funzione ECG" and "Veroval misuratore di pressione da braccio". Both options list "1. Memoria utente del dispositivo". A mouse cursor is pointing at the first option. To the right, a "Media" section shows a heart icon and the word "Polso" with a minus sign below it.

Ora selezionare il dispositivo Veroval® misuratore di pressione con funzione ECG.

Veroval®

The screenshot displays the Veroval® medi.connect software interface. At the top left, the logo "Veroval® medi.connect" is visible. The top right corner shows the user name "Mario Rossi" and device identifiers "M1 M2", along with the "HARTMANN" logo. A navigation bar includes tabs for "Panoramica", "Pressione arteriosa", "ECG", "Peso", "Temperatura", "Self-test", and "Impostazioni". The "ECG" tab is active. Below the navigation bar, there are sections for "Info" (containing lists of found and paired devices), "Media" (with a heart icon and the text "Polso -"), and a central scanning progress dialog. The dialog shows a circular progress indicator and the text "Scansione in corso - Attendere, prego." with "Scansione" and "Annulla" buttons. The date range "07/07/2017 - 13/07/2017" is also visible.


Il software inizia a cercare il dispositivo...

Veroval®

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web application interface. At the top, the user is identified as Mario Rossi (M1, M2) and the HARTMANN logo is visible. The navigation menu includes: Panoramica, Pressione arteriosa, ECG (selected), Peso, Temperatura, Self-test, and Impostazioni. The ECG section is active, showing a date range from 07/07/2017 to 13/07/2017. A modal window titled 'Info' is open, displaying a search progress: 'Lista dei dispositivi trovati, con icona e nome' (empty), 'Lista dei dispositivi abbinati' (empty), and 'Lista dei dispositivi non abbinati' containing one entry: 'Veroval ECG' with a checkmark and a refresh icon. The modal also includes 'Scansione' and 'Annulla' buttons. On the right, the 'Media' section shows a heart icon and the label 'Polso' with a dash below it.

...e se il nome del dispositivo appare vuol dire che la ricerca si è conclusa con successo.

Veroval®

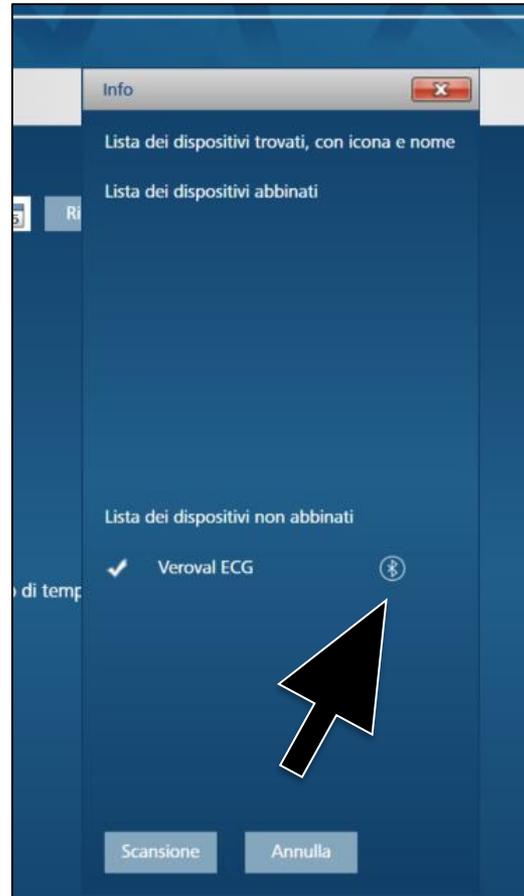

Cliccare ora sull'icona Bluetooth accanto al nome del dispositivo...

Veroval®



Ricordare di accendere nuovamente il dispositivo se è andato in modalità stand-by.

Veroval®



Viene così stabilita la connessione Bluetooth.

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web application interface. At the top, the user is identified as Mario Rossi (M1 M2) and the HARTMANN logo is visible. The main navigation bar includes tabs for Panoramica, Pressione arteriosa, ECG, Peso, Temperatura, Self-test, and Impostazioni. The ECG tab is active, showing a weekly overview for the period 07/07/2017 to 13/07/2017. A pop-up window titled 'Info' is open, displaying a list of devices under the heading 'Lista dei dispositivi abbinati'. The list contains one entry: 'Veroval ECG', which has a checkmark and a data transfer icon (two overlapping arrows) next to it. A mouse cursor is pointing at this icon. Other icons for settings and deletion are also present for this device. Below the list, there is a section for 'Lista dei dispositivi non abbinati' and a note: 'Per questo intervallo di tempo...'. At the bottom of the pop-up, there are 'Scansione' and 'Annulla' buttons. On the right side of the main interface, there is a 'Media' section with a heart icon and the label 'Polso'.


Fare clic sull'icona trasferimento dati che compare nella finestra pop-up...

Veroval®

The screenshot displays the Veroval® medi.connect software interface. At the top, the user is identified as Mario Rossi (M1, M2) and the HARTMANN logo is visible. The main navigation bar includes options for Panoramica, Pressione arteriosa, ECG, Peso, Temperatura, Self-test, and Impostazioni. The ECG section is active, showing a date range from 07/07/2017 to 13/07/2017. A central dialog box titled 'Info' is open, displaying a list of devices with 'Veroval ECG' checked. Below the list, a progress indicator shows a circular loading icon and the text 'Download dei dati in corso - Attendere, prego.' At the bottom of the dialog are 'Scansione' and 'Annulla' buttons. To the right, a 'Media' section shows a heart icon and the label 'Polso'.

Inizia così il trasferimento dati.

Veroval®

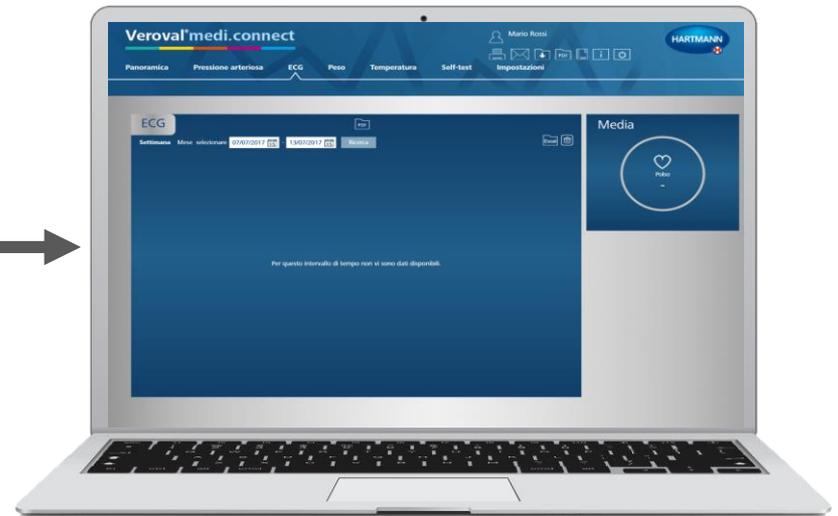

Durante la trasmissione, l'adattatore USB-Bluetooth diventa rosso...

Veroval®



...e sul dispositivo il simbolo lampeggia.

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web interface. At the top, the user is identified as Mario Rossi (M1, M2) and the HARTMANN logo is visible. The navigation menu includes: Panoramica, Pressione arteriosa, ECG (selected), Peso, Temperatura, Self-test, and Impostazioni. The main content area is titled 'ECG' and shows a notification: 'Trasmissione dei dati dell'intera memoria utente su questo dispositivo'. Below this, a table lists data received from the device:

Memoria utente del dispositivo	utente	Numero complessivo delle misurazioni inviate:	Doppioni	Nuove misurazioni:	Dettagli
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Valentina Tintori	9	0	9

Below the table, a message states: 'Premendo il pulsante Salva, vengono memorizzati tutti gli utenti selezionati.' A 'Salva' button is present. The interface also shows a section for 'Pressione sanguigna' with a similar table and 'Salva' button. On the right side, there is a circular icon for 'Polso' (Pulse) with a heart symbol and a minus sign below it.

Dopo il trasferimento, è possibile scegliere quali valori si desidera salvare

Veroval®

The screenshot shows the Veroval® medi.connect web interface. At the top, the user is identified as Mario Rossi (M1 M2). The navigation menu includes: Panoramica, Pressione arteriosa, ECG (selected), Peso, Temperatura, Self-test, and Impostazioni. The ECG section is active, displaying a table of user data. A 'Salva' button is highlighted with a mouse cursor.

Trasmissione dei dati dell'intera memoria utente su questo dispositivo

Il dispositivo ha trasmesso i seguenti dati: *ECG*

<input type="checkbox"/>	Memoria utente del dispositivo	utente	Numero complessivo delle misurazioni inviate:	Doppioni	Nuove misurazioni	Dettagli
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Valentina Tintori	9	0	9	

Premendo il pulsante Salva, vengono memorizzati tutti gli utenti selezionati.

Il dispositivo ha trasmesso i seguenti dati: *Pressione sanguigna*

...se ECG...

Veroval®

Salva

Il dispositivo ha trasmesso i seguenti dati: *Pressione sanguigna*

<i>Memoria utente del dispositivo</i>	<i>utente</i>	<i>Numero complessivo delle misurazioni inviate:</i>	<i>Doppioni</i>	<i>Nuove misurazioni</i>	<i>Dettagli</i>	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Valentina Tintori	1	0	1	

Premendo il pulsante Salva, vengono memorizzati tutti gli utenti selezionati.

Salva



...o pressione arteriosa...

Veroval®

The screenshot shows the Veroval medi.connect web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Panoramica', 'Pressione arteriosa', 'ECG', 'Peso', 'Temperatura', 'Self-test', and 'Impostazioni'. The 'ECG' tab is selected. In the top right corner, the user's name 'Mario Rossi' and device identifiers 'M1 M2' are displayed, along with the HARTMANN logo. Below the navigation bar, there is a section for 'ECG' with a sub-tab 'Settimana' and a 'Mese selezionare' dropdown. A modal window titled 'Trasmissione dei dati dell'intera memoria utente su questo dispositivo' is open, showing two data transmission records. Each record includes a table with columns for 'Memoria utente del dispositivo', 'utente', 'Numero complessivo delle misurazioni inviate', 'Doppioni', 'Nuove misurazioni', and 'Dettagli'. The first record shows 9 total measurements, 0 duplicates, and 9 new measurements for user 'Valentina Tintori'. The second record shows 1 total measurement, 0 duplicates, and 1 new measurement for the same user. Below each table is a 'Salva' button, which is highlighted by a black mouse cursor. A heart icon labeled 'Polso' is visible on the right side of the interface.

Trasmissione dei dati dell'intera memoria utente su questo dispositivo

Il dispositivo ha trasmesso i seguenti dati: *ECG*

Memoria utente del dispositivo	utente	Numero complessivo delle misurazioni inviate:	Doppioni:	Nuove misurazioni:	Dettagli
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Valentina Tintori	9	0	9

Premendo il pulsante Salva, vengono memorizzati tutti gli utenti selezionati.

Il dispositivo ha trasmesso i seguenti dati: *Pressione sanguigna*

Memoria utente del dispositivo	utente	Numero complessivo delle misurazioni inviate:	Doppioni:	Nuove misurazioni:	Dettagli
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Valentina Tintori	1	0	1

Premendo il pulsante Salva, vengono memorizzati tutti gli utenti selezionati.

...o entrambi. Quindi fare clic su «salva».

The screenshot displays the Veroval® medi.connect software interface. At the top, the user is identified as Mario Rossi (M1, M2) and the HARTMANN logo is visible. The main navigation bar includes options for Panoramica, Pressione arteriosa, ECG, Peso, Temperatura, Self-test, and Impostazioni. The ECG section is active, showing a table of user data and a confirmation dialog box.

Trasmissione dei dati dell'intera memoria utente su questo dispositivo

Il dispositivo ha trasmesso i seguenti dati: *ECG*

Memoria utente del dispositivo	utente	Numero complessivo delle misurazioni inviate:	Doppioni	Nuove misurazioni	Dettagli
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Valentina Tintori	9	0	9

Premendo il pulsante Salva, vengono memorizzati tutti gli utenti selezionati.

Veroval® medi.connect

Le misurazioni sono state salvate con successo.

Ok

Memoria utente del dispositivo	utente	Numero complessivo delle misurazioni inviate:	Doppioni	Nuove misurazioni	Dettagli
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Valentina Tintori	1	0	1

Premendo il pulsante Salva, vengono memorizzati tutti gli utenti selezionati.

Salva

Confermare il salvataggio facendo clic su «OK».

The screenshot displays the Veroval® medi.connect software interface. At the top, the user is identified as Mario Rossi (M1, M2) and the HARTMANN logo is visible. The main navigation bar includes options for Panoramica, Pressione arteriosa, ECG (selected), Peso, Temperatura, Self-test, and Impostazioni. The ECG section shows a table of recorded data with columns for Date, Time, Result, Pulse, Details, and Comment. A 'Media' (Average) panel on the right shows a pulse rate of 68.

<input type="checkbox"/>	Data	Orario	Risultato della misurazione	Polso	Dettagli	Farmaco/commento
<input type="checkbox"/>	29/06/2017	03:51	OK	65	>	
<input type="checkbox"/>	29/06/2017	03:53	OK	79	>	
<input type="checkbox"/>	29/06/2017	03:54	OK	65	>	
<input type="checkbox"/>	29/06/2017	03:59	OK	63	>	
<input type="checkbox"/>	30/06/2017	05:14	OK	72	>	
<input type="checkbox"/>	30/06/2017	06:58	OK	65	>	

Ora è possibile visualizzare l'elenco di tutti i dati memorizzati sulla scheda dell'ECG.

Veroval® medi.connect

Mario Rossi
M1 M2

Panoramica Pressione arteriosa **ECG** Peso Temperatura Self-test Impostazioni


ECG PDF

Settimana Mese selezionare 01/11/2016 - 13/07/2017 Ricerca

	Data	Orario	Risultato della misurazione	Polso	Dettagli	Farmaco/commento
<input type="checkbox"/>	29/06/2017	03:51	● OK	65	>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	29/06/2017	03:53	● OK	79	>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	29/06/2017	03:54	● OK	65	>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	29/06/2017	03:59	● OK	63	>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	30/06/2017	05:14	● OK	72	>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	30/06/2017	06:58	● OK	65	>	<input type="text"/>

Ed è possibile fare clic su «dettagli»...

Veroval®

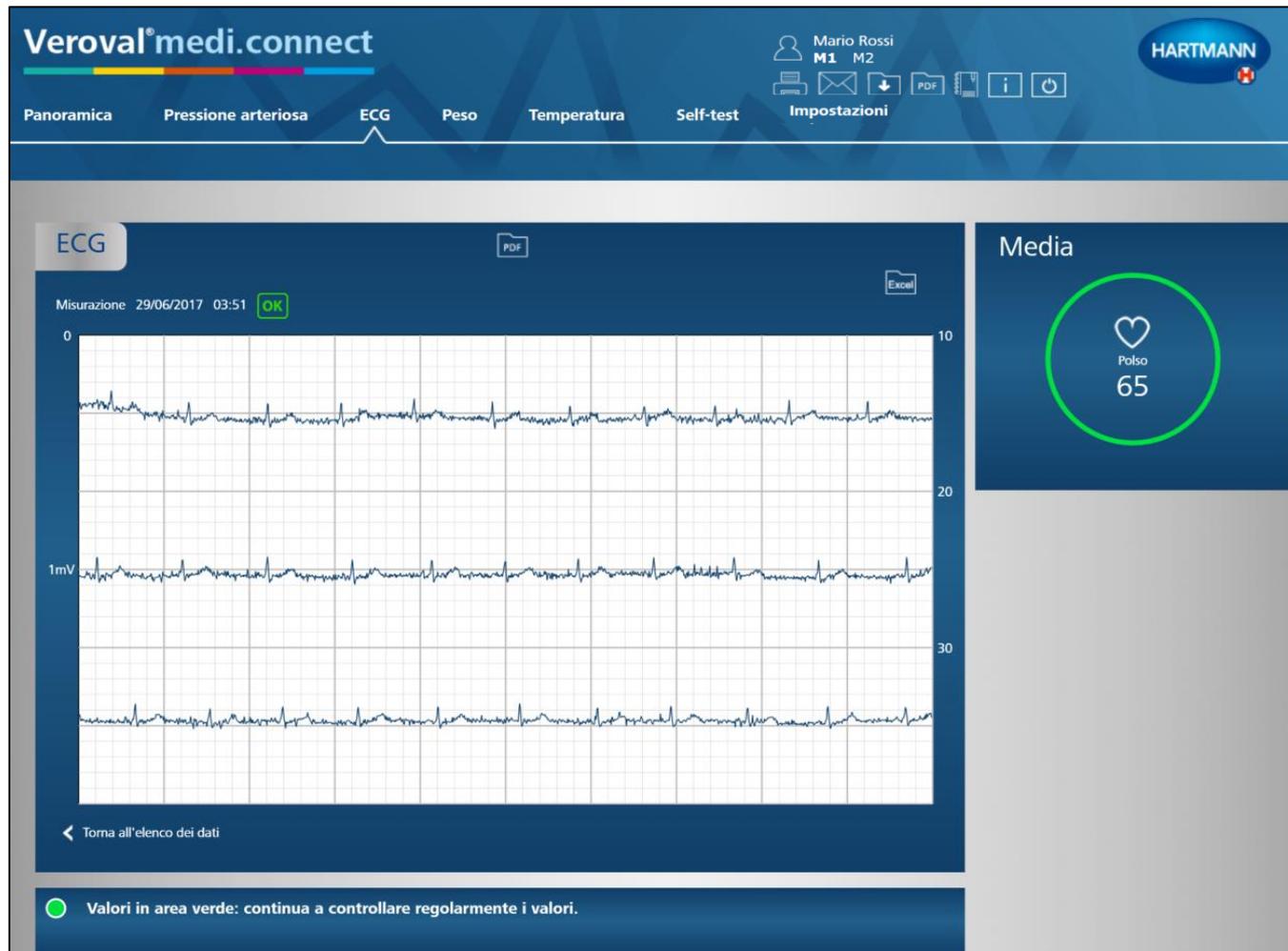

...per visualizzare la curva dell'elettrocardiogramma.

Veroval®

