

Depistarea alergiilor

Test rapid pentru depistarea alergiilor la păr de pisică, polen de iarbă și acarieni

30 min



Acuratețe
> 94 %



Alergia, un subiect sensibil: cine sau ce o declanșează?

Numeroase persoane se confruntă cu neplăceri specifice alergiilor, cum ar fi strănutul, nasul înfundat sau senzația de usturime la nivelul ochilor, fără să știe însă la ce sunt alergice.

Aflați dacă sunteți alergic(ă): testul rapid de depistare a alergiilor

Cu ajutorul testului rapid pentru depistarea alergiilor, puteți afla în numai câteva minute dacă organismul dumneavoastră prezintă o reacție alergică la păr de pisică, polen de iarbă sau acarieni. Având aceste informații, este mai simplu să evitați alergenii și să discutați cu medicul dvs. ce alte măsuri se impun.

Cât de sigur este testul Veroval®?

Testul rapid de depistare a alergiilor a fost creat pentru ca utilizatorii să poată beneficia la domiciliu de precizia și siguranța tehnologiei moderne de diagnosticare. Cu ajutorul testului poate fi măsurată prezența în sânge a unui nivel crescut al anticorpilor de tipul imunoglobulinei E (IgE), produși ca reacție alergică la părul de pisică, acarieni și polenul de iarbă. **Acuratețea dovedită prin studii de evaluare a performanțelor depășește 94 %.**

Efectuarea testului este complicată?

Nu: pe lângă mâinile bine spălate, aveți nevoie doar de un ceas și o masă netedă. Procedura de testare este explicată detaliat pe verso. În cazul copiilor cu vârsta sub 16 ani, se recomandă ca testul să fie efectuat de unul dintre părinți.

Ce anume trebuie să am în vedere?

Avertizări și indicații importante:

- Dacă instrucțiunile de utilizare nu sunt urmate corect până în cele mai mici detalii, rezultatele pot fi denaturate.
- Acuratețea kit-ului pentru autotestare depinde de efectuarea sa corectă.
- Utilizarea unei cantități prea mici sau prea mari de sânge poate denatura rezultatul.
- Componentele furnizate în cadrul unui kit de testare sunt destinate unei singure utilizări.
- Diagnosticul final trebuie pus doar de către medic, în corelație cu evaluarea simptomelor clinice și cu alte date de laborator.
- Toate componentele testului și ambalajele originale pot fi aruncate la gunoierul menajer.
- Nu utilizați testul după expirarea termenului de valabilitate.
- Nu utilizați testul dacă ambalajul din folie este deschis sau componentele sunt deteriorate.
- Nu utilizați testul dacă agentul deshidratant are culoarea verde (și nu galben sau verde-gălbui deschis).
- Efectuați testul imediat după deschiderea săculețului din folie.
- Nu depozitați testul la îndemâna copiilor!
- Componentele nu trebuie înghițate.
- Numai pentru uz extern.

Informație importantă:

Nu luați decizii medicale înainte de a fi solicitat sfatul unui medic. Dacă ați efectuat testul pentru a monitoriza o boală existentă, nu vă modificați tratamentul curent decât dacă aveți calificare de specialitate.

www.veroval.ro

Materiale

- 1 casetă de testare cu agent deshidratant, ambalată într-un saculeț din folie
- 1 recipient cu soluție de reactiv
NanoRepro AG
Untergasse 8
D-35037 Marburg
 0483
- 1 dispozitiv de puncție automat cu lanțetă sterilă pentru prelevarea probei de sânge
BD Vacutainer Systems
Plymouth, PL67BP,
UK
 0050
- 1 pipetă
Safe-Tec Clinical Products
Capartner, 4U bv3951
08 Maam, NL
- 1 tampon cu alcool
PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim,
Germany
- 1 platură
PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim,
Germany
- 1 exemplar instrucțiuni de utilizare

Explicarea simbolurilor

 A se respecta instrucțiunile de utilizare	 Dispozitiv medical de diagnostic in-vitro (uz extern)	 Data expirării (a se vedea mențiunea de pe ambalaj)
 A se depozita la loc uscat, la temperaturi între 4 °C – 25 °C. A nu se congela.	 Conținut suficient pentru 1 testare	 A nu se reutiliza
 Producător	 Sterilizare prin iradiere	 Numărul lotului (a se vedea mențiunea de pe ambalaj)
 30 min Timp de reacție în caseta de testare	 Test rapid pentru utilizare individuală	

NanoRepro AG
Untergasse 8
D-35037 Marburg
Distribuit de:
RO – PAUL HARTMANN S.R.L.
540 045 Târgu Mureș
office-ro@hartmann.info



Depistarea alergiilor

Test rapid pentru utilizare individuală

la cum se procedează:

- 1 • Așezați componentele testului în fața dumneavoastră pe masă

- (1) Recipient cu soluție de reactiv
- (2) Tampon cu alcool
- (3) Dispozitiv de puncție automat
- (4) Pipetă
- (5) Casetă de testare
- (6) Plasture



Pregătirea

- Lăsați kit-ul de testare timp de cel puțin 2 ore la temperatura camerei. Utilizați kit-ul de testare în interval de 30 de minute de la deschidere, la temperatura camerei. Deschideți ambalajul care conține dispozitivul de puncție și pipeta. Nu trageți de căpăcelul culisant de culoare albastră, deplasați-l numai

conform indicației (la 15 min. după adăugarea soluției de reactiv). Este important să aveți mâinile calde și uscate, deoarece astfel circulația sângelui este mai bună și proba de sânge este mai ușor de prelevat. Așezați caseta de testare și recipientul cu soluția de reactiv pe un suport curat și plan.



- Cu ajutorul degetului mare de la cealaltă mână, aplicat cu unghia îndreptată în sus, masați arătătorul înspre vârf până la apariția unei picături mari de sânge.
- Presăți pentru ca o picătură mare de sânge să iasă din vârful degetului.

- Țineți pipeta (4) în poziție orizontală în picătura de sânge, până ce sângele ajunge la marcajul de pe pipetă.
- Pipeta (4) se umple automat (efect de capilaritate), nu o strângeți între degete.
- Utilizarea unei cantități prea mici sau prea mari de sânge poate denatura rezultatul.
- Dacă e nevoie, utilizați plasturele (6) furnizat.



- Țineți pipeta (4) în poziție verticală și împingeți ușor sângele în adâncitura mai mică a casetei de testare (5).
- Dacă sângele nu iese, apăsați pe marcasele de culoare neagră ale pipetei (4).



- Deschideți prin deșurubare recipientul cu soluția de reactiv (1) și turnați întreg conținutul în adâncitura mare.
- Așteptați exact 15 minute și nu mișcați deloc caseta de testare (5).



- Țineți caseta de testare (5) în poziție orizontală și trageți de căpăcelul culisant de culoare albastră până ce se blochează în poziție.
- Culoarea indicatorului de derulare a testului (✓) se modifică de la albastru la alb.
- Puneți din nou caseta de testare pe un suport plan și nu o mai mișcați timp de 15 minute. În cazul unui nivel de IgE ridicat, se poate vedea deja un rezultat pozitiv. Pentru confirmarea unui rezultat negativ, trebuie să mai așteptați încă 15 minute. După un total de 30 de minute, rezultatul nu mai poate fi interpretat cu precizie.



- Deșurubați vârful albastru al dispozitivului de puncție automat (3) până când se detașează. (A nu se utiliza dacă vârful albastru lipsește.)
- Masați vârful degetului arătător și curățați-l cu tamponul cu alcool (2). Lăsați degetul să se usuce.


- Apăsați foarte strâns dispozitivul de puncție automat (3) cu suprafața albă, pretenționată cu arc, pe vârful degetului astfel sterilizat, până ce se aude un clic și simțiți o înțepătură.

Rezultat pozitiv

Alergii față de 1 până la 3 factori declanșatori (alergeni)


Exemple:

1 alergen

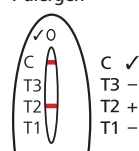


C ✓
T3 -
T2 +
T1 -

2 alergeni

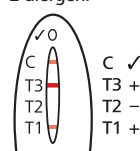

C ✓
T3 -
T2 -
T1 +

3 alergeni

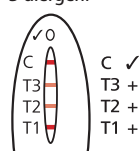

C ✓
T3 +
T2 +
T1 +


C = Linie de control
T1 = Păr de pisică
T2 = Acarieni
T3 = Polen de iarbă

Rezultatul testului arată în fiecare caz o linie roșie în câmpul de control (C), precum și una până la trei linii de culoare roșu deschis sau intens în zonele de testare (T 1-3). Numărul liniilor de culoare roz sau roșie care apar în zonele de testare indică o posibilă reacție alergică a organismului dvs. la unul, doi sau chiar la toți cei trei alergeni, deoarece a fost măsurată o cantitate crescută de anticorpi IgE. În oricare dintre aceste cazuri, aceasta înseamnă că testul este pozitiv. Un rezultat pozitiv este semnificativ doar dacă aveți într-adevăr simptome alergice sau dacă le-ați avut în trecut. Discutați cu medicul dumneavoastră cum trebuie să procedați în continuare.

Rezultate fals pozitive și fals negative:

Valorile crescute ale IgE pot constitui o indicație utilă cu privire la riscul de alergii. Doar o valoare ridicată a IgE nu reprezintă în sine un semn clar că vă confrunțați cu un risc crescut de alergii. Un rezultat pozitiv este semnificativ doar dacă ați avut într-adevăr simptome alergice. Pe de altă parte, chiar dacă valorile IgE sunt normale, nu este exclus să vă confrunțați în viitor cu un risc de alergii. Unele persoane prezintă valori IgE neobișnuit de mari, dar nu și simptome evidente. Este posibil ca protecția anticorpilor (IgE) să împiedice apariția simptomelor sau ca expunerea la alergen (factorul declanșator) să fie rară. Cu toate acestea, simptomele pot să apară la un moment ulterior. În cazul în care suferiți de o boală reumatică (artrită), trebuie avut în vedere că se poate observa un foarte slab rezultat pozitiv, chiar dacă nu suferiți de nicio alergii specifică.

Rezultat negativ

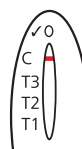

C ✓
T3 -
T2 -
T1 -

Rezultatul testului arată o linie roșie în câmpul de control (C) și nicio linie în zonele de testare (T 1-3). Nu a putut fi depistată prezența în sânge a unei cantități crescute de anticorpi IgE specifici unei reacții alergice. Pentru confirmarea clară a unui rezultat negativ, așteptați maximum 30 de minute după tragerea căpăcelului culisant de culoare albastră.

Rezultat neconcludent



C X
T3 X
T2 X
T1 X

Dacă în câmpul de control (C) nu apare nicio linie, testul nu este corect sau nu a fost finalizat. În această situație, testul nu furnizează un răspuns cu privire la prezența sau absența unei alergii. Repetați testul folosind o nouă casetă de testare.