

Embarazo

Test de detección de embarazo precoz con indicador de semana

5 min

Fiabilidad
> 99 %

¿Estoy embarazada?

Esta pregunta tan importante requiere una respuesta rápida y fiable. Si el resultado es positivo, también querrá saber en qué semana del embarazo se encuentra.

Es bueno saber qué pasa: Test de detección de embarazo precoz con indicador de semana

Con el test de detección de embarazo precoz con indicador de semana podrá saber si está embarazada a partir del décimo día desde la fecundación (es decir, incluso antes de la primera falta). Y, en caso afirmativo, en qué semana del embarazo está. El test de detección de embarazo precoz le indica si está embarazada a partir de una concentración de hCG en orina de 12 IU/L (Unidades Internacionales por litro). Si el resultado es positivo, debería consultar con su ginecólogo como proceder.

¿Es fiable el auto-test Veroval[®]?

El test de detección de embarazo precoz con indicador de semana se ha desarrollado con el objetivo de ofrecer la precisión y la fiabilidad de los diagnósticos modernos también para el uso doméstico. Se basa en la detección inmunológica de la hormona del embarazo hCG (gonadotropina coriónica humana), y es lo último en investigación médica. **Estudios de evaluación de la funcionalidad confirman una fiabilidad superior al 99 %.**

Resultados:

Para este test se calculó una sensibilidad y una especificidad de más del 99 % en un estudio clínico con 43 pacientes, que incluyen mujeres con valores de hCG muy bajos así como mujeres que podrían estar embarazadas. Los valores de referencia procedían del análisis de hCG mediante un analizador de hormonas.

¿Es complicado realizar el test?

No: lo único que necesita es un reloj con segundero y, si prefiere el método del vaso, un recipiente limpio. En el dorso encontrará las instrucciones para realizar la prueba.

Nota importante:

Si la concentración de hCG es demasiado baja (por ejemplo, si se realiza el test demasiado pronto o si la orina está muy diluida), es posible que el resultado sea negativo a pesar de estar embarazada. De la misma forma, es posible que en caso de que el resultado sea positivo, el embarazo se interrumpa, tal y como ocurre con frecuencia en las cuatro primeras semanas. Por lo tanto, en caso de incertidumbre, consulte siempre con el ginecólogo y/o repita el test de detección de embarazo precoz.

¿Qué debe tener en cuenta?

Almacenamiento:

- Conservar la prueba de detección temprana con todos sus componentes a una temperatura de entre 4 °C y 30 °C.

Vida útil:

- En caso de almacenamiento, como se indica anteriormente, consultar la fecha de caducidad en la bolsa de aluminio del dispositivo de test y en el embalaje exterior.

Fiabilidad:

- La fiabilidad es superior al 99%.

Aplicación:

- Sacar el dispositivo de test de la bolsa de aluminio inmediatamente antes de realizar el test.
- **Recomendamos realizar el test por la mañana, puesto que en la primera orina de la mañana hay más concentración de hCG.**
- No utilizar si la bolsa de aluminio está abierta o el dispositivo de test está dañado.

Eliminación:

- Todos los componentes pueden desecharse a la basura doméstica junto con su embalaje exterior.
- El desecante de la bolsa de aluminio puede desecharse.

www.veroval.es

Consultar las instrucciones de uso.
Conservar el test fuera del alcance de los niños.
No utilizar el test después de la fecha de caducidad.
Conservar los componentes del test a una temperatura de entre 4 °C y 30 °C.
El dispositivo de test solo debe utilizarse una vez.
No desmontar el dispositivo de test.
El test es solo para uso externo.
Auto-test para diagnóstico in vitro.

ZANL0013-WB-ES-PH
Rev. 01 2016-11CARE diagnostica Produktions- und
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Römerstraße 8
AT-2513 MöllersdorfDistribución: ES – Laboratorios HARTMANN S.A.
08302 Mataró
informacion@hartmann.info

CE 0483

Embarazo

Test de detección de embarazo precoz con indicador de semana. Así es como se hace:

1

Contenido:

- 1 bolsa de aluminio con dispositivo de test y desecante
- 1 folleto de instrucciones de uso

Se puede realizar siguiendo dos métodos:

3A

Método directo:

- Sostenga el dispositivo de test unos 3 segundos bajo el flujo de orina.

3B

Método con el vaso:

- Recoja la orina y sumerja el dispositivo de test hasta la profundidad máxima de inmersión unos 3 segundos.


2

- Saque el dispositivo de test de la bolsa de aluminio (conservar el embalaje).

4

- Coloque el dispositivo de test sobre la bolsa de aluminio y no la mueva.
- **Consulte el resultado al cabo de 5 minutos exactos. Si lo consulta más tarde, puede que no sea posible realizar la determinación de la semana con fiabilidad.**

No embarazada

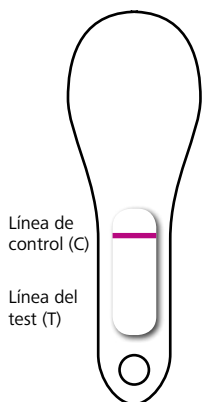


Si solo aparece una línea violeta (línea de control) en la parte superior de la ventana del dispositivo, el test se ha realizado correctamente, pero no se ha detectado hCG. Puede suponer que no está embarazada.

Si una semana después de la fecha en que esperaba tener el periodo todavía no lo ha tenido, le recomendamos que consulte con el médico. Evite riesgos potenciales como radiografías o abuso del alcohol si su periodo tiene algún retraso.

Embarazada


Si aparecen dos líneas violetas en la ventana de resultados, se ha detectado hCG en la orina. Puede suponer que está embarazada aunque la línea del test (T) inferior sea poco intensa. Para estimar la semana de embarazo, compare su resultado con la siguiente imagen. Las semanas de embarazo se estiman a partir del primer día de su último periodo.

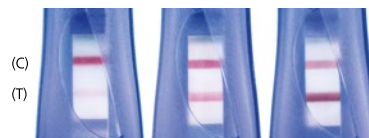

Semana tras la fecundación	1-2	2-3	3+
Semana de embarazo	3-4	4-5	5+

Si la línea del test (T) es poco intensa, puede indicar una baja implantación del embrión o el inicio del embarazo. Es importante tomar precauciones para evitar partos prematuros. Consulte inmediatamente con el médico para garantizar su salud y la de su bebé. Evite los riesgos potenciales para el embrión (por ejemplo, radiografías).

Resultado no válido

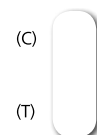

La prueba se considerará no válida si, tras 5-10 minutos no aparece ninguna línea violeta o solo aparece la línea del test (T) inferior.

Los medicamentos o enfermedades (por ejemplo, las enfermedades trofoblásticas) que afecten a los niveles de hCG pueden distorsionar el resultado. Sin embargo, las pastillas anticonceptivas no interfieren con el test.

Consejos:

Tras 20 minutos no es posible valorar con fiabilidad si está embarazada. Las causas de un resultado no válido pueden ser que la bolsa de aluminio esté dañada, que el almacenamiento haya sido incorrecto o que no se haya utilizado adecuadamente (por ejemplo, una cantidad de orina insuficiente). Por favor, en ese caso guarde todos los componentes del test y contacte con: informacion@hartmann.info