


Drugs

Multi-sneltest voor eigen gebruik

Zo voert u de test uit:

1

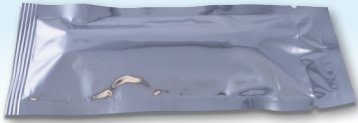

Vorbereiding

Breng de testcassette in de aluminium verpakking op kamertemperatuur alvorens de test te beginnen (15°C tot 27°C). Haal de drugstest uit de aluminium verpakking.

2



- Vang verse urine op in een beker. Bij vertroebelingen in de urine moet u wachten totdat deze neerslaan.
- Verwijder de afsluitdop en dompel de drugstest gedurende minimaal 10 seconden tot aan de markering in de urine. Zorg ervoor dat de testcassette uitsluitend tot aan de onderste rand wordt ondergedompeld.
- Let erop dat u het evaluatievenster niet aanraakt en dat er geen urine op komt.


3



- Doe de afsluitdop weer op de testcassette en leg deze op een vlak oppervlak. Raak de testcassette niet meer aan en beweeg deze niet meer. Wacht totdat de gekleurde lijnen in het reactieveld verschijnen.


4

- Lees het resultaat na ong. 5 minuten af, maar niet later dan 10 minuten.
- De drugstest moet bij goed licht worden geëvalueerd, zodat ook licht gekleurde lijnen kunnen worden onderscheiden.

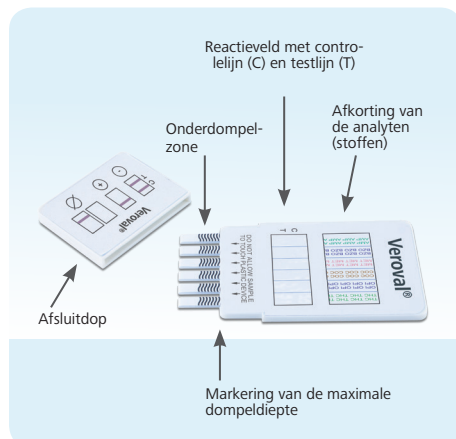

Om het resultaat te beoordelen, moet u eerst controleren of er een lijn zichtbaar is in het reactieveld onder (C). Het maakt niet uit hoe duidelijk of onduidelijk de controlelijn zichtbaar is. Elke testlijn moet individueel worden beoordeeld.


Negatief resultaat

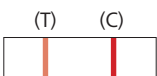

Bij een negatief resultaat, dus bij een **drugsvrij** urinemonster, verschijnen in de reactievelden **licht- tot donkerrode testlijnen (T)** en **licht- tot donkerrode controlelijnen (C)**.

De concentratie van deze specifieke drugs (of hun derivaten) in het monster ligt onder de grenswaarde.


Positief resultaat

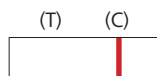

Bij een **positief resultaat** verschijnen in de reactievelden **geen testlijnen (T)** en alleen **licht- tot donkerrode controlelijnen (C)**.

De concentratie van deze specifieke drugs (of hun derivaten) in het monster ligt boven de grenswaarde. Conclusies over de hoogte van de concentratie en de overeenkomstige ernst van het gebruik zijn niet mogelijk.

Ongeldig resultaat

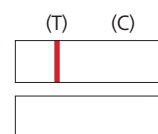

Als u in de reactievelden **uitsluitend testlijnen (T)**, **geen controlelijnen (C)** of **helemaal geen lijnen** ziet, is de **test ongeldig**.

Controleer of u alle stappen in de gebruiksaanwijzing correct hebt doorlopen. Voer nogmaals een test uit met een nieuw urinemonster.

Aanwijzingen en beperkingen:

- De multi-sneltest is geen medisch product en mag daarom niet voor diagnostische doeleinden worden gebruikt.
- Uitsluitend wanneer er daadwerkelijk **geen testlijn (T)** zichtbaar is, is de test positief.
- Opzettelijk gebruikte vervalsingsmiddelen kunnen de test beïnvloeden. In het geval van een vermoedelijke vervalsing dient de test met een nieuw urinemonster te worden herhaald.
- De zelftest kan geen onderscheid maken tussen drugsmisbruik en het gebruik van verwante medicamenten die uitsluitend op voorschrift verkrijgbaar zijn.
- Hoewel het beïnvloeden van de test door een uitgebreide reeks stoffen kan worden uitgesloten, kan niet worden uitgesloten dat andere stoffen en technische fouten of fouten die samenhangen met de uitvoering van de test het testresultaat vervalsen.