

# Veroval®



# Veroval®



V tomto krátkém video návodu vám vysvětlíme, jak můžete ve Veroval® Medi.connect využívat funkci tisku PDF.

# Veroval®

**Veroval® medi.connect**

Marie Nováková

HARTMANN

Přehled Krevní tlak EKG Hmotnost Teplota Domácí test Nastavení

poslední měření poslední týden minulý měsíc

**Krevní tlak**

Systola 119 Diastola 80  
Pulz 58  
01.01.2016

Hodnoty v zeleném poli: Hodnoty si prosím dále sami pravidelně kontrolujte.

**Hmotnost**

Kg  
BMI

**Teplota**

ráno -  
v poledne -  
večer -

**Domácí test**


| Test        | Datum | Výsledek | příští test |
|-------------|-------|----------|-------------|
| Cholesterol | -     | -        | -           |
| Sířivo      | -     | -        | -           |
| Žaludek     | -     | -        | -           |

**EKG**

OK SLOW FAST ERROR  
PAUSE RHYTHM WAVE

> Zobrazit podrobné vyhodnocení

Spustte Veroval® Medi.connect na svém počítači.

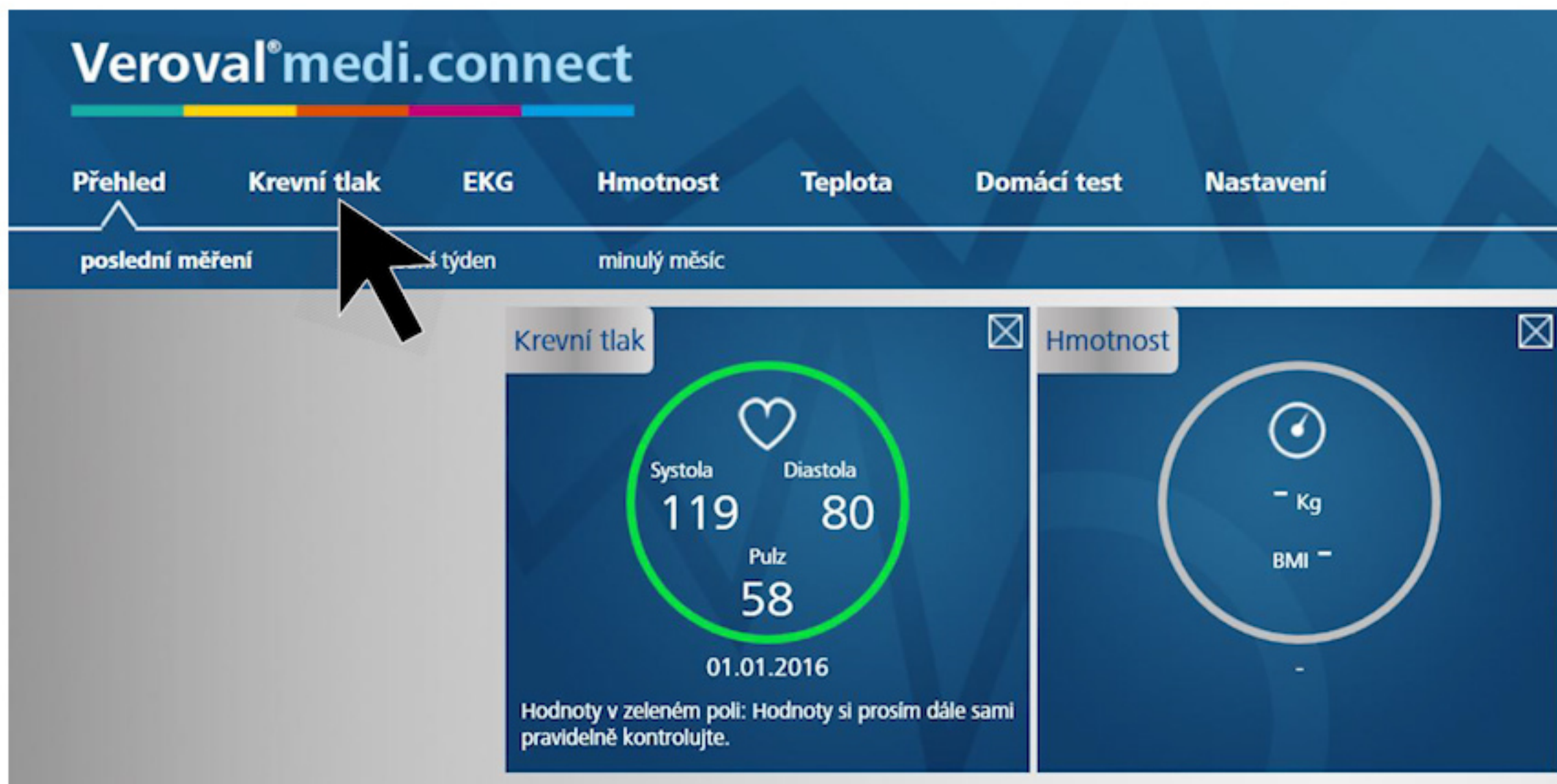

Chcete-li například vytisknout hodnoty vašeho krevního tlaku, klikněte v rejstříku na „Krevní tlak“.





Veroval® medi.connect

Marie Nováková  
M1 M2

HARTMANN

Přehled Krevní tlak EKG Hmotnost Teplota Domácí test Nastavení

### Krevní tlak

Náhled    

Týden Měsíc vybrat 26.12.2015 15:00 - 01.01.2016 15:00 Hledání MAD


ráno  večer  celý den

#### WHO směrnice

| Systola (in mmHg) | Diastola (in mmHg) |                                |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| >= 180            | >= 110             | ] vyhledat lékaře              |
| 160 - 179         | 100 - 109          |                                |
| 140 - 159         | 90 - 99            | ] pravidelná kontrola u lékaře |
| 130 - 139         | 85 - 89            |                                |
| 120 - 129         | 80 - 84            | ] Samokontrola                 |
| < 120             | < 80               |                                |

#### Průměr

Systema 119 Diastola 80  
Pulz 58

 Hodnoty v zeleném poli: Hodnoty si prosím dále sami pravidelně kontrolujte.

Vyberte období, ze kterého chcete hodnoty zobrazit,...

Veroval® medi.connect

Přehled Krevní tlak EKG Hmotnost Teplota Domácí test Nastavení

Krevní tlak

Náhled    

Týden Měsíc vybrat 26.12.2015  - 01.01.2016  Hledání  MAD

ráno  večer  celý den

...kliknutím do políček pro výběr data.

Přehled

Krevní tlak

EKG

Hmotnost

Teplota

Domácí test

Nastavení

### Krevní tlak

Náhled



Týden Měsíc vybrat

24.07.2017



15

- 26.07.2017



15

Hledání

MAD

ráno  večer

| červenec 2017 |    |    |    |    |    |    |
|---------------|----|----|----|----|----|----|
| po            | út | st | čt | pá | so | ne |
| 26            | 27 | 28 | 29 | 30 | 1  | 2  |
| 3             | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10            | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17            | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24            | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31            | <  | <  | <  | <  | <  | <  |



Vyberte časový úsek...

Přehled

Krevní tlak

EKG

Hmotnost


Teplota

Domácí test

Nastavení

### Krevní tlak

Náhled

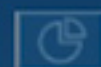

Týden

Měsíc

vybrat

24.07.2017

15

- 26.07.2017

15

Hledání

MAD

ráno

večer

celý den

← červenec 2017 →

| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1  | 2  |
| 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1< | 2< | 3< | 4< | 5< | 6< |





Vyberte časový úsek...





Veroval® medi.connect

Přehled Krevní tlak EKG Hmotnost Teplota Domácí test Nastavení

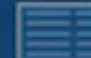
Krevní tlak

Náhled    


Týden Měsíc vybrat 24.07.2017  15 - 26.07.2017  15 Hledání  MAD

ráno  večer  celý den

... a klikněte na „Vyhledat“.

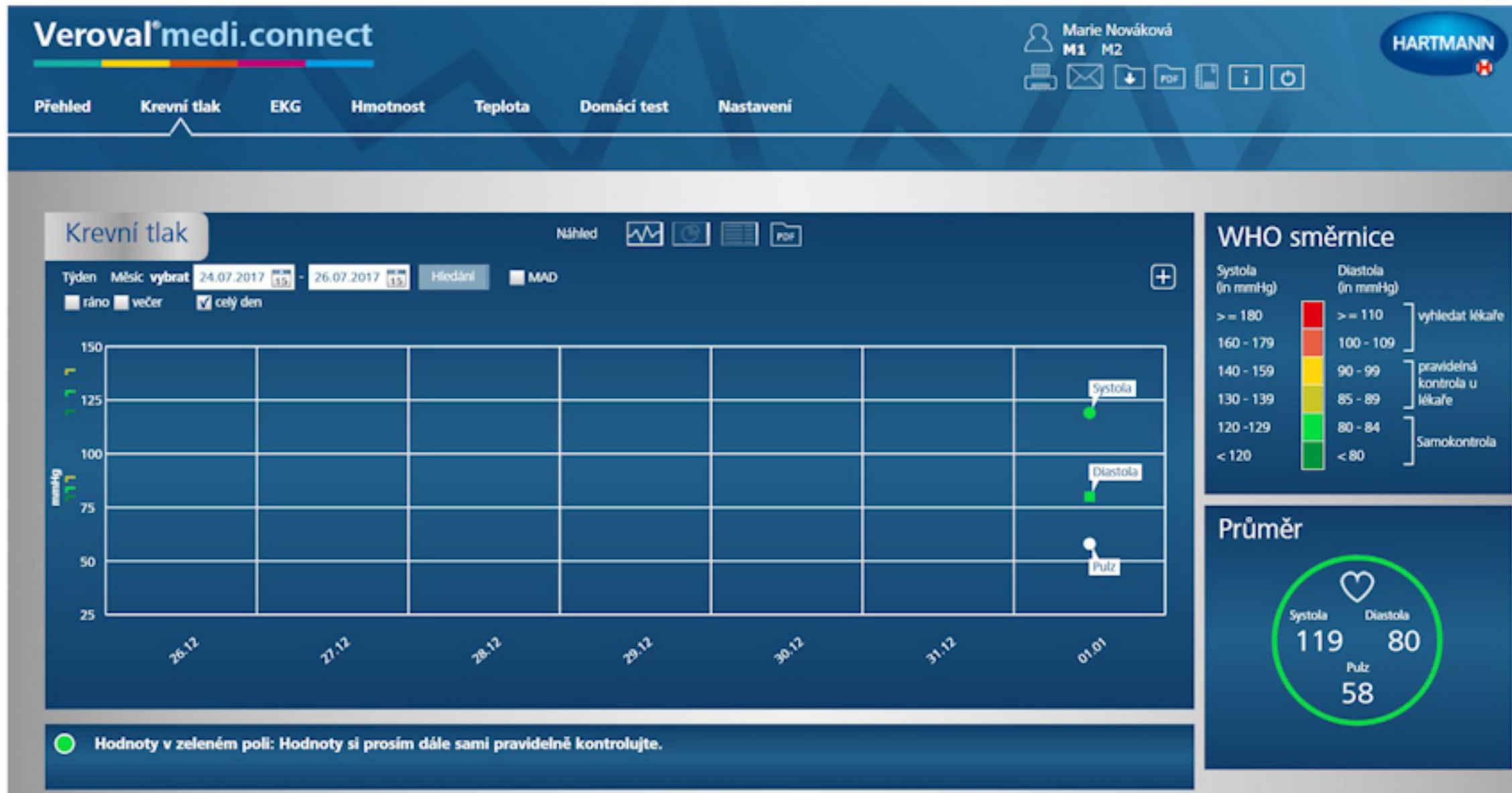

Zobrazí se grafika s hodnotami v daném časovém období.

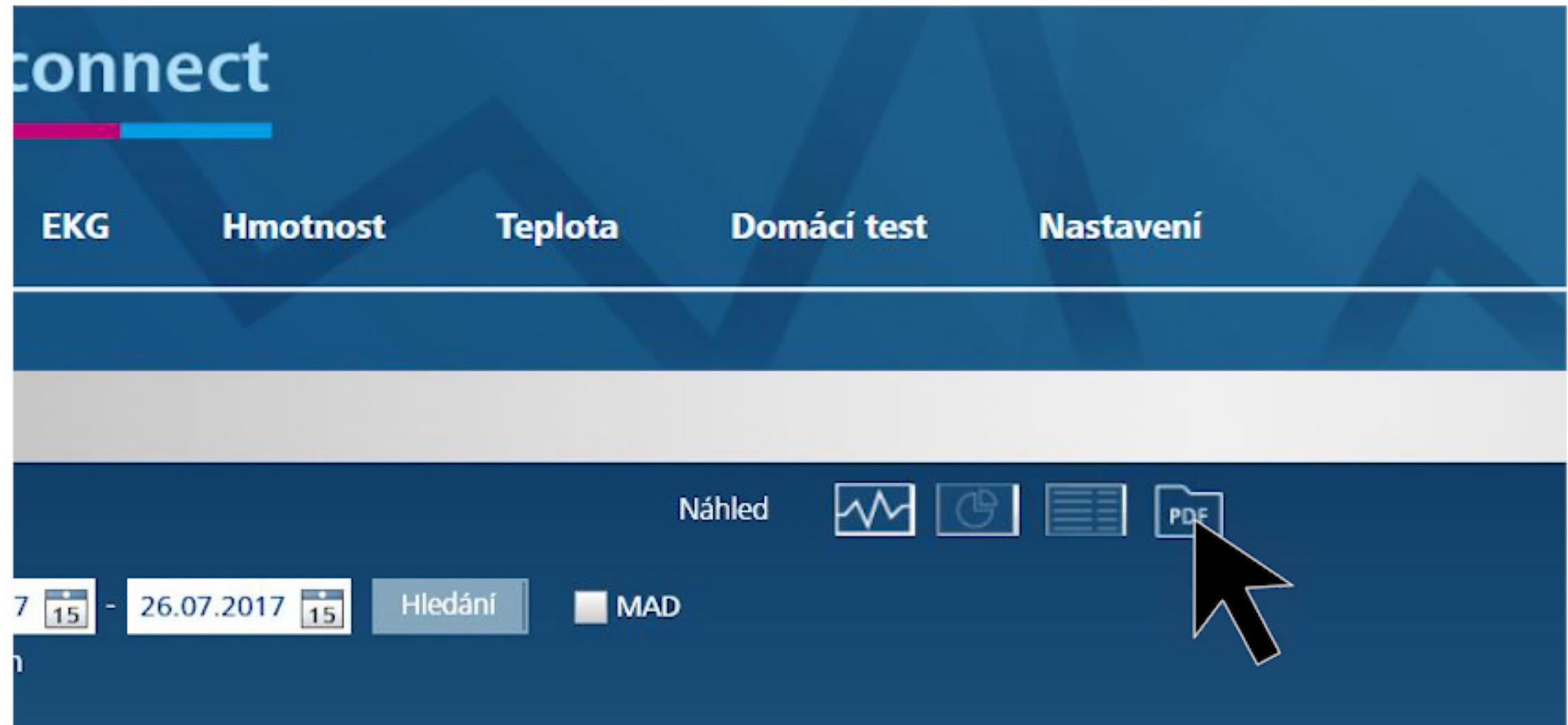

Pro vytištění klikněte na „PDF“.

The screenshot shows a PDF viewer window with a dark blue header containing buttons for 'Tisk', 'PDF', 'Zvolit nově', and 'Zavřít'. The main content area displays a medical report for a patient named Marie Nováková, born on 03.02.1965. The report includes a summary of blood pressure measurements from 26.12.2015 to 01.01.2016, a table of measurements, and a note about medication. The table shows one measurement on 01.01.2016 at 01:02 with a WHO status of green, a systolic pressure of 119 mmHg, a diastolic pressure of 80 mmHg, a pulse of 58, and a MAD of 93. The 'Provést analýzu' column has a blue checkmark.

Přehled měření krevního tlaku: 26.12.2015 - 01.01.2016

Pohlaví: Žena  
Jméno: Marie  
Příjmení: Nováková  
Datum narození: 03.02.1965  
Věk (roky): 52  
Ulice: [blank]  
PSČ: [blank]  
Město: [blank]  
Výška: 165  
Online služba: [blank]

**Medikace**  
K dispozici nejsou žádná data.

### Krevní tlak

Celkový počet měření pro zvolené časové období: 1


| Datum      | Čas   | WHO | Sys. mmHg | Dia. mmHg | Palz/mín | Porucha srdečního rytmu | MAD | manuálně | Provést analýzu | Denní doba | Medikace/<br>Poznámka |
|------------|-------|-----|-----------|-----------|----------|-------------------------|-----|----------|-----------------|------------|-----------------------|
| 01.01.2016 | 01:02 | ●   | 119       | 80        | 58       |                         | 93  |          | ✓               |            |                       |

MAD = Střední arteriální tlak


Zobrazí se vám dlouhé PDF s různými náhledy a přehledy.



Vybrané hodnoty zobrazeny v grafech.

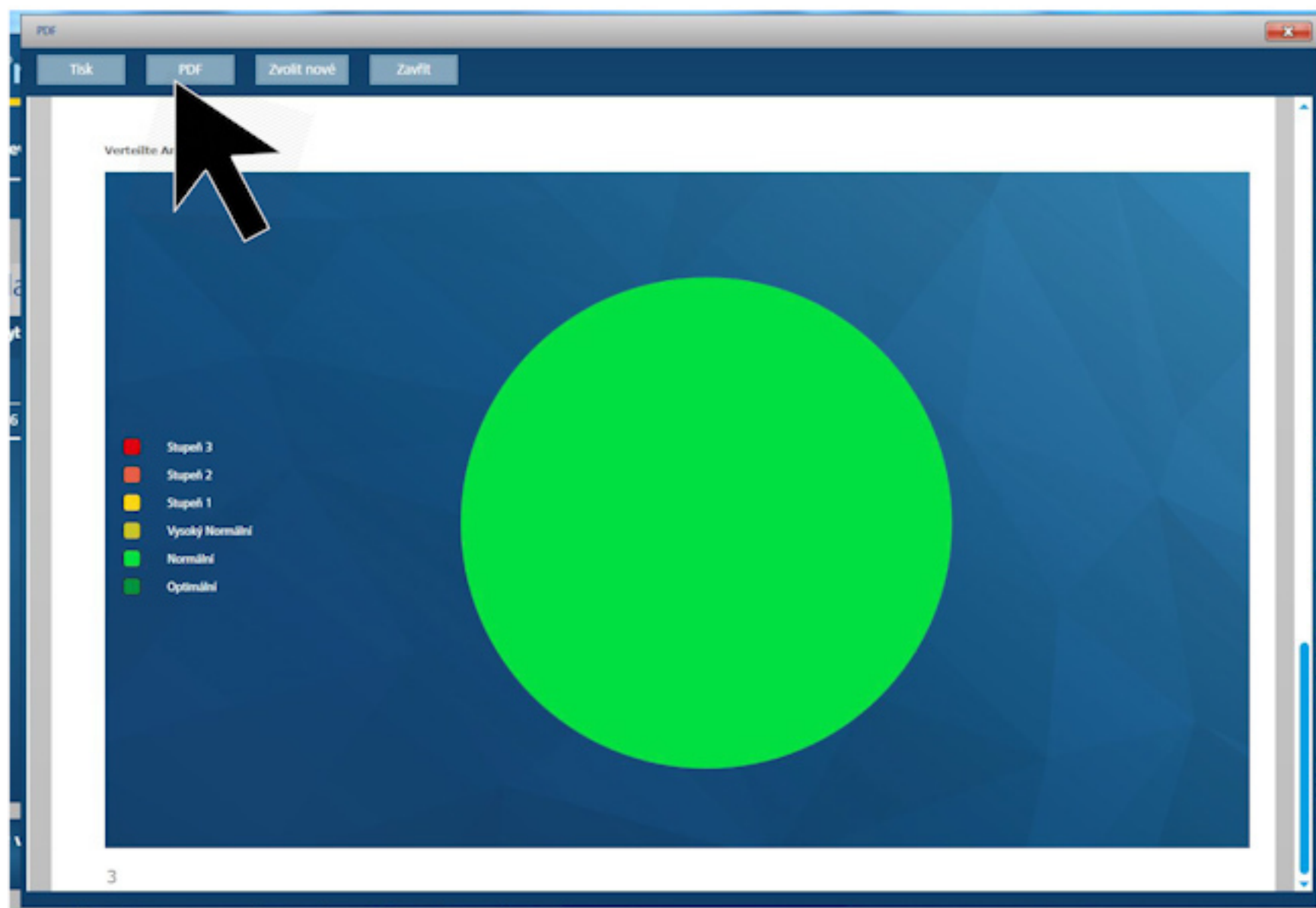

K uložení PDF klikněte v otevřeném okně na „PDF“.

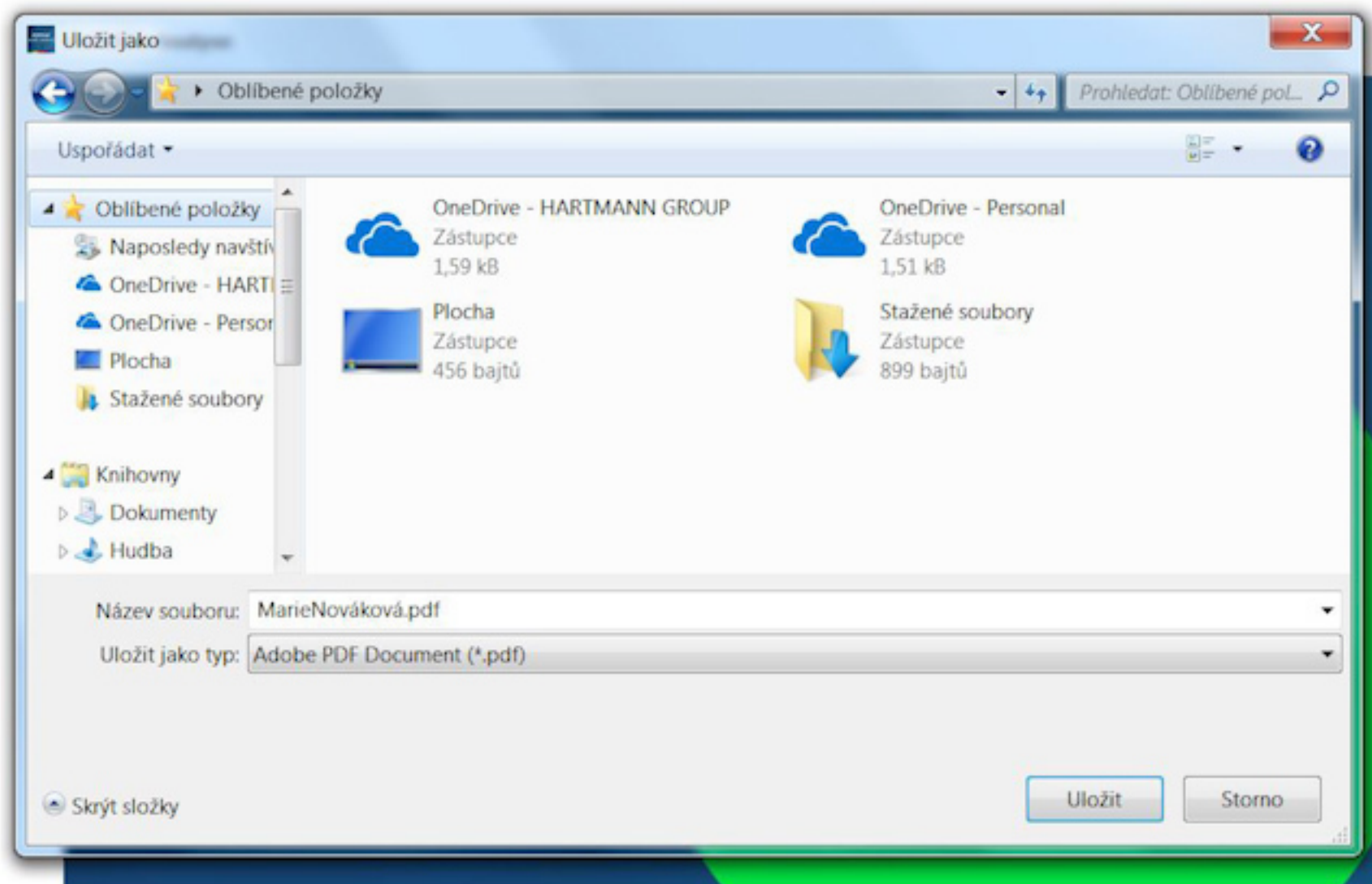

Vyberte požadované umístění a klikněte na „uložit“.



Pokud chcete PDF pouze vytisknout,  
neklikejte v otevřeném okně na „PDF“ nýbrž na možnost „Tisk“.



The screenshot displays the Veroval® medi.connect web interface. At the top, the user is identified as Marie Nováková (M1 M2). The navigation menu includes: Přehled, Krevní tlak (selected), EKG, Hmotnost, Teplota, Domácí test, and Nastavení. The main content area is titled 'Krevní tlak' and shows a table of blood pressure readings for the period from 26.12.2015 to 01.01.2016. A single entry is visible for 01.01.2016 at 01:02, with a green dot indicating a normal reading. The table columns are: Datum, Čas, Systola, Diastola, Pulz, Porucha srdečního rytmu, and Poznámky. To the right, the 'WHO směrnice' (WHO guidelines) are shown with a color-coded scale for Systola and Diastola. Below this, the 'Průměr' (Average) section displays the mean values: Systola 119, Diastola 80, and Pulz 58. A green circle highlights these average values. At the bottom, a green dot and text state: 'Hodnoty v zeleném poli: Hodnoty si prosím dále sami pravidelně kontrolujte.'

Veroval® medi.connect

Marie Nováková  
M1 M2

HARTMANN

Přehled Krevní tlak EKG Hmotnost Teplota Domácí test Nastavení

### Krevní tlak

Náhled

Týden Měsíc vybrat 26.12.2015 - 01.01.2016 Hledání

| Datum      | Čas   | Systola | Diastola | Pulz | Porucha srdečního rytmu | Poznámky |
|------------|-------|---------|----------|------|-------------------------|----------|
| 01.01.2016 | 01:02 | 119     | 80       | 58   |                         |          |

### WHO směrnice


| Systola (in mmHg) | Diastola (in mmHg) | vyhledat lékaře                |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| >= 180            | >= 110             | ]                              |
| 160 - 179         | 100 - 109          |                                |
| 140 - 159         | 90 - 99            | ] pravidelná kontrola u lékaře |
| 130 - 139         | 85 - 89            |                                |
| 120 - 129         | 80 - 84            | ] Samokontrola                 |
| < 120             | < 80               |                                |

### Průměr


Systola 119 Diastola 80  
Pulz 58

Hodnoty v zeleném poli: Hodnoty si prosím dále sami pravidelně kontrolujte.

Soubor můžete vytisknout, příp. uložit i přes pole s obecnou navigací.

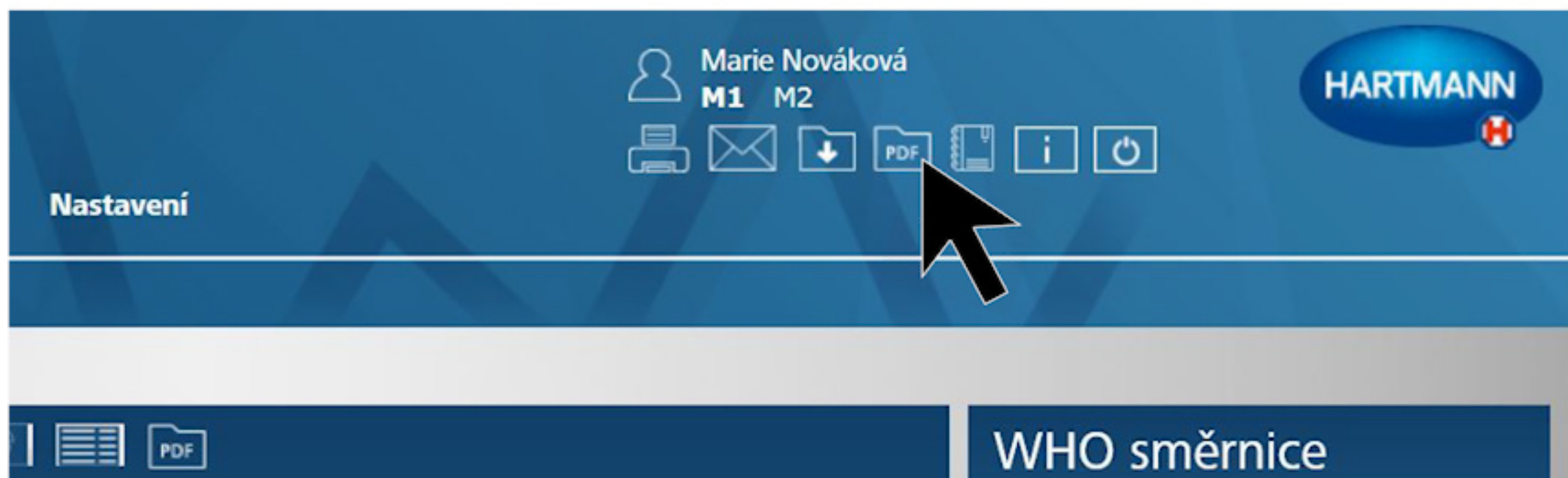

K tomu klikněte jednoduše na symbol PDF nebo tisk.

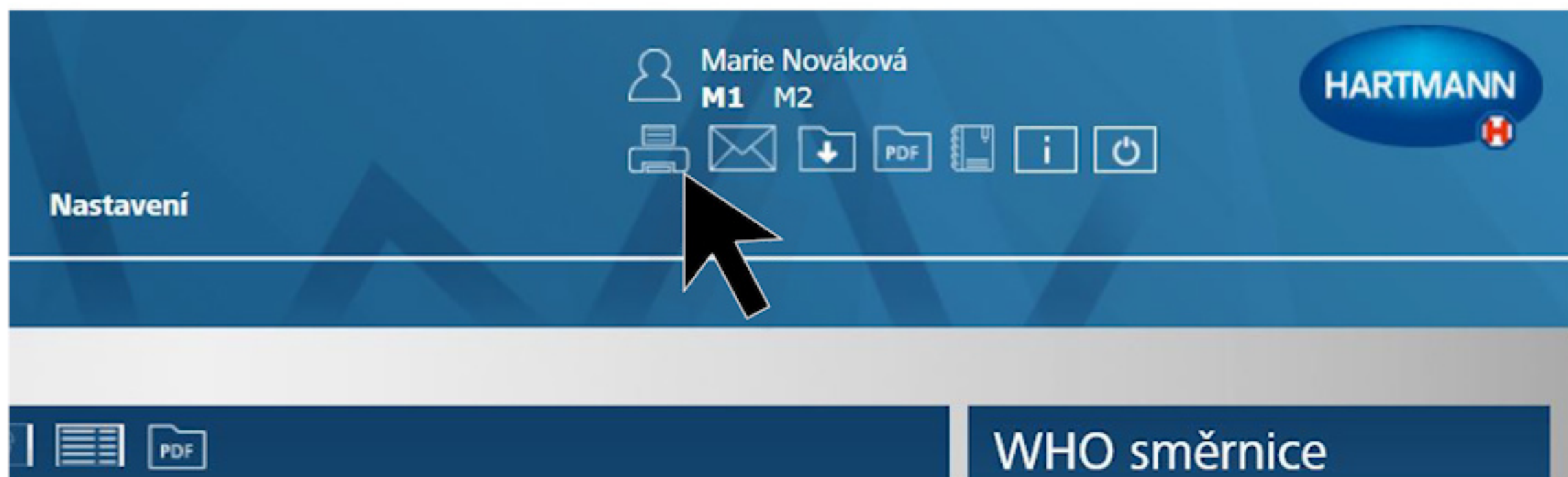

K tomu klikněte jednoduše na symbol PDF nebo tisk.

**Veroval® medi.connect**

Marie Marie Nováková  
M1 M1 M2

**Vytvořit PDF**

Rozsah dat od 26.12.2015 do 01.01.2016

Vybrat třídu přístroje:

- Informace o uživateli
- Medikace
- Krevní tlak
- EKG
- Váha
- Teplota
- Domácí test

**Krevní tlak**

Týden Měsíc vybrat 26.12.2015 - 01.01.2016 Hled

| Datum      | Čas   | Systola | Diastola | Pulz | Porucha |
|------------|-------|---------|----------|------|---------|
| 01.01.2016 | 01:02 | 119     | 80       | 58   |         |

**WHO směrnice**

| Systola (in mmHg) | Diastola (in mmHg) | vyhledat lékaře                |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| >= 180            | >= 110             | ]                              |
| 160 - 179         | 100 - 109          |                                |
| 140 - 159         | 90 - 99            | ] pravidelná kontrola u lékaře |
| 130 - 139         | 85 - 89            |                                |
| 120 - 129         | 80 - 84            | ] Samokontrola                 |
| < 120             | < 80               |                                |

**Průměr**

Systola: 119  
Diastola: 80  
Pulz: 58

Hodnoty v zeleném poli: Hodnoty si prosím dále pravidelně sledovat

V novém okně zvolíte hodnoty, které budete chtít vytisknout nebo uložit.

# Veroval<sup>®</sup>



Poté klikněte na „Náhled“ a pokračujte v již známých krocích.

# Veroval®

