

Veroval®



Veroval®



V tomto krátkém video návodu vám vysvětlíme, jak jednoduše přenesete data z vašeho Veroval® EKG a tlakoměru...

Veroval®



... do vašeho Veroval® Medi.connect softwaru.


Veroval®

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web interface. At the top left, the logo 'Veroval® medi.connect' is visible. The user's name 'Marie Nováková' and the HARTMANN logo are in the top right. A navigation menu includes 'Přehled', 'Krevní tlak', 'EKG', 'Hmotnost', 'Teplota', 'Domácí test', and 'Nastavení'. Below the menu, there are filters for 'poslední měření', 'poslední týden', and 'minulý měsíc'. The main content area is divided into several panels:

- Krevní tlak**: A circular gauge showing 'Systola', 'Diastola', and 'Pulz' with dashes indicating no data.
- Hmotnost**: A circular gauge showing 'Kg' and 'BMI' with dashes.
- Teplota**: A circular gauge with a thermometer icon and three time slots: 'ráno', 'v poledne', and 'večer', all with dashes.
- Domácí test**: A table with columns 'Test', 'Datum', 'Výsledek', and 'přítel test'.

Test	Datum	Výsledek	přítel test
Cholesterol	-	-	-
Střevo	-	-	-
Žaludek	-	-	-
- EKG**: A panel with buttons for 'OK', 'SLOW', 'FAST', 'ERROR', 'PAUSE', 'RHYTHM', and 'WAVE'. Below the buttons is a link: 'Zobrazit podrobné vyhodnocení'.

Otevřete si Veroval® Medi.connect na vašem PC,...

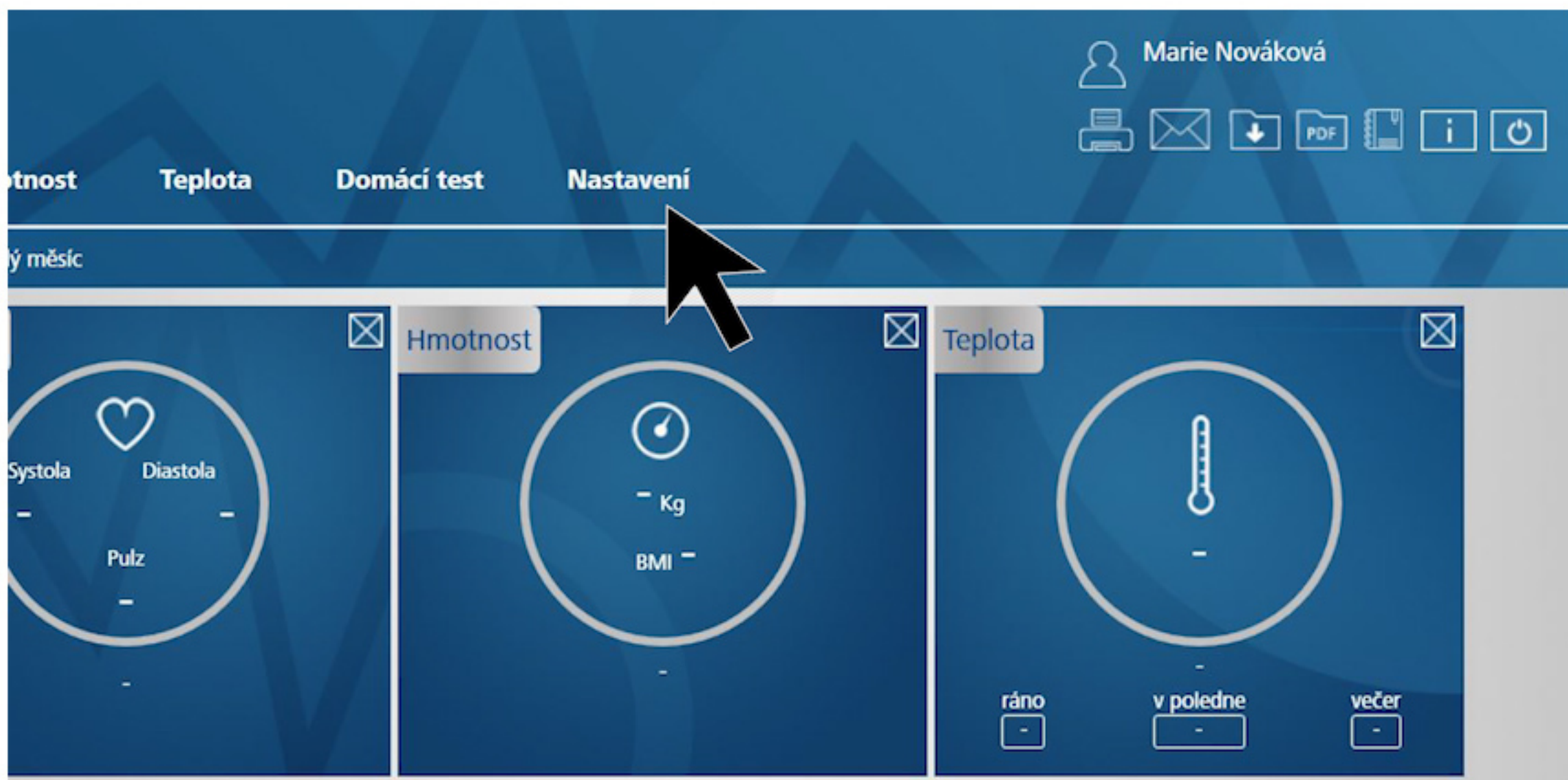

... přejděte v horní části na „Nastavení“.

medi.connect

Krevní tlak EKG Hmotnost Teplota Domácí test **Nastavení**


System Krevní tlak EKG Hmotnost Teplota Připomínky


Muž Žena

Ulice: Josefská 2

Marie PSČ: 61600

Nováková Město: Brno


23.11.1979  Věk (roky): 37 Výška: 165 Centimetry

Ochrana heslem není nastavena 

Následně klikněte v řádku vlevo níže na možnost „EKG“.

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web interface. At the top left, the logo 'Veroval® medi.connect' is visible. The top right corner shows the user's name 'Marie Nováková' and the HARTMANN logo. A navigation bar contains several menu items: 'Přehled', 'Krevní tlak', 'EKG', 'Hmotnost', 'Teplota', 'Domácí test', and 'Nastavení'. Below this, a secondary navigation bar includes 'Můj profil', 'Systém', 'Krevní tlak', 'EKG', 'Hmotnost', 'Teplota', and 'Připomínky'. The main content area is titled 'EKG' and features a dropdown menu labeled 'Volba přístroje'. The dropdown is open, showing a single option: 'Veroval EKG a tlakoměr'. Below the dropdown are two buttons: 'Uložit' and 'Obnovit'.

Na nastavovací stránce EKG zvolte možnost Veroval® EKG a tlakoměr,...

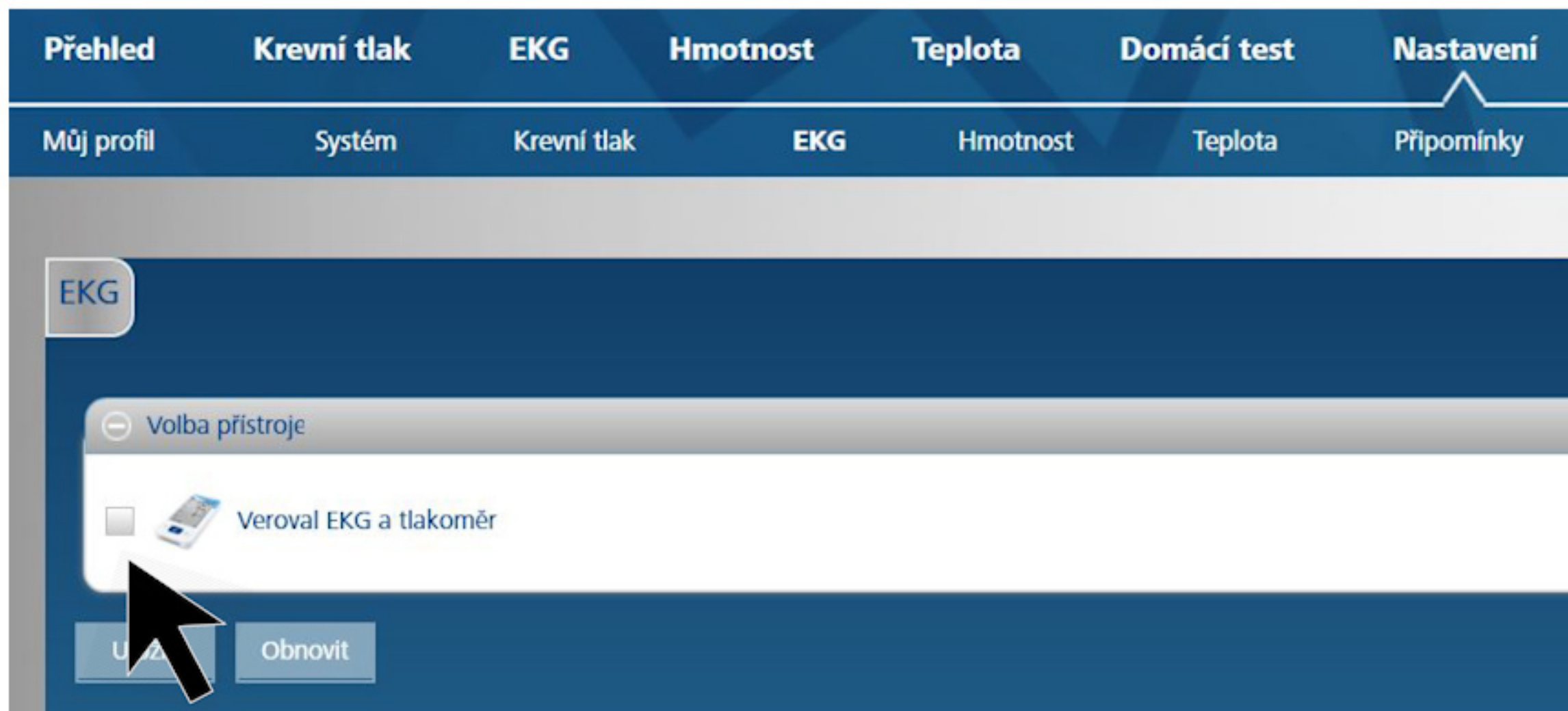


Na nastavovací stránce EKG zvolte možnost Veroval® EKG a tlakoměr,...

Přehled **Krevní tlak** **EKG** **Hmotnost** **Teplota** **Domácí test** **Nastavení**

Můj profil Systém Krevní tlak **EKG** Hmotnost Teplota Připomínky

EKG

Volba přístroje

 Veroval EKG a tlakoměr

1. Paměť uložená v přístroji
2. Paměť uložená v přístroji

Uložit Obnovit

... zvolte uživatele a uložte. Tento krok stačí provést pouze jednou.



K přenesení dat klikněte na „EKG“ v horní části rejstříku,...

Veroval®



... zasuněte USB-Bluetooth adaptér do USB zdičky vašeho PC.

Veroval[®]



Při správném propojení svítí adaptér zeleně.

Veroval®



Zapněte váš přístroj vpravo dole.

Veroval®



Pokud nezačne přenos dat do 30 sekund,...

Veroval®




... přepne se přístroj do pohotovostního režimu.

Veroval®



V tomto případě zapněte přístroj znovu.

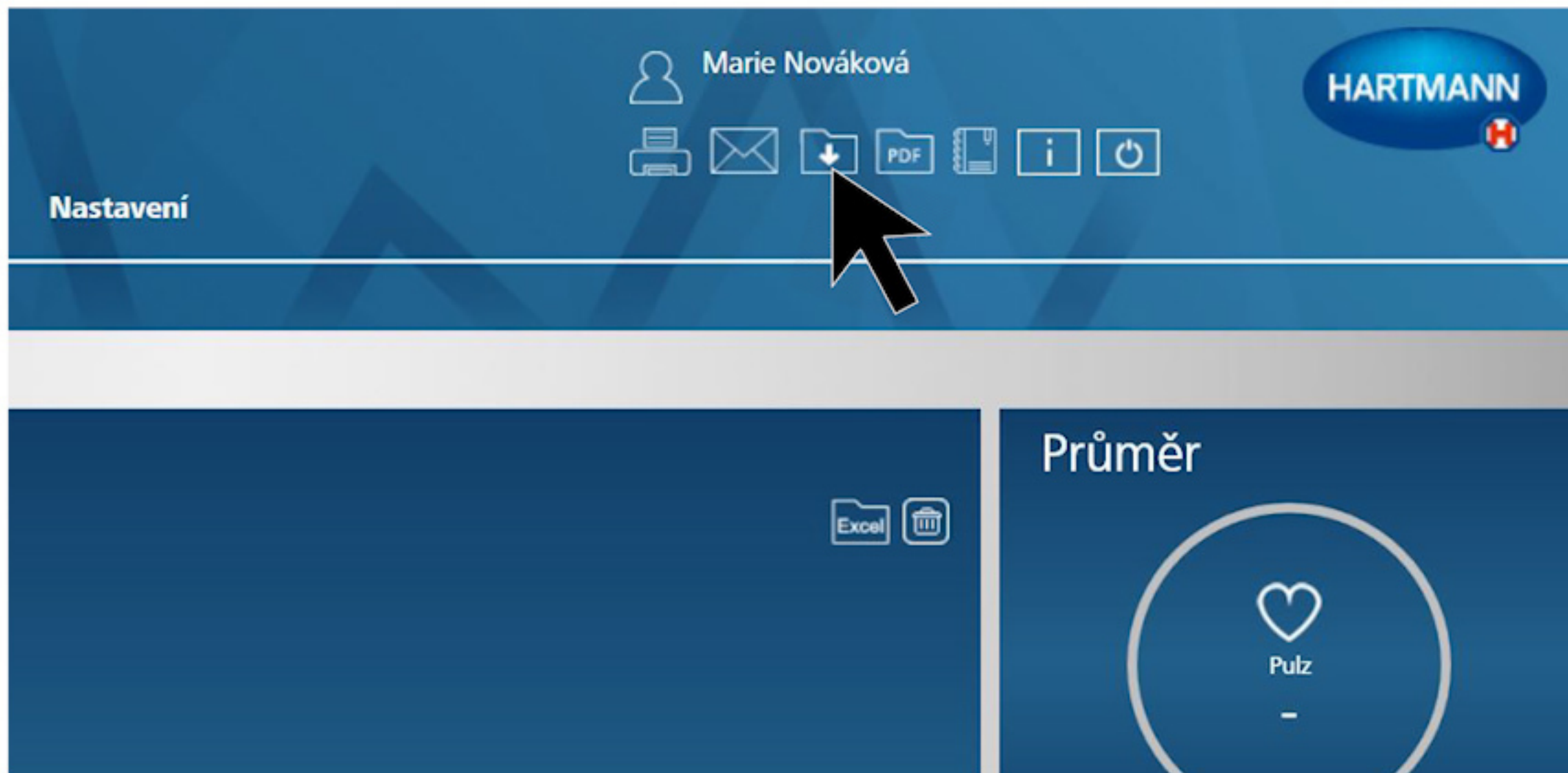

Klikněte vpravo nahoře na tlačítko „Přenos dat“.


The screenshot displays the Veroval web interface. At the top right, the user is identified as Marie Nováková with M1 and M2 status. The HARTMANN logo is also present. Navigation options include 'Domácí test' and 'Nastavení'. A 'Průměr' (Average) section shows a heart icon and the text 'Pulz -'. A dialog box titled 'Vybrat přístroj' (Select device) is open, showing the selected category 'Veroval EKG a tlakoměr' and a list item '1. Paměť uložená v přístroji'. A mouse cursor is pointing at the device icon in the list. The dialog box also contains instructions: 'Aktuálně zvolená kategorie přístroje: Pro spuštění stahování dat prosím klepněte na odpovídající obrázek.' (Currently selected device category: To start data download, please click on the corresponding image.)

Vyberte váš přístroj Veroval® EKG a tlakoměr.

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web application interface. At the top left, the logo "Veroval® medi.connect" is visible. The top right corner shows the user's name "Marie Nováková" and device identifiers "M1 M2", along with the "HARTMANN" logo. A navigation bar includes tabs for "Přehled", "Krevní tlak", "EKG", "Hmotnost", "Teplota", and "Domů". The "EKG" tab is currently selected. A search modal window is open, titled "Informace o programu", with a close button. It contains two sections: "Seznam nalezených zařízení s ikonou a názvem" and "Seznam spárovaných zařízení". Below these sections is a large white box with a circular loading icon and the text "Probíhá Načítání dat – počkejte prosím okamžik." At the bottom of the modal are "Skenování" and "Storno" buttons. The background interface shows a date range selector for "Týden" and "Měsíc vybrat" with dates "18.07.2017" and "24.07.2017", and a "Hledání" button. On the right side, there is a "Průměr" (Average) section with a heart icon and the word "Pulz" (Pulse) above a dash "-".


Přístroj se vyhledává a při úspěšném vyhledání se zobrazí.

Veroval®

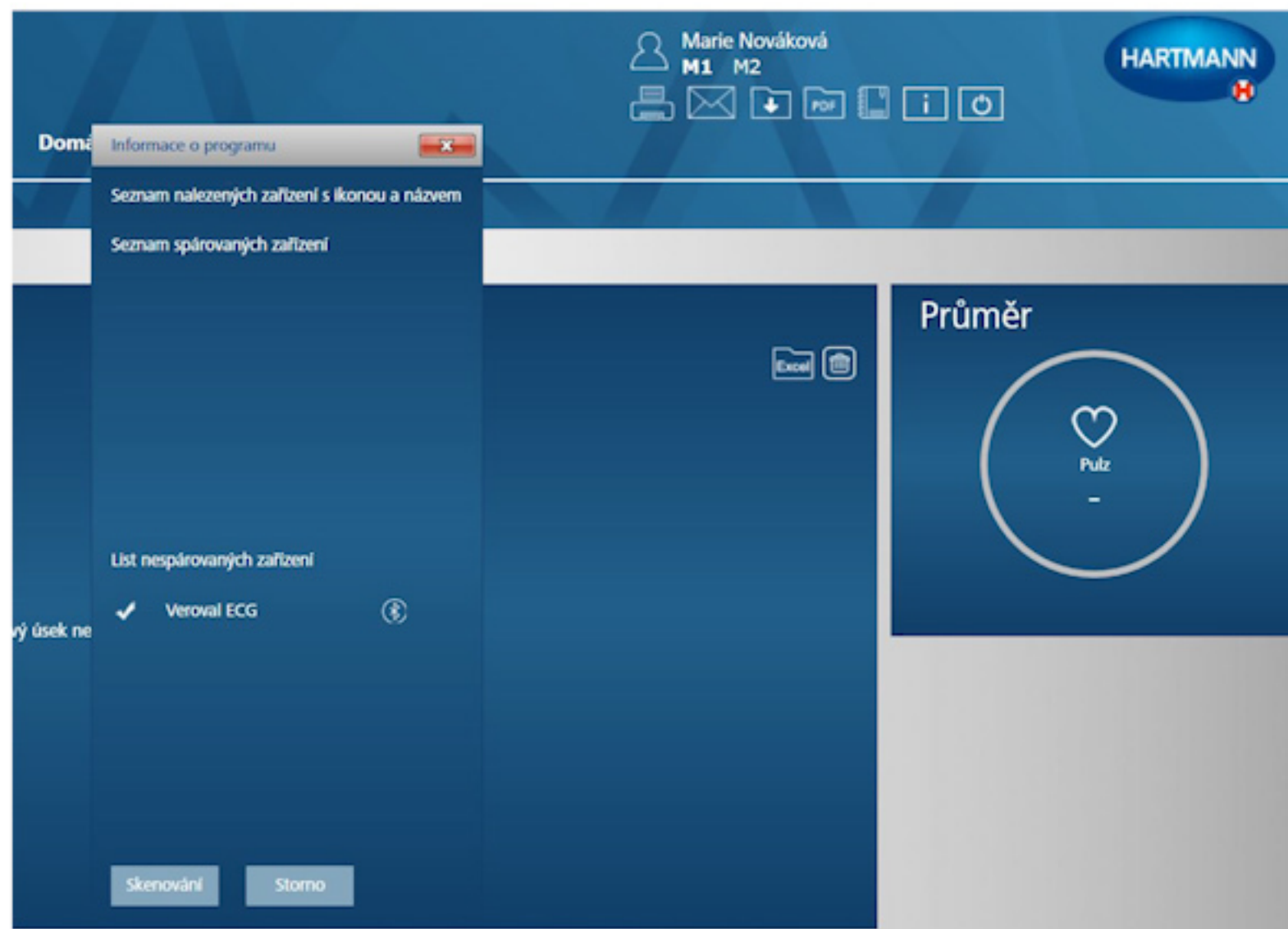

Přístroj se vyhledává a při úspěšném vyhledání se zobrazí.

Veroval®

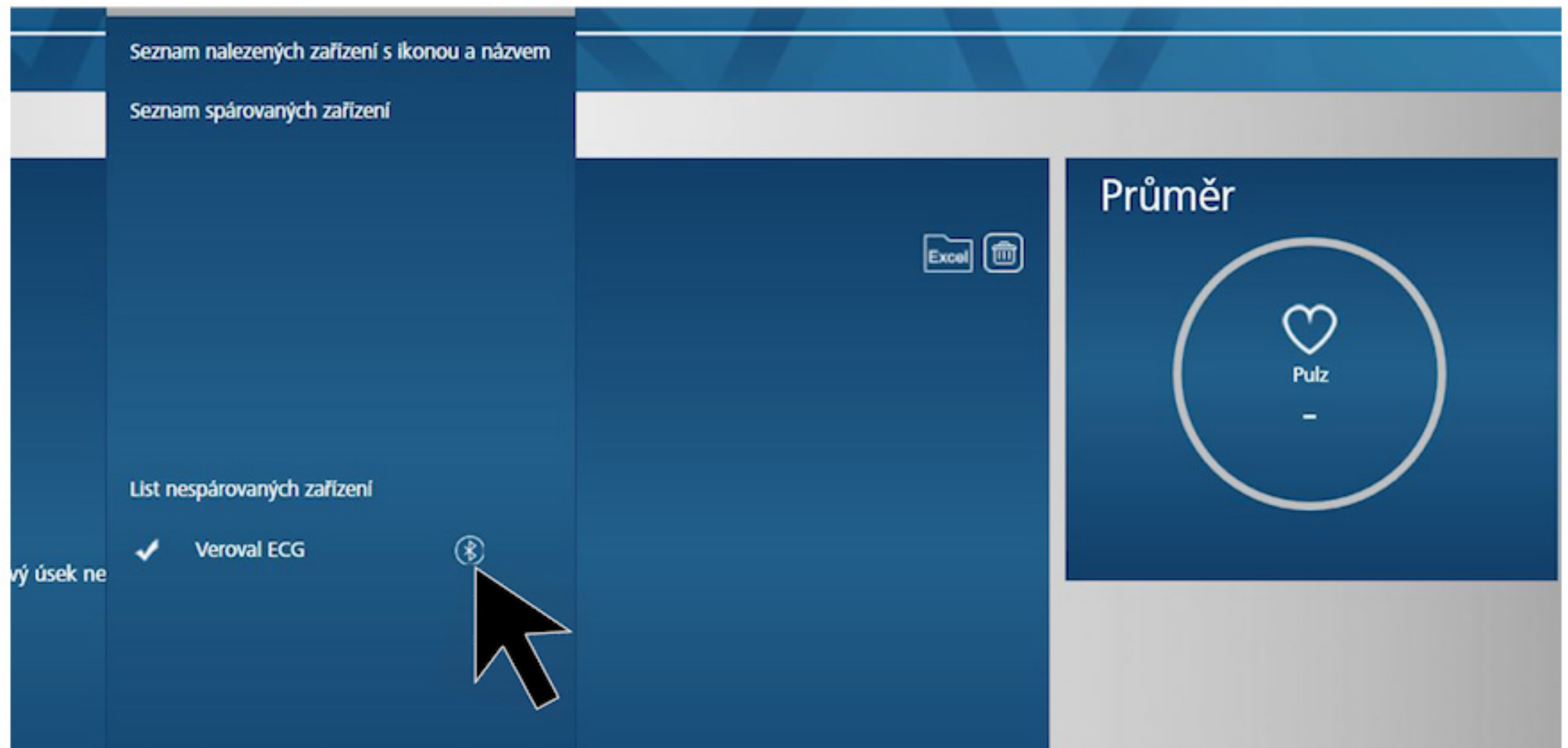

Nyní klikněte na symbol Bluetooth...

Veroval®



... a znovu zapněte EKG přístroj,...

Veroval®



.. pokud se přístroj již uvedl do pohotovostního režimu.

Veroval®



Bluetooth připojení je vytvořeno.

Veroval®

The screenshot displays the 'connect' software interface. At the top left, the 'connect' logo is visible. The top right corner shows the user name 'Marie Nováková' and device identifiers 'M1 M2'. A navigation bar includes tabs for 'EKG', 'Hmotnost', 'Teplota', and 'Domá'. A central menu is open, titled 'Informace o programu', and contains three sections: 'Seznam nalezených zařízení s ikonou a názvem', 'Seznam spárovaných zařízení', and 'List nespárovaných zařízení'. Under the 'Seznam spárovaných zařízení' section, the device 'Veroval ECG' is listed with a checkmark and three icons: a heart, a gear, and a close button. A large black arrow points to the heart icon. The background interface shows a date range '2017 15 - 24.07.2017 15' and a search button 'Hledání'. On the right, there is a 'Průměr' (Average) section with a heart icon and the text 'Pulz -'. The HARTMANN logo is in the top right corner.

Klikněte na nově zobrazenou ikonku k přenosu dat.

The screenshot displays the Veroval medi.connect web application interface. At the top left, the logo "Veroval® medi.connect" is visible. The top right corner shows the user profile "Marie Nováková" with identifiers "M1" and "M2", and the "HARTMANN" logo. A navigation menu includes "Přehled", "Krevní tlak", "EKG", "Hmotnost", "Teplota", and "Domá". The "EKG" tab is active, showing a date range from "18.07.2017" to "24.07.2017" and a "Hledání" button. A modal window titled "Informace o programu" is open, listing "Seznam nalezených zařízení s ikonou a názvem" and "Seznam spárovaných zařízení". Under the second list, "Veroval ECG" is checked. A loading spinner is present with the text "Data se stahují. – Počkejte prosím okamžik." Below the spinner, it says "Pro tento časový úsek ne". At the bottom of the modal are "Skenování" and "Storno" buttons. On the right side of the main interface, there is a "Průměr" section with a heart icon and the text "Pulz -".

Data se nyní přenáší.

Veroval®



Během přenosu svítí adaptér červeně...

Veroval®



... a na EKG přístroji bliká symbol připojení.

Veroval® medi.connect

Marie Nováková
M1 M2

HARTMANN

Přehled Krevní tlak **EKG** Hmotnost Teplota Domácí test Nastavení

EKG

Týden Měsíc vybrat 18.07.2017 - 24.07.2017

Hledání

Přenos dat z celé paměti uživatelů v tomto přístroji

Následující data byla z přístroje přenesena: EKG

<input type="checkbox"/>	Paměť uložena v přístroji	Uživatel	Celkový počet přenesených měření	Duplicitní záznamy	Nová měření	Detail
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Marie Nováková	5	0	5	

Stisknutím tlačítka Uložit dojde k uložení dat všech zvolených uživatelů.

Uložit

Průměr

Pulz

-


Po přenosu vyberte, které hodnoty chcete uložit:...

Veroval®

Hledání

Přenos dat z celé paměti uživatelů v tomto přístroji

Následující data byla z přístroje přenesena: *EKG*

<i>Paměť uložená v přístroji</i>	<i>Uživatel</i>	<i>Celkový počet přenesených měření</i>	<i>Duplicitní záznamy</i>	<i>Nová měření</i>	<i>Detail</i>
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Marie Nováková	5	0	5	

Stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení dat všech zvolených uživatelů.


... jestli EKG...

Veroval[®]

Hledání

Přenos dat z celé paměti uživatelů v tomto přístroji

Následující data byla z přístroje přenesena: *EKG*

<i>Paměť uložená v přístroji</i>	<i>Uživatel</i>	<i>Celkový počet přenesených měření</i>	<i>Duplicitní záznamy</i>	<i>Nová měření</i>	<i>Detail</i>	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Marie Nováková	5	0	5	

Stisknutím tlačítka Uložit dojde k uložení dat všech zvolených uživatelů.


Uložit

... nebo krevní tlak...

Hledání


Přenos dat z celé paměti uživatelů v tomto přístroji

Následující data byla z přístroje přenesena: *EKG*

<i>Paměť uložená v přístroji</i>	<i>Uživatel</i>	<i>Celkový počet přenesených měření</i>	<i>Duplicitní záznamy</i>	<i>Nová měření</i>	<i>Detail</i>	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Marie Nováková	5	0	5	

Stisknutím tlačítka Uložit dojde k uložení dat všech zvolených uživatelů.

Uložit



... případně oboje. Poté klikněte na „Uložit“ a potvrďte uložení kliknutím na „OK“.

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web application interface. At the top, the user is identified as Marie Nováková (M1, M2) with the HARTMANN logo. The navigation menu includes: Přehled, Krevní tlak, EKG, Hmotnost, Teplota, Domácí test, and Nastavení. The main content area is titled 'EKG' and shows a date range from 18.07.2017 to 24.07.2017. A dialog box is open, titled 'Veroval® medi.connect', with the message 'Měření byla úspěšně uložena.' (Measurement was successfully saved). Below the message is a table with columns: 'Paměť uložena v přístroji' (checked), 'Uživatel' (Marie Nov), 'Kritn samy' (0), 'Nová měření' (5), and 'Detail'. A mouse cursor is pointing at the 'OK' button. To the right, a 'Průměr' (Average) section shows a heart icon and the text 'Pulz -'.

... případně oboje. Poté klikněte na „Uložit“ a potvrďte uložení kliknutím na „OK“.

Veroval®

The screenshot displays the Veroval®medi.connect web application interface. At the top, the user is identified as Marie Nováková (M1, M2) with the HARTMANN logo. The main navigation bar includes options for Přehled, Krevní tlak, EKG, Hmotnost, Teplota, Domácí test, and Nastavení. The EKG section is active, showing a table of measurements for the week of July 18, 2017, to July 24, 2017. The table lists two measurements on July 24, 2017, at 09:13 and 09:20, with results of 0 and 61 respectively. A summary card on the right shows an average pulse rate of 61. A notification at the bottom indicates that high values require a doctor visit.

Veroval®medi.connect

Marie Nováková
M1 M2
HARTMANN

Přehled Krevní tlak **EKG** Hmotnost Teplota Domácí test Nastavení

EKG

Týden Měsíc vybrat 18.07.2017 - 24.07.2017 Hledání

Datum	Čas	Výsledek měření	Pulz	Detail	Medikace/Poznámka
24.07.2017	09:13	●	0	>	
24.07.2017	09:20	●	61	>	

Průměr

Průměr
Pulz
61

● Při zvýšených hodnotách: Navštivte prosím v brzké době svého lékaře za účelem provedení dalších vyšetření.

Nyní můžete v horní části rejstříku „EKG“ uložená data vyhledat a zobrazit jako přehled,...

Veroval® medi.connect

Přehled

Krevní tlak

EKG

Hmotnost

Teplota



Domácí test

Nastavení

EKG

PDF

Týden Měsíc vybrat 18.07.2017  - 24.07.2017  Hledání

<input type="checkbox"/>	Datum	Čas		Výsledek měření	Pulz	Detail	Medikace/Poznámka
<input type="checkbox"/>	24.07.2017	09:13	●		0	>	
<input type="checkbox"/>	24.07.2017	09:20	●		61	>	

... nebo kliknutím na detailní zobrazení...



... zobrazit jako EKG křivku.

Veroval®

