

# Veroval®



# Veroval®



V tomto krátkém video návodu vám vysvětlíme, jak se můžete přes internet připojit k Veroval® Medi.connect softwaru...

# Veroval<sup>®</sup>



... a pohodlně a odkudkoliv tak prohlížet a spravovat vaše naměřené hodnoty.

# Veroval®



Produkty

Často kladené otázky

MEDI.CONNECT

Česká republika

Medi.connect Přihlášení

Kontakt



# Veroval®

KREVNÍ TLAK | EKG  
HMOTNOST | AKTIVITA  
DOMÁCÍ TESTY

Navštivte naše stránky [www.veroval.cz](http://www.veroval.cz) a klikněte...

# Veroval<sup>®</sup>



Produkty

Často kladené otázky

MEDI.CONNECT



... na MEDI.CONNECT nahoře v „Navigační liště“, ...

# Veroval®



## MEDI.CONNECT

Vaše základní životní funkce na jedno kliknutí



## KREVNÍ TLAK

Přesné, šetrné, snadné: nejnovější generace tlakoměrů



... nebo v „Přehledu“.

# Veroval®



Vaše základní životní funkce na jedno kliknutí



Login

Klikněte zde pro přihlášení k medi.connect



Stáhnout

Zde si můžete stáhnout software Veroval® medi.connect a uložit jej do svého počítače.

Nyní se zobrazí stránky Medi.connect.

# Veroval®

Vaše základní životní funkce na jedno kliknutí



Login

Klikněte zde pro přihlášení k medi.connect



Stáhnout

Zde si můžete stáhnout software Veroval® medi.connect a uložit jej do svého počítače.

(kompatibilní s Windows 7, 8 a 10 po dobu trvání oficiální podpory Microsoftu)

Klikněte na „Přihlášení“ ...



Přihlášení

E-mail


Heslo

[Zopakovat heslo?](#)

Ještě nejste do Veroval medi.connect přihlášení? Pak se prosím zaregistrujte zde: [Registrace](#)

Přihlášení ▶

... a zobrazí se stránka s přihlašovacími údaji.

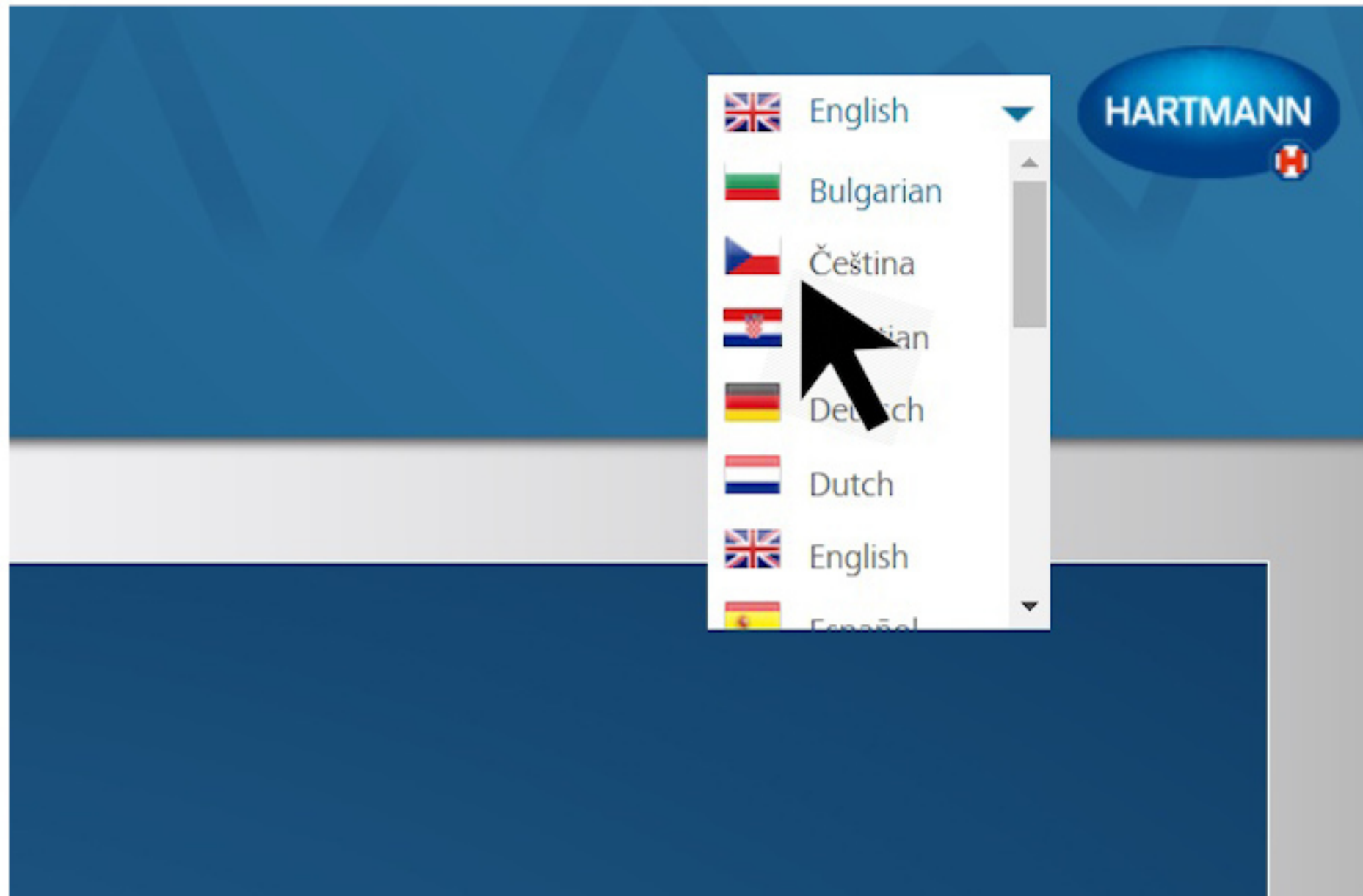

Vpravo nahoře vyberte vámi preferovaný jazyk.

Veroval®medi.connect

Čeština HARTMANN

Přihlášení


E-mail

Heslo

[Zopakovat heslo?](#)

[Přihlášení ▶](#)

Ještě nejste do Veroval medi.connect přihlášení? Pak se prosím zaregistrujte zde: [Registrace](#)

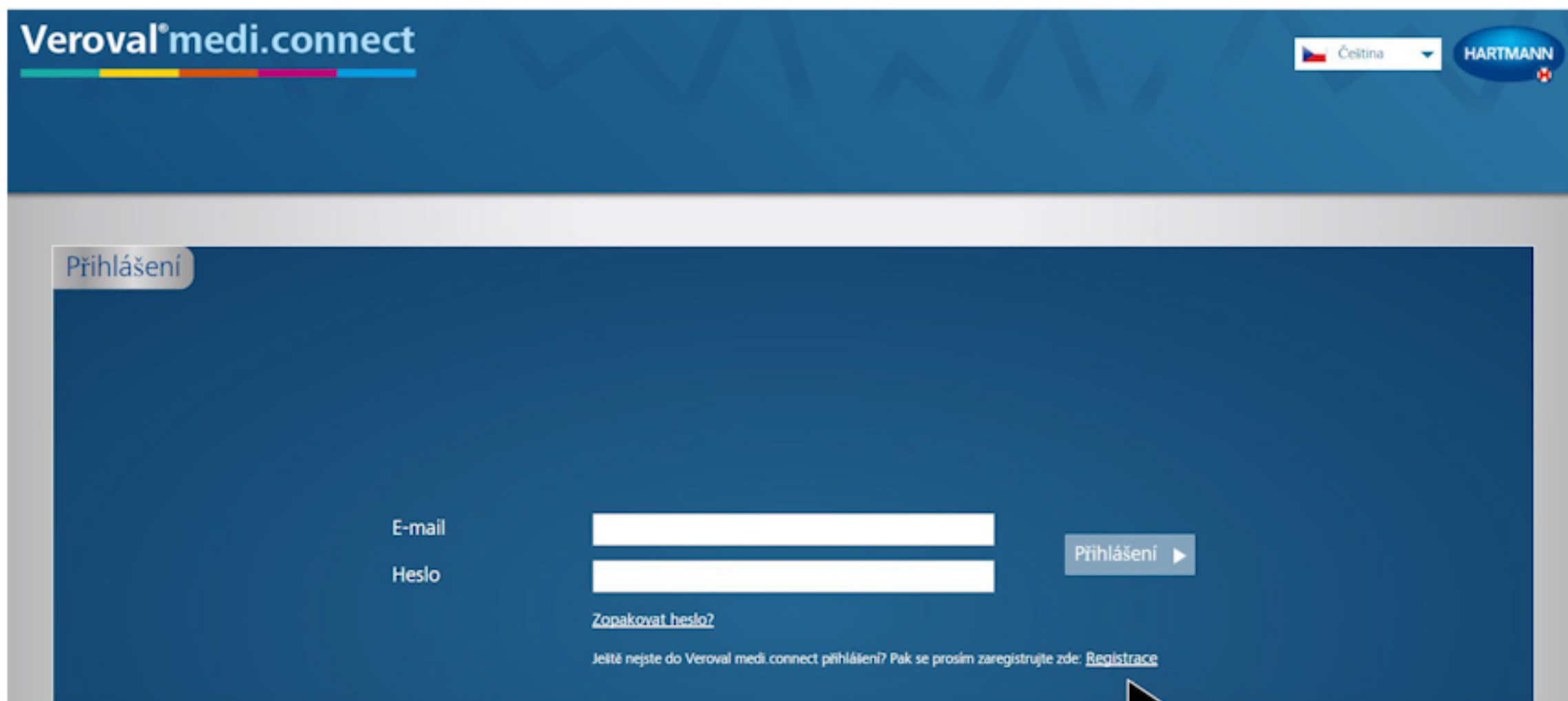

Dříve než budete moci Veroval® Medi.connect využívat,  
je potřeba se jednorázově registrovat.

Registrace

## Založit nový profil Veroval® medi.connect

Pro založení svého profilu vyplňte požadovaná data.

Pohlaví *	<input type="text" value="Muž"/>	E-mail *	<input type="text"/>
Křestní jméno *	<input type="text"/>	Heslo *	<input type="text"/>
Příjmení *	<input type="text"/>	Zopakovat heslo *	<input type="text"/>

- Chci být informován e-mailem o nových produktech a aktualizacích Veroval® medi.connect.
- [Přijímám Uživatelské podmínky](#)
- [Přijímám Ustanovení o ochraně osobních údajů](#)

Vyplňte, prosím, své údaje...

Registrace

Založit nový profil Veroval® medi.connect


Pro založení svého profilu vyplíte požadovaná data.


Pohlaví *	Žena	E-mail *	manovakov@seznam.cz
Křestní jméno *	Marie	Heslo *	.....
Příjmení *	Nováková	Zopakovat heslo *	.....

Chci být informován e-mailem o nových produktech a aktualizacích Veroval® medi.connect.

Přijímám Uživatelské podmínky

Přijímám Ustanovení o ochraně osobních údajů

 Registrace ▶



... a klikněte na „Registrace“.

Vaše data budou bezpečně uložena na serveru v Německu.

Registrace

Thank you for visiting us.  
Your registration details have been submitted successfully.  
You will receive an e-mail confirming your account soon.

Zpět

Následně obdržíte potvrzující e-mail.

# Veroval®

Ahoj Marie Nováková,

dekujeme za Váš zájem o naši aplikaci Veroval medi.connect.

Pro aktivaci uživatelského účtu klepnete na následující odkaz:

<https://veroval-mediconnect.info/Modules/Account/RegistrationCompletion.aspx?Id=43e98aff-ee2b-47cc-88a6-576ab269a1a4>

V případě dotazu nebo problému napište na e-mailovou adresu:

[info@hartmann.info](mailto:info@hartmann.info)



Respektujte prosím, že připojené odkazy budou platit pouze pet dní po zaslání tohoto e-mailu.

S pozdravem

Váš tým Hartmann

Klikněte na odkaz k potvrzení vaší registrace.

# Veroval®

Veroval® medi.connect

Výběr uživatele

HARTMANN

Přehled Krevní tlak EKG Hmotnost Teplota Domácí test Nastavení

Můj profil Systém Krevní tlak EKG Hmotnost Teplota Připomínky

Můj profil

Přidat uživatele

Pohlaví  Muž  Žena

Jméno

Příjmení

Datum narození  Věk (roky)

Heslo

Ulice

PSČ

Město

Výška  Centimetry

\* = povinné pole

Nová Uložit Storno Odstranit profil

Vyplňte ve vašem profilu vaše datum narození a výšku.



# Veroval®

The screenshot displays the Veroval®medi.connect web application interface. At the top, the user is identified as Marie Nováková. The navigation menu includes: Přehled, Krevní tlak, EKG, Hmotnost, Teplota, Domácí test, Aktivita, and Nastavení. Below the navigation, there are tabs for 'Poslední měření', 'Týden', and 'Měsíc'. The main content area is divided into six widgets:

- Krevní tlak:** A circular gauge showing 'Systola' and 'Diastola' values, with a 'Puls' indicator below.
- Hmotnost:** A circular gauge showing a weight value in 'kg' and 'BMI'.
- Teplota:** A circular gauge with a thermometer icon, showing temperature values for 'ráno', 'v poledne', and 'večer'.
- Domácí test:** A table with columns 'Test', 'Datum', 'Výsledek', and 'Přít test'. The table contains three rows of data.
- Aktivita:** A circular gauge showing a step count in 'kroků' and 'kcal'.
- EKG:** A placeholder for EKG data, currently displaying a red message: 'K dispozici nejsou žádné data.'

At the bottom of the page, there is a footer with links for 'Impressum', 'Kontakt', 'Všeobecné obchodní podmínky', 'Uživatelské podmínky', and 'Ustanovení o ochraně osobních údajů', along with the company name 'FALL HARTMANN AG'.

Nyní jste se úspěšně registrovali a můžete stránky s vašimi přihlašovacími údaji kdykoliv využít.

# Veroval®

The screenshot displays the Veroval®medi.connect web interface. At the top, the user is identified as Marie Nováková. The navigation menu includes: Přehled, Krevní tlak, EKG, Hmotnost, Teplota, Domácí test, Aktivita, and Nastavení. Below the menu, there are tabs for 'Poslední měření', 'Týden', and 'Měsíc'. The main content area features six widgets:

- Krevní tlak:** A circular gauge showing Systola, Diastola, and Pulz.
- Hmotnost:** A circular gauge showing kg and BMI.
- Teplota:** A circular gauge with a thermometer icon and three temperature buttons: ráno, v poledne, večer.
- Domácí test:** A table with columns: Test, Datum, Výsledek, and Přít. test.
- Aktivita:** A circular gauge showing Kcal and Kcal.
- EKG:** A red message: 'K dispozici nejsou žádné data.'

At the bottom, there is a footer with links: Impressum, Kontakt, Všeobecné obchodní podmínky, Uživatelé podmínky, and Ustanovení o ochraně osobních údajů, along with the text 'FALL HARTMANN AG'.

Můžete zároveň přenést vaše naměřené údaje z Medi.connect softwaru z vašeho počítače do webového rozhraní.

# Veroval®

**Veroval® medi.connect**

Marie Nováková

HARTMANN

Přehled Krevní tlak EKG Hmotnost Teplota Domácí test Nastavení

poslední měření poslední týden minulý měsíc

**Krevní tlak**

Systola Diastola  
Pulz

**Hmotnost**

Kg  
BMI

**Teplota**

ráno v poledne večer

**Domácí test**

Test	Datum	Výsledek	příští test
Cholesterol	-	-	-
Střevo	-	-	-
Žaludek	-	-	-


**EKG**

OK SLOW FAST ERROR  
PAUSE RHYTHM WAVE

Zobrazit podrobné vyhodnocení

K tomu si otevřete program medi.connect nainstalovaný ve vašem počítači,...

# Veroval®

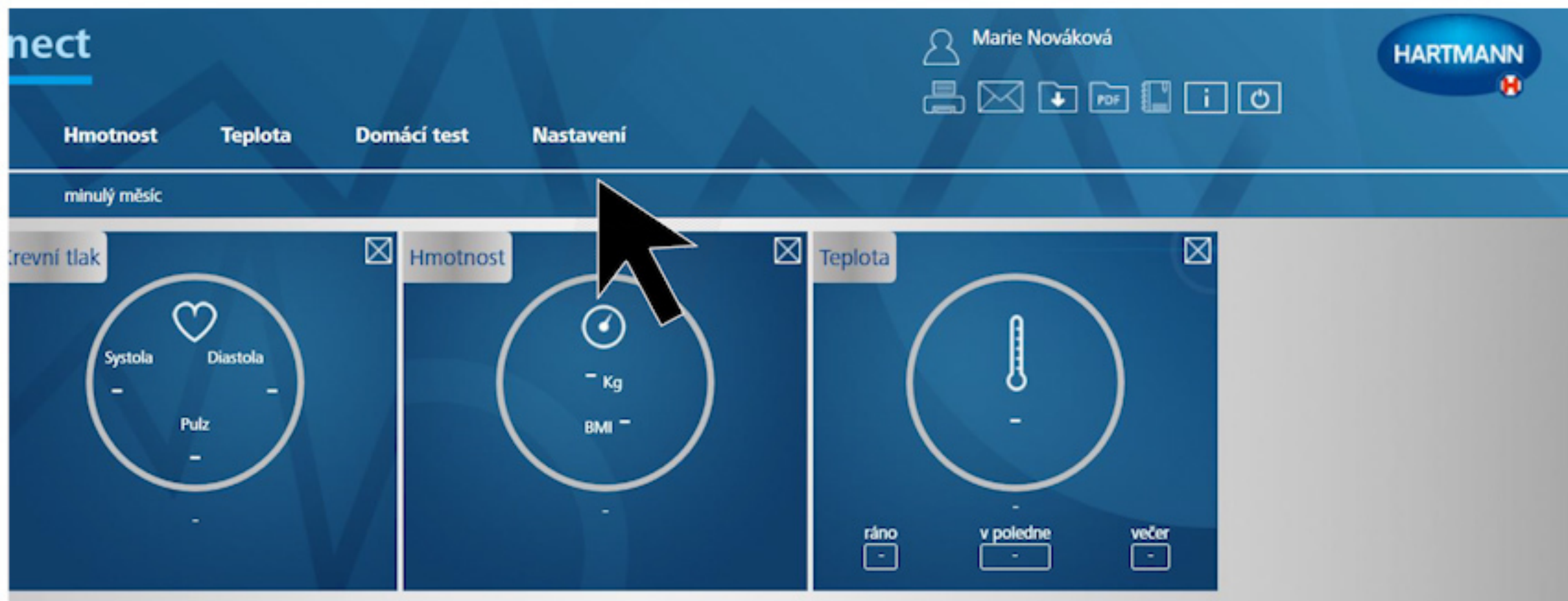

... přejděte nahoře do sekce „Nastavení“.

Veroval® medi.connect

Marie Nováková

HARTMANN

Přehled Krevní tlak EKG Hmotnost Teplota Domácí test **Nastavení**

Můj profil System Krevní tlak EKG Hmotnost Teplota Připomínky

Můj profil

Pohlaví  Muž  Žena

Ulice

Jméno Marie

PSC

Příjmení Nováková

Město

Datum narození 12.06.1964  Věk (roky) 53

výška 165 Centimetry

Heslo Ochrana heslem není nastavena

\* = povinné pole

Nová Uložit Storno Odstranit profil Přihlásit se do portálu Veroval® medi.connect

Na stránce nastavení klikněte...


# Veroval®

-----


**Datum narození** \* 12.06.1964  **Věk (roky)** 53 **Výška** \* 165 Centimetry

**Heslo** Ochrana heslem není nastavena

\* = povinné pole

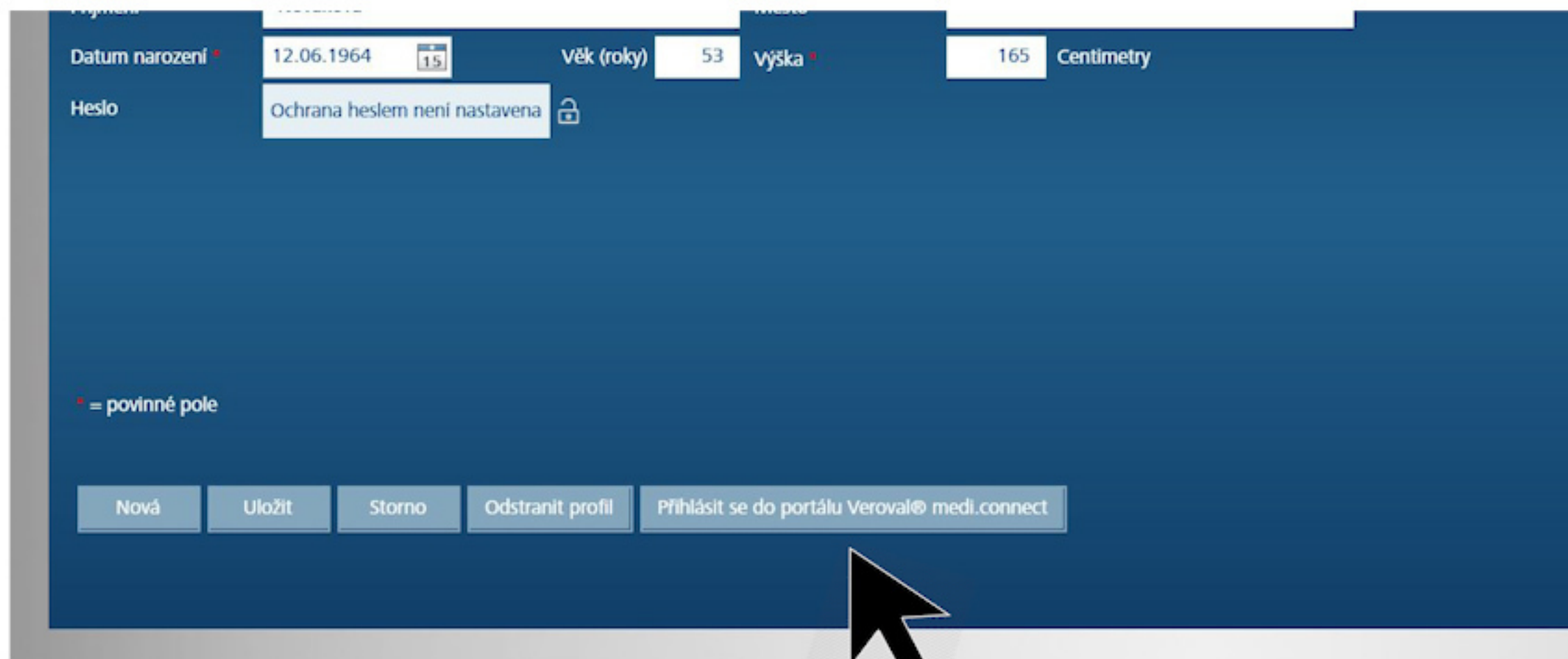

... vpravo dole na „Přihlásit se do portálu Veroval® Medi.connect“

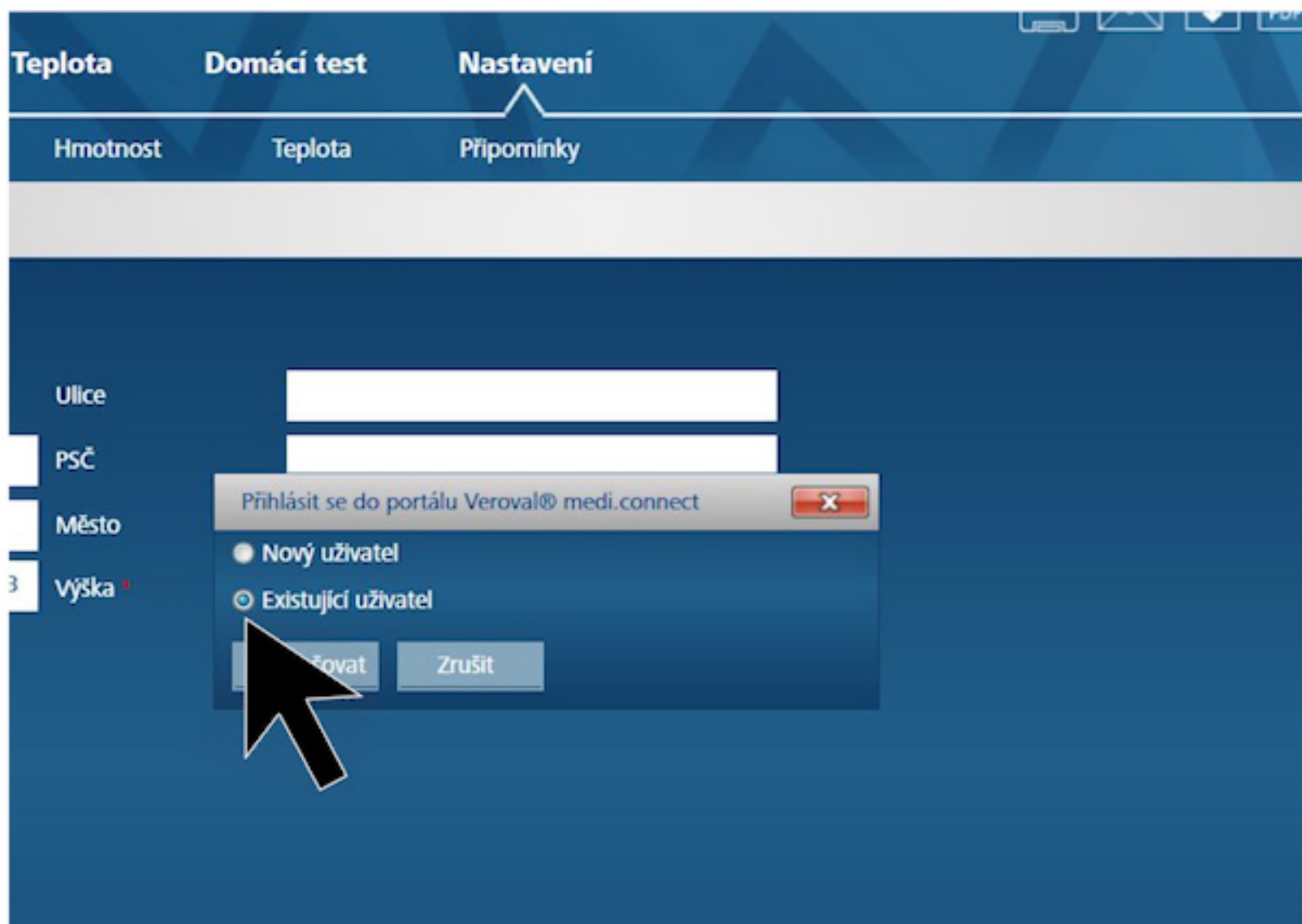

V novém okně zvolte „Existující uživatel“ (pokud jste se již na webu registrovali) a klikněte na „Pokračovat“.

E-mail \*

Heslo \*

\* = povinné pole

Nyní zadejte vaši registrovanou e-mailovou adresu a heslo a klikněte na uložit.



Veroval® medi.connect

Marie Nováková

HARTMANN

Přehled Krevní tlak EKG Hmotnost Teplota Domácí test **Nastavení**

Můj profil Systém Krevní tlak EKG Hmotnost Teplota Připomínky

Můj profil

Pohlaví  Muž  Žena

Ulice Josefská 2

Jméno Marie

PSČ 61600

Příjmení Nováková

Město Brno

Datum narození 23.11.1979  Věk (roky) 37

Výška 165 Centimetry


Heslo Ochrana heslem není nastavena

Synchronizace spuštěna - vyčkejte, prosím ...

\* = povinné pole

Nová Uložit Storno Odstranit profil Spustit synchronizaci

Data z programu a z webového rozhraní se synchronizují,...

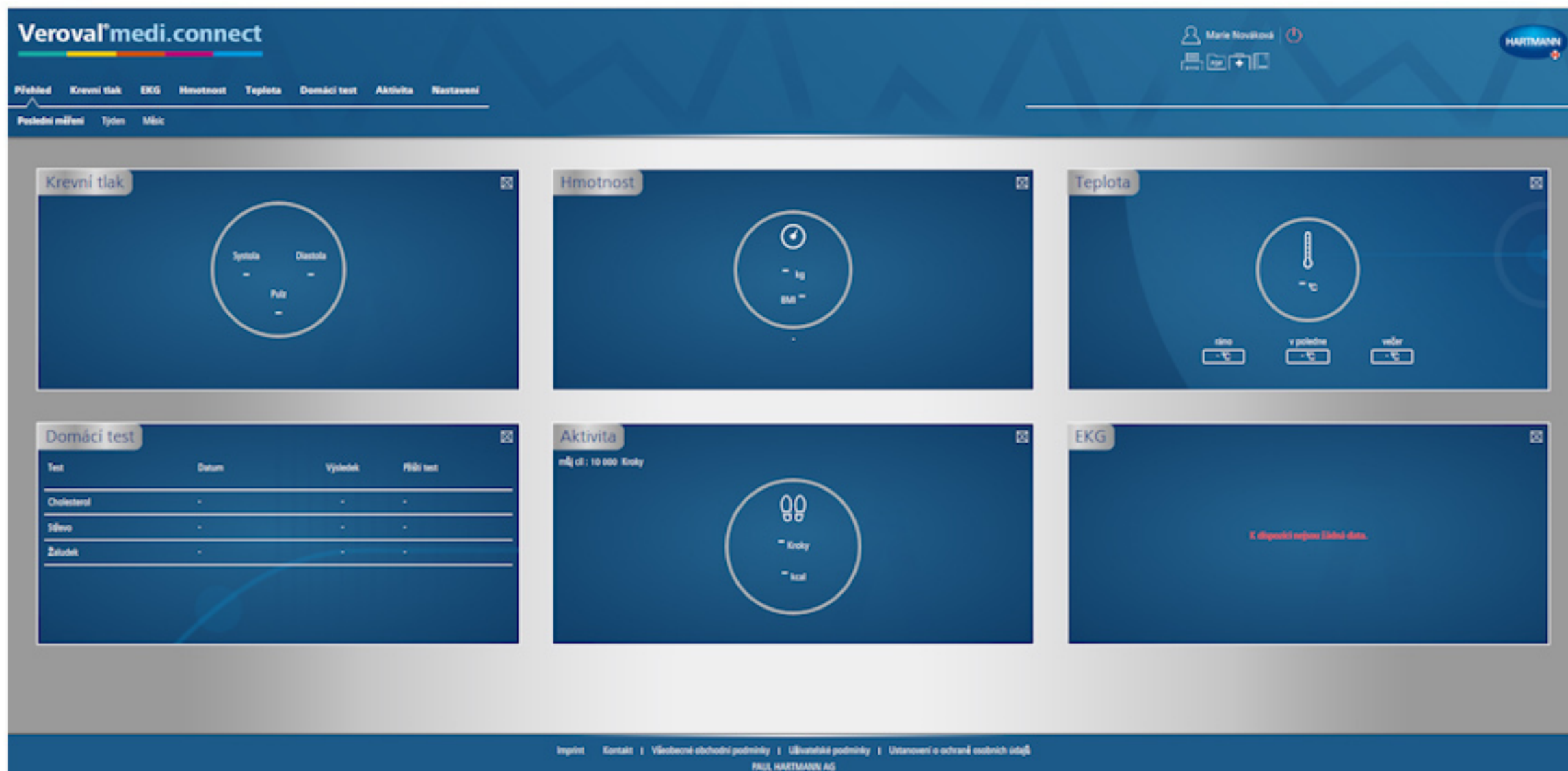

... abyste při příštím přihlášení do webového rozhraní měli přístup k aktuálním údajům přenesených z vašeho zařízení.

# Veroval<sup>®</sup>

