

Gravidez

Teste de deteção precoce com indicador de semanas

Grávida ou não?

Seguramente pretende uma resposta rápida e fiável a esta importante questão. Se a resposta for «Sim», de certeza que também deseja saber de quantas semanas está grávida.

Tomar conhecimento da situação: Teste de deteção precoce de gravidez e indicador de semanas num só

Com o teste de deteção precoce de gravidez com indicador de semanas, poderá saber se está grávida a partir do 10.º dia após a fecundação - portanto, mesmo antes do atraso menstrual. E se sim, de quantas semanas. O teste de deteção precoce de gravidez informa-a se está grávida logo que exista uma concentração de hCG de 12 UI/l (Unidades Internacionais por litro) na urina. No caso de um resultado positivo, deve consultar o seu médico ginecologista.

Qual a fiabilidade do teste Veroval®?

O teste de gravidez de deteção precoce com indicador de semanas foi desenvolvido com a finalidade de disponibilizar a precisão e fiabilidade dos diagnósticos modernos, para uso doméstico. Baseia-se na deteção imunológica da hormona da gravidez hCG (gonadotropina coriónica humana) e está em conformidade com a investigação científica moderna. **Estudos de avaliação de desempenho confirmam uma precisão superior a 99%.**

Dados de desempenho:

Para este teste foi calculado, num estudo clínico com 43 voluntários, entre os quais mulheres com valores hCG criticamente baixos, assim como mulheres com suspeita de gravidez, uma precisão e especificidade superior a 99%. Os valores de referência derivam de especificações hCG por meio de equipamentos de análise hormonal.

A realização do teste é complicada?

Não: Necessitará apenas de um relógio com indicação de segundos e – se preferir o método do copo – um recipiente limpo. O procedimento exato para realização do teste é descrito no verso.

Informação importante:

No caso de uma concentração de hCG muito baixa – p. ex., no caso de o teste ser efetuado demasiado cedo ou com urina muito diluída – o teste pode apresentar um resultado negativo apesar da existência de uma gravidez. Inversamente, mesmo com um resultado positivo é possível abortar espontaneamente o que é bastante frequente nas primeiras quatro semanas. Caso não tenha a certeza, consulte sempre o seu médico ginecologista e/ou repita o teste de deteção precoce.

5 min



Precisão
> 99 %



O que devo ter em atenção?

Armazenamento:

- Conserve o teste de deteção precoce e todos os componentes entre 4 °C e 30 °C.

Prazo de validade:

- Com a conservação acima indicada, ver prazo de validade no invólucro de alumínio do dispositivo de teste e na embalagem exterior.

Precisão:

- A precisão é superior a 99%.

Utilização:

- Retire o dispositivo de teste do invólucro de alumínio imediatamente antes de efetuar o teste.
- **Recomenda-se que efetue o teste de manhã, uma vez que a concentração de hCG é mais elevada na urina da manhã.**
- Não utilizar caso o invólucro de alumínio tiver sido aberto ou o dispositivo de teste se encontrar danificado.

Eliminação:

- Todos os componentes podem ser eliminados juntamente com a embalagem no lixo doméstico.
- A saqueta desidratante contida no interior do invólucro de alumínio pode ser eliminada.



Consulte o folheto informativo!

Manter o teste fora do alcance das crianças.

Não utilizar o teste após o prazo de validade.

Conservar os componentes do teste entre 4 °C e 30 °C.



Utilizar cada dispositivo de teste apenas uma vez.

Não desmontar o dispositivo de teste.

Teste apenas para uso externo.

Produto para diagnóstico in vitro




CARE diagnostica Produktions- und
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Römerstraße 8
AT-2513 Möllersdorf

Distribuidor: PT – PAUL HARTMANN LDA
2685-378 Prior Velho
info@pt.hartmann.info

Gravidez

Teste de deteção precoce com indicador de semanas. Como se faz:

1

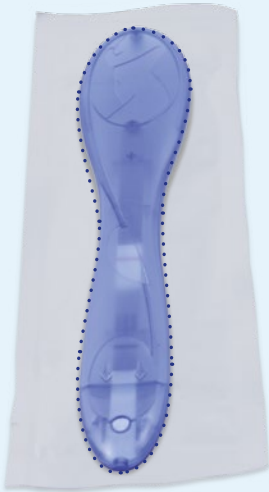

Conteúdo:

- 1 embalagem com invólucro de alumínio com um dispositivo de teste
- 1 folheto informativo

Existem dois métodos de execução:

3A



Abertura para a amostra de urina

Método direto:

- Mantenha o dispositivo de teste durante cerca de 3 segundos diretamente sob a urina.

3B



Profundidade máx. de imersão

Método do copo:

- Execute a colheita de urina e mergulhe o dispositivo de teste até à profundidade máxima de imersão durante cerca de 3 segundos.


2

- Retire o dispositivo de teste do invólucro de alumínio (guardar a embalagem).

4

- Coloque o dispositivo de teste sobre o invólucro de alumínio e não o mova.
- **Após exatamente 5 minutos poderá efetuar a leitura do resultado. Se efetuar a leitura posteriormente, a determinação da semana não poderá ser avaliada com segurança.**

Não grávida

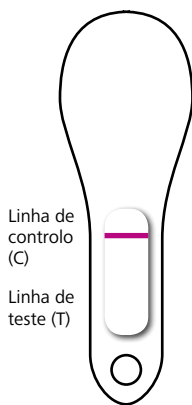


Se surgir apenas uma linha violeta (linha de controlo) na área superior do campo de resultado, o teste foi efetuado corretamente mas não foi detetada hCG. Não existe gravidez.

Se o período menstrual não surgir após uma semana de atraso, recomenda-se que consulte o seu médico. Em caso de falha do período, evite potenciais riscos como radiografias ou abuso de álcool.

Grávida

Se surgirem duas linhas violetas no campo de resultado, comprovou-se a existência de hCG na urina. A gravidez confirma-se, mesmo que a linha inferior (T) seja muito tênue. Para a avaliação da semana de gravidez, faça o resultado corresponder a uma imagem. A semana de gravidez é calculada mediante o primeiro dia do seu último período menstrual.

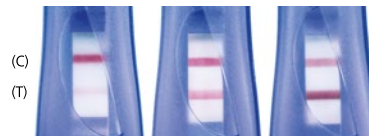

Semana após a fecundação	1-2	2-3	3+
Semana de gravidez	3-4	4-5	5+

Uma linha de teste fraca pode ser indicativa de início de uma gravidez ou de uma fraca implantação do embrião. É muito importante tomar precauções, de forma a prevenir o nascimento prematuro. Consulte imediatamente o seu médico para assegurar a sua saúde e a do seu bebé. Evite possíveis riscos para o embrião (p. ex: radiografias).

Resultado inválido



O teste é considerado inválido se, após 5-10 minutos, não surgir uma linha violeta no campo de resultado ou se surgir apenas a linha de teste.

Medicamentos ou doenças (p. ex., doenças trofoblásticas) podem influenciar os seus níveis de hCG e distorcer o resultado. A pílula contraceptiva não influencia o teste.

Informação importante:

Após 20 minutos deixa de ser possível avaliar com precisão se está grávida. O facto de a embalagem se encontrar danificada, a conservação errada ou um erro na utilização (p. ex., quantidade insuficiente de urina), podem causar resultados inválidos. Neste caso, conserve todos os materiais do teste e entre em contacto conosco: info@pt.hartmann.info