


# Veroval®




# Veroval®

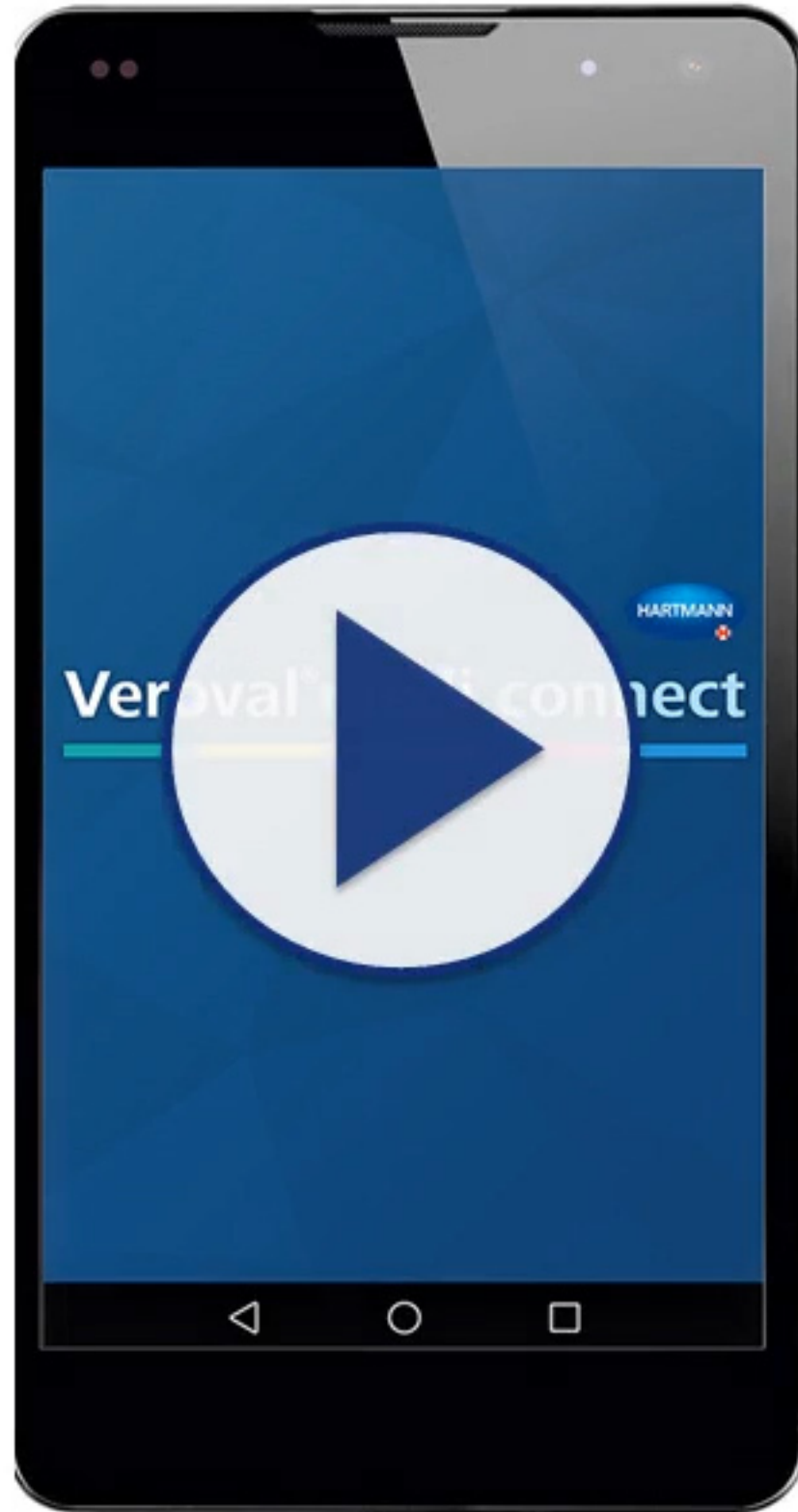


V tomto krátkom videonávode vám vysvetlíme,  
ako prenesiete údaje z vášho náramku...

# Veroval®

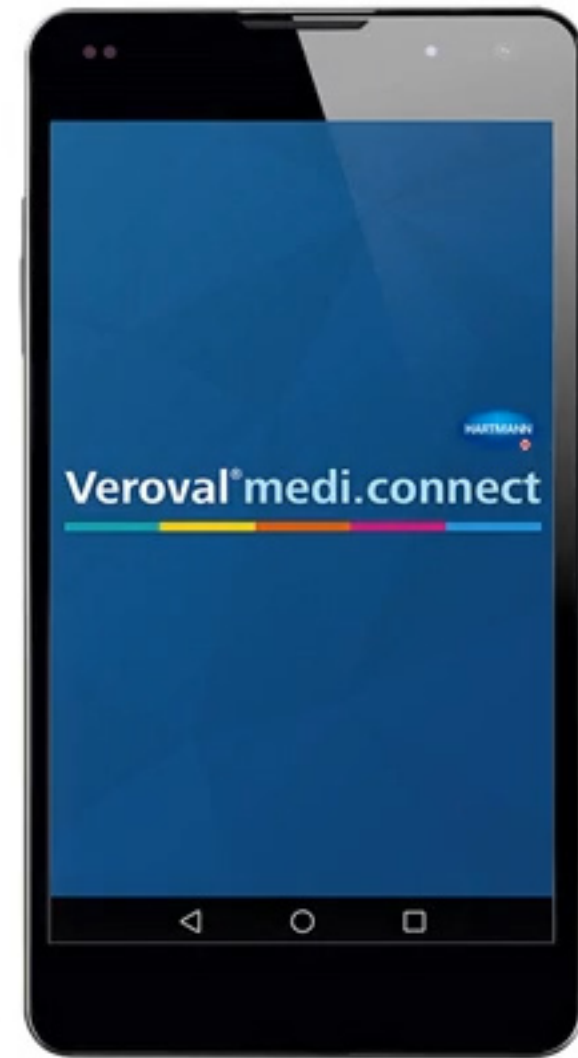


... do aplikácie Veroval® Medi.connect.


# Veroval®

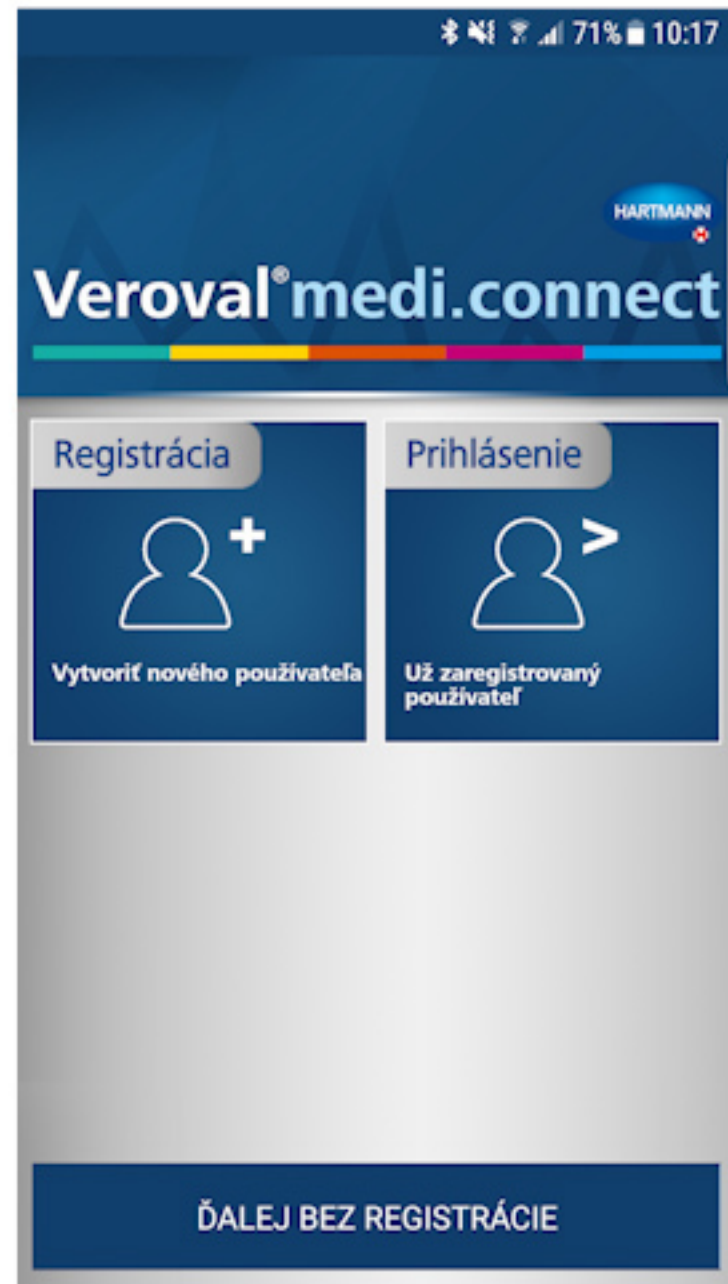


Otvorte Veroval® Medi.connect vo vašom telefóne.

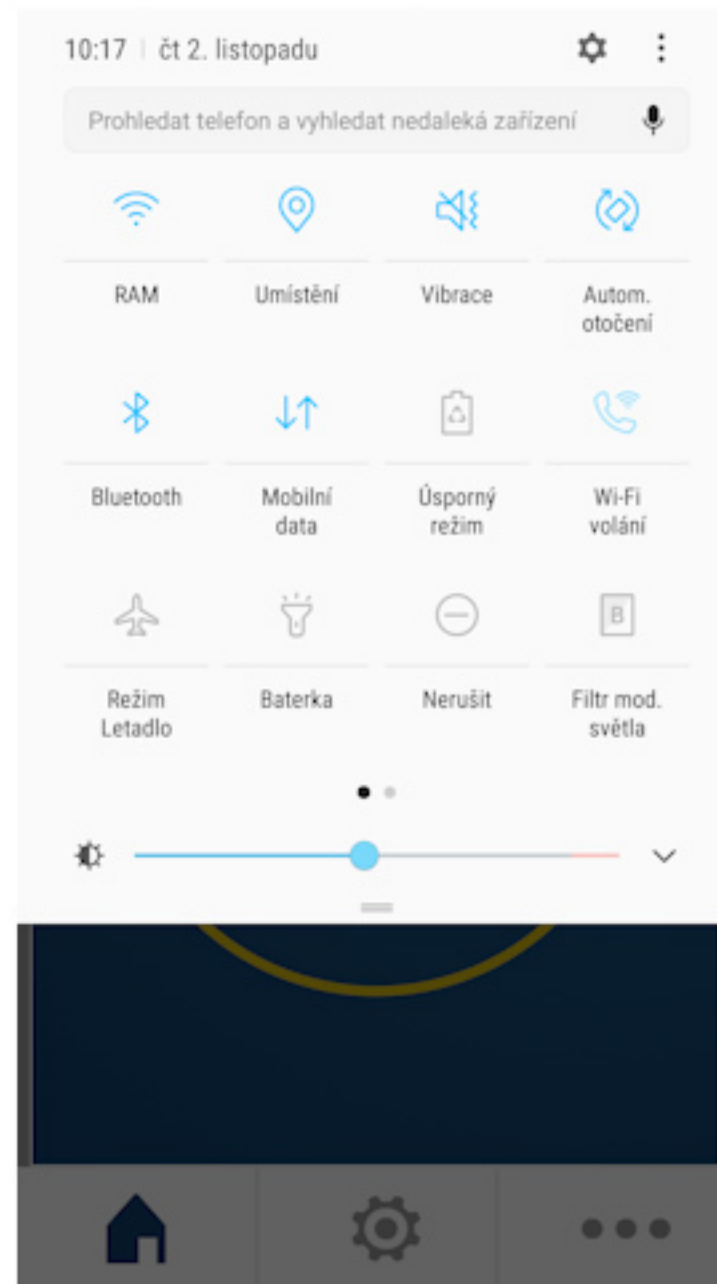


Uistite sa, že je na vašom telefóne aktívny bluetooth.

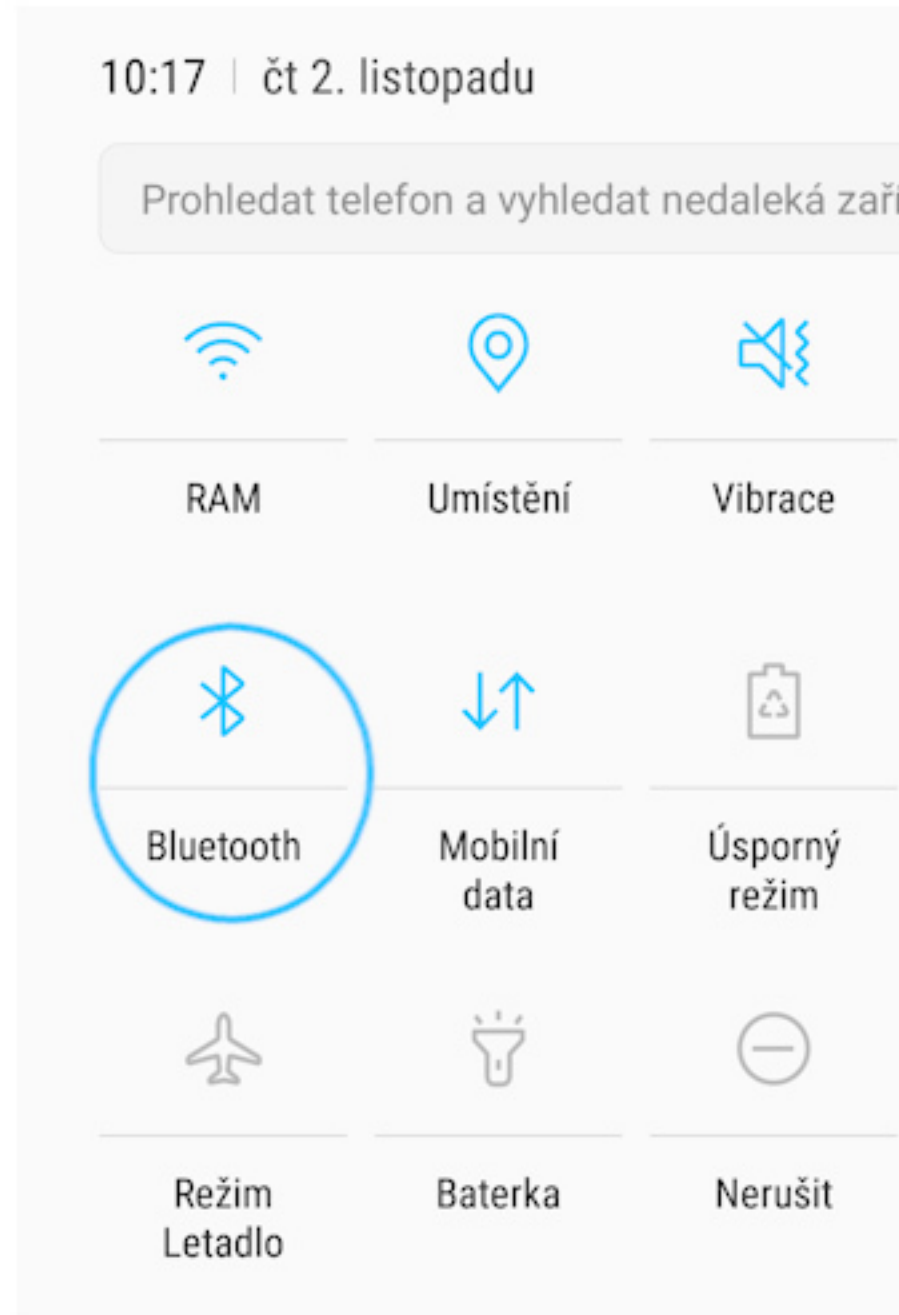

Uistite sa, že je na vašom telefóne aktívny bluetooth.

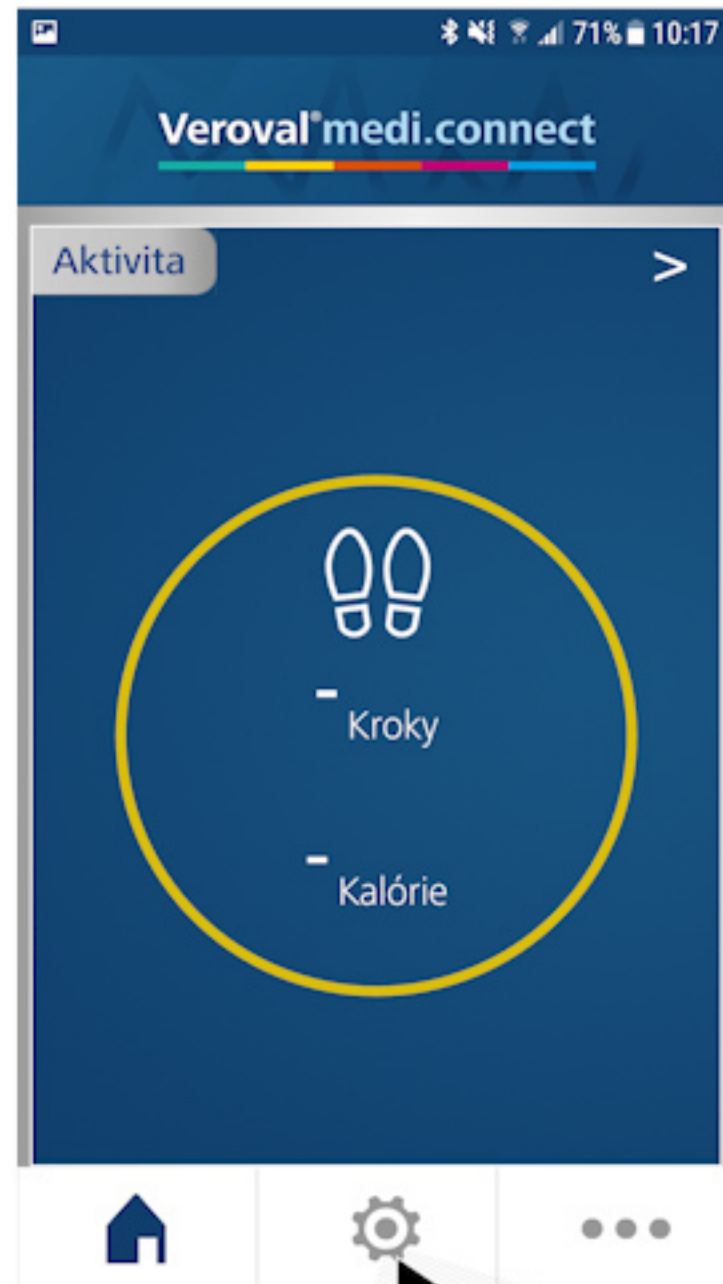


Teraz zvolte ikonu „Nastavenie“ umiestnenú dole uprostred.

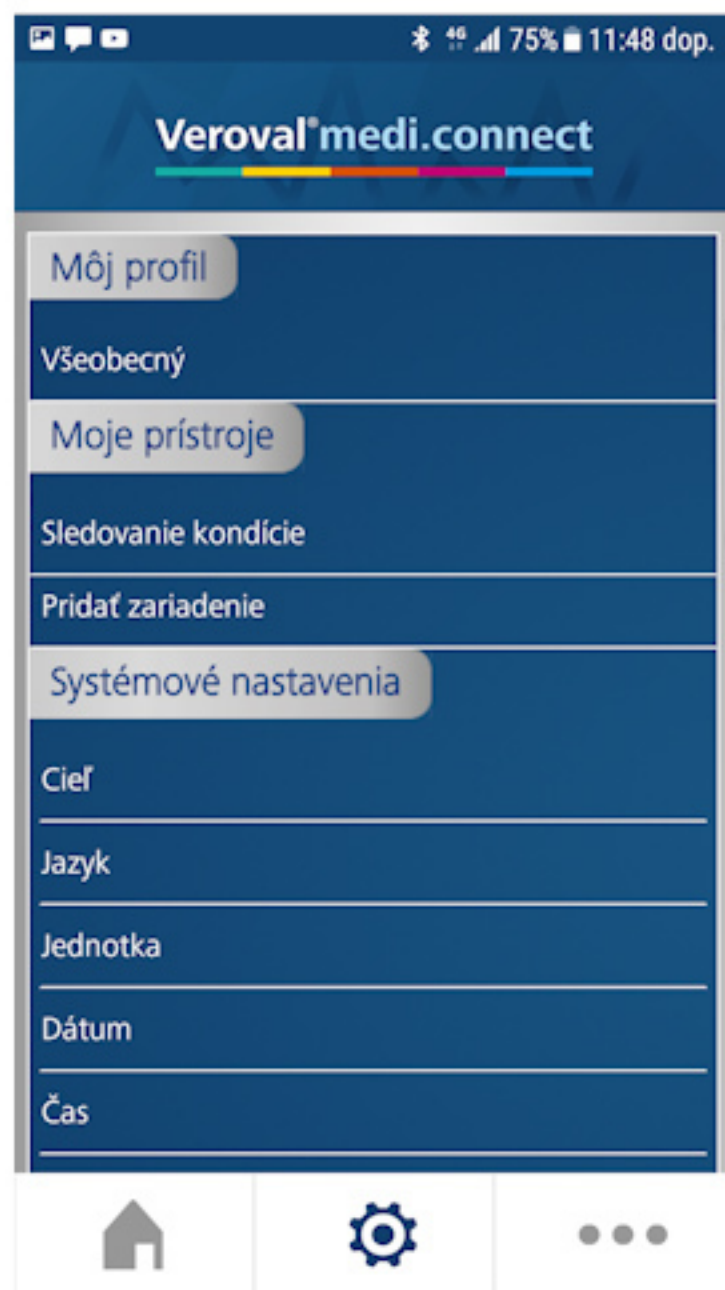

V bode „Moje prístroje“ zvolte možnosť „Pridať zariadenie“ a pridajte svoj náramok.




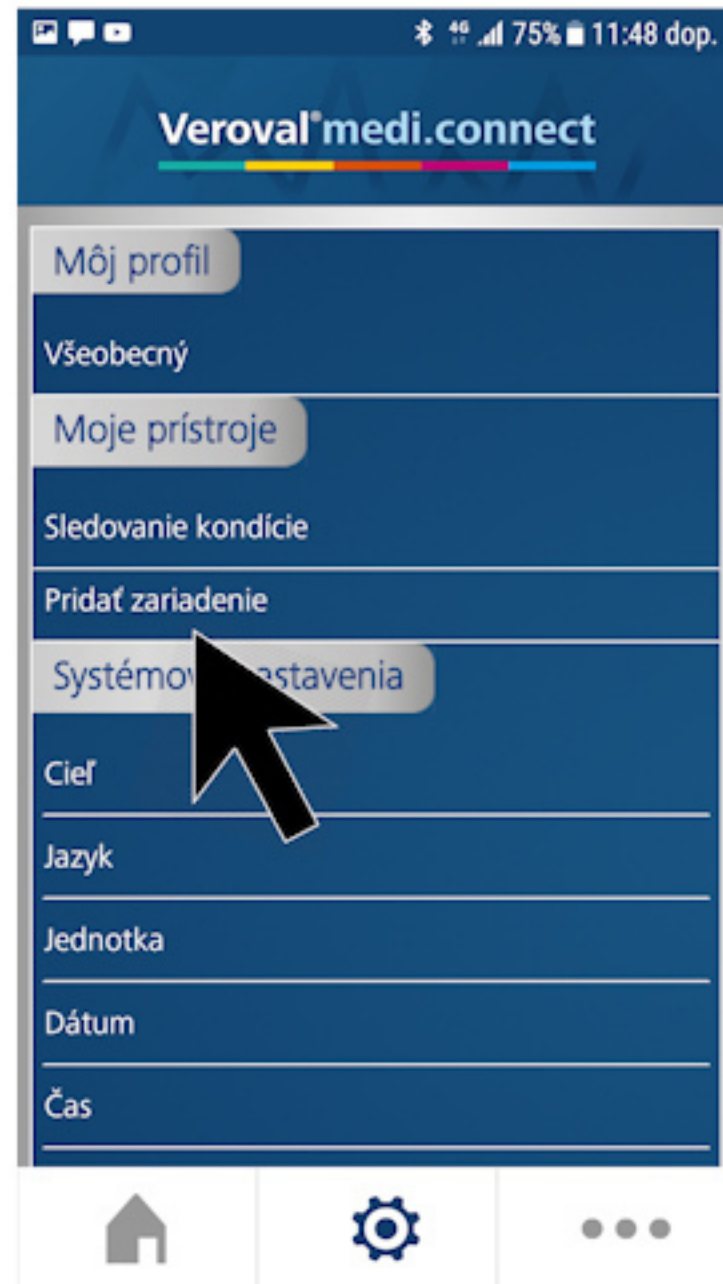

Tento krok stačí vykonať iba raz.




V zložke „Výber prístrojov“ prejdite na „Activity“,...

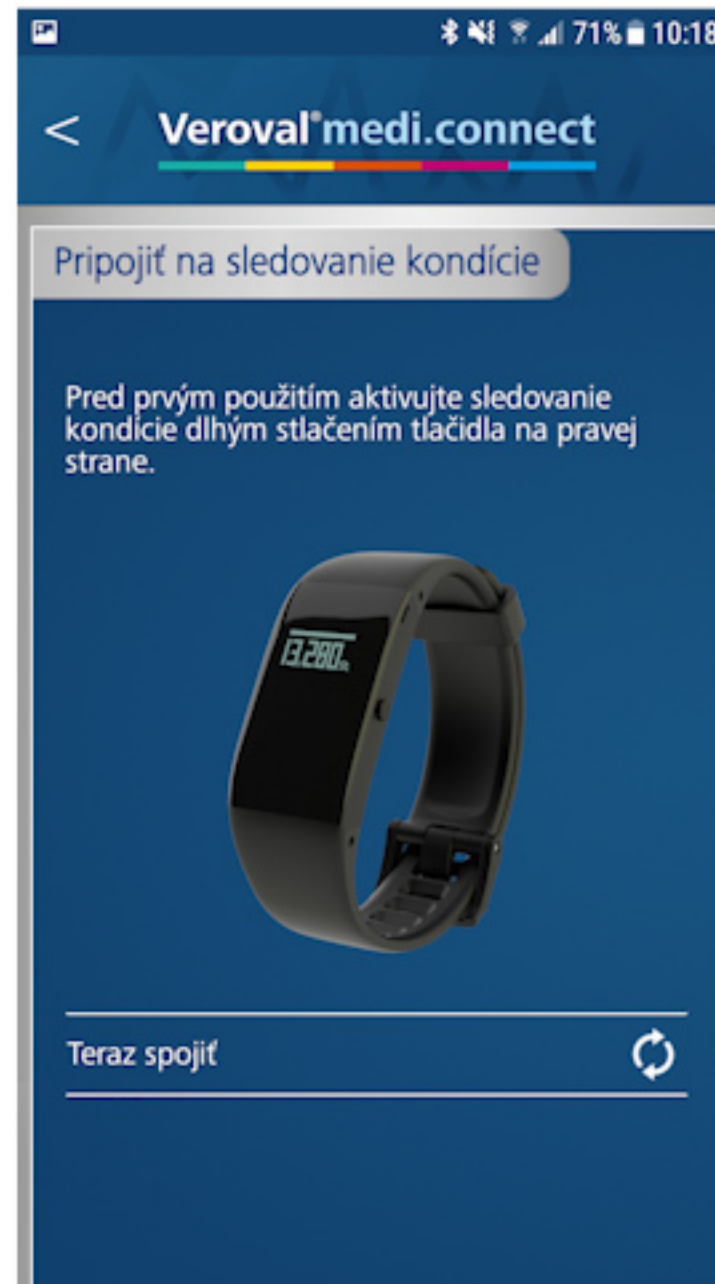


... kde sa objaví stránka „Pripojiť na sledovanie kondície“.

# Veroval<sup>®</sup>

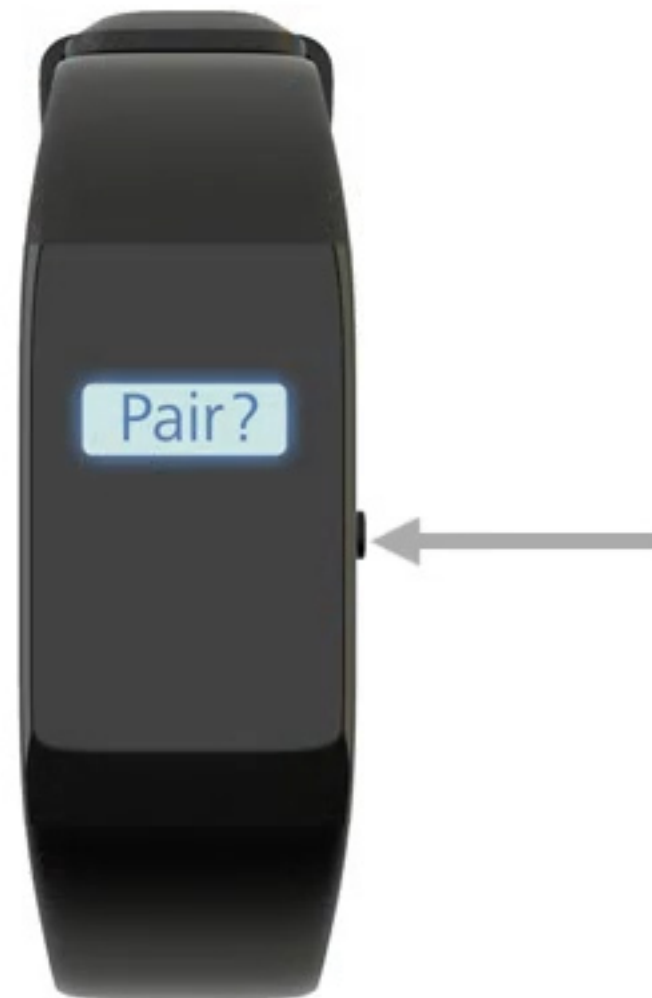

Stlačte tlačidlo v režime denného času na tak dlho, až sa objaví na obrazovke možnosť „Pair?“.

# Veroval<sup>®</sup>

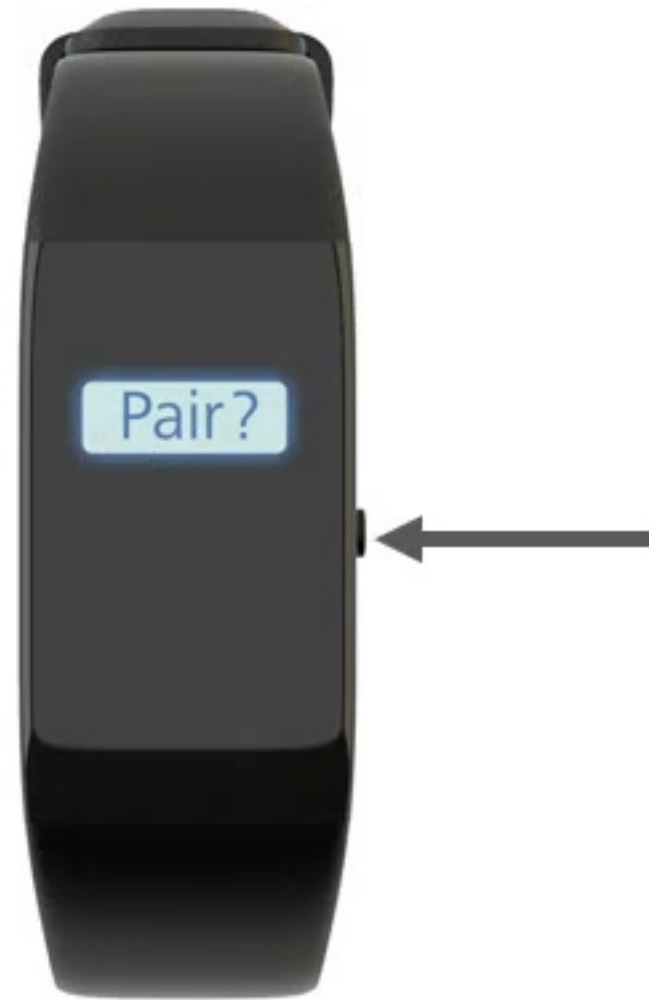

Opätovným stlačením potvrdte.


# Veroval<sup>®</sup>



Na obrazovke sa počas nadväzovania spojenia objaví blikajúci nápis „Pairing“.



Potom stlačte „Teraz spojiť“ a tým začne vyhľadávanie náramku.

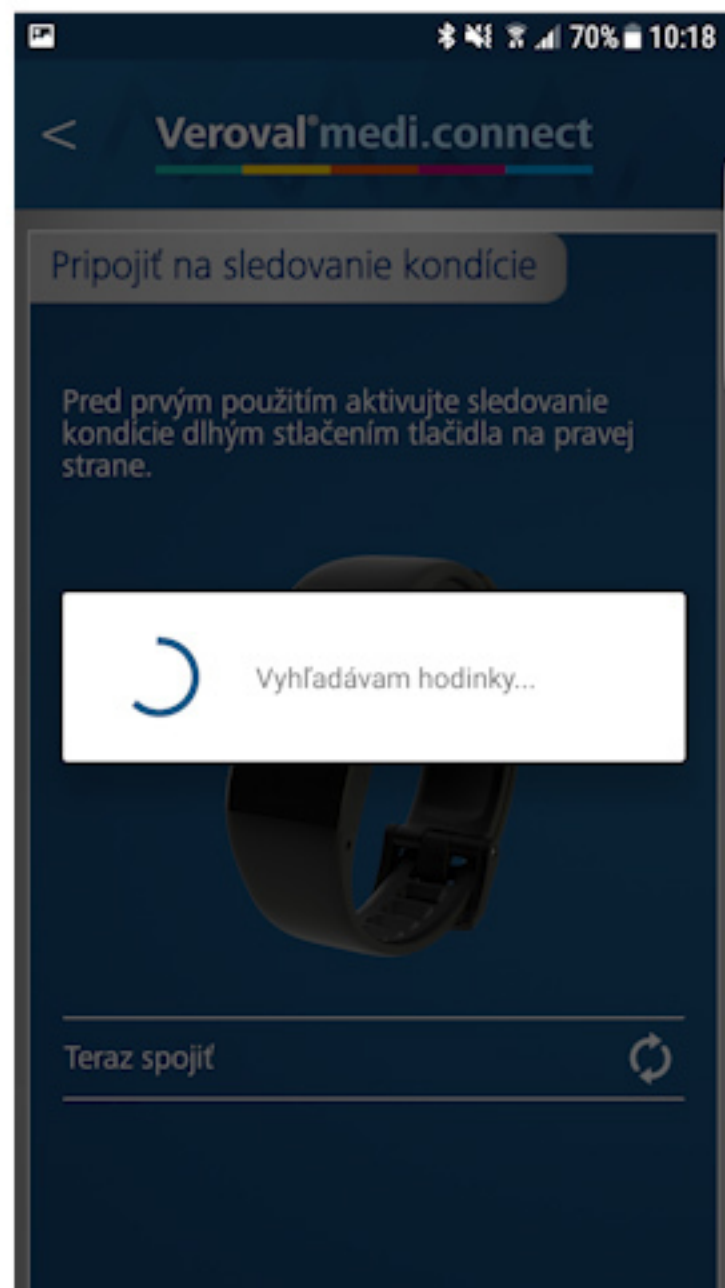

Potom stlačte „Teraz spojiť“ a tým začne vyhľadávanie náramku.



# Veroval<sup>®</sup>



Ak sa spojenie nevytvorí do 30 sekúnd,  
na obrazovke sa objaví „X“...

# Veroval<sup>®</sup>



... a náramok sa prepne do pohotovostného režimu.

# Veroval<sup>®</sup>




V tomto prípade zopakujte pripojenie znovu.


# Veroval<sup>®</sup>




Ak je spojenie úspešné, objaví sa na obrazovke symbol ✓ .

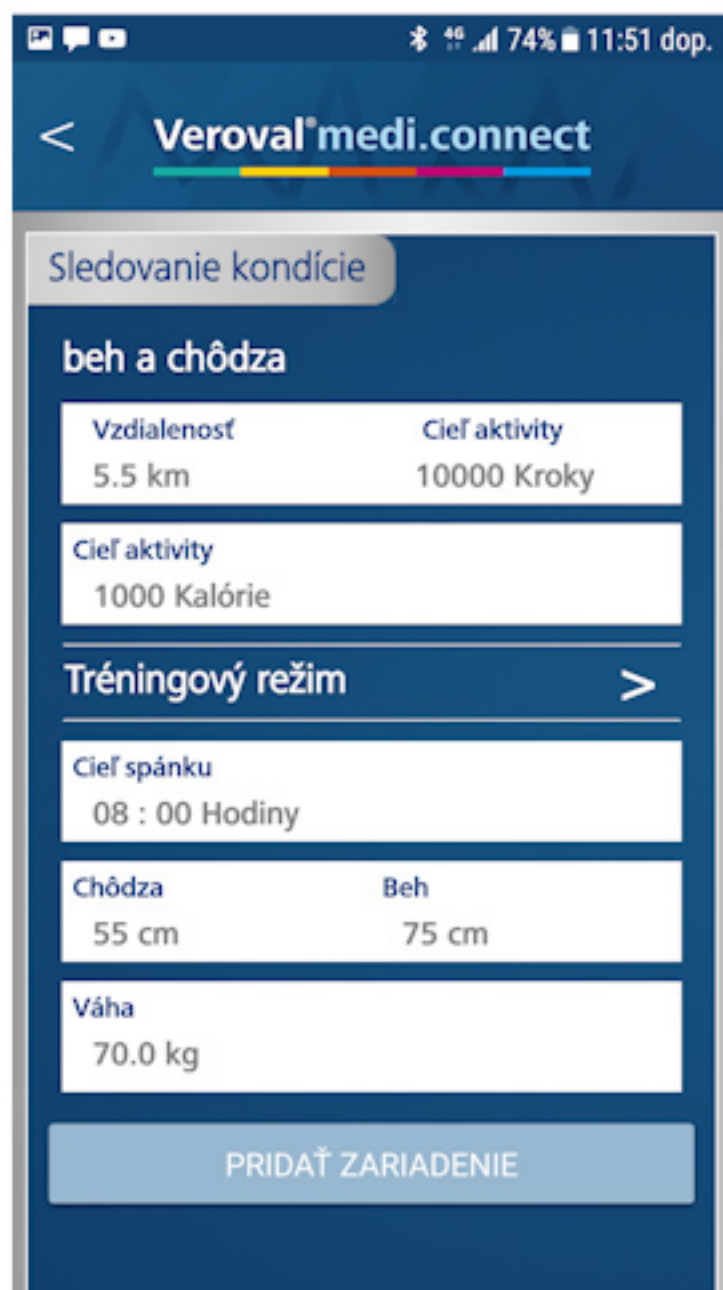

Teraz môžete zadať osobné ciele a údaje, ktoré synchronizujete...

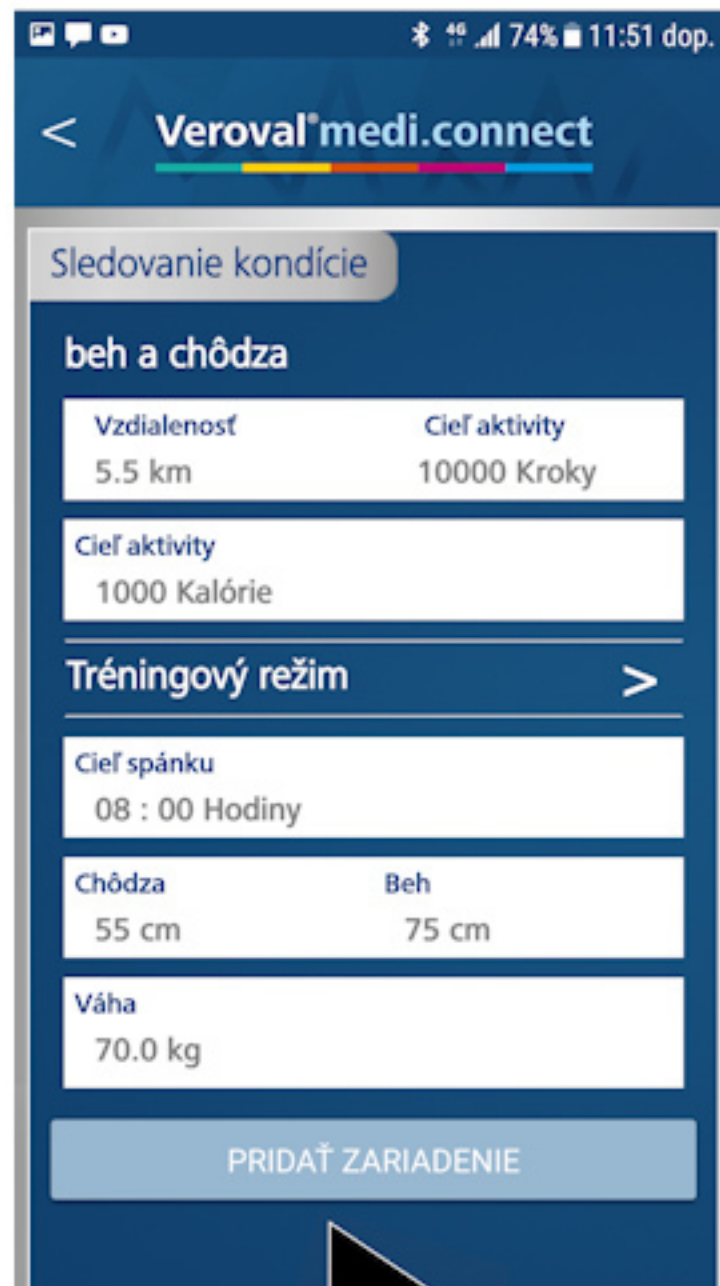


... s náramkom kliknutím na voľbu „Pridať zariadenie“.

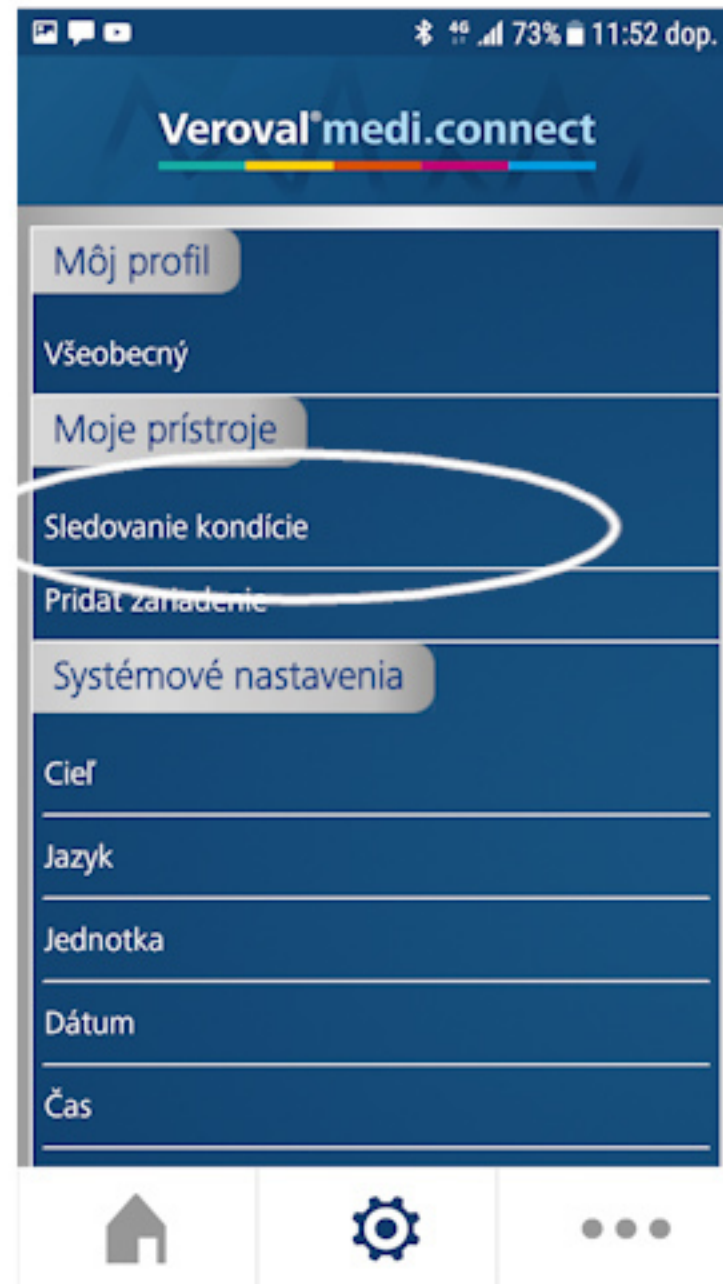

Váš náramok nájdete na stránke „Nastavenie“...

# Veroval®

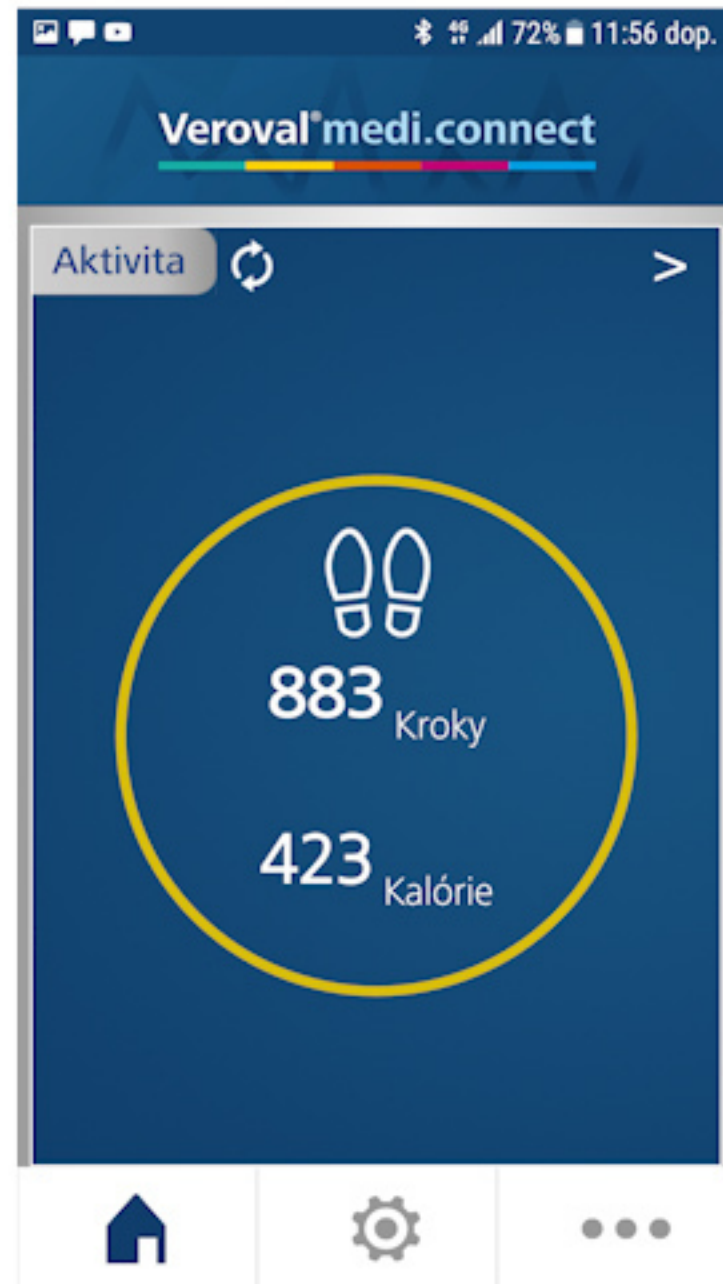

... a vaše hodnoty sú v aplikácii na zobrazenie.



# Veroval®

