

Droghe

Multi-test rapido per determinare
6 diverse droghe

5 min



Sensibilità
> 96%



Droghe – Sostanze stupefacenti con effetti collaterali

Le droghe sono sostanze psicoattive che influenzano il comportamento e lo stato d'animo dei consumatori. Con il consumo di una o più droghe tuttavia si va incontro a pericoli significativi. Nel lungo termine si riscontrano problemi fisici nonché disturbi psicosociali in seguito a un'eventuale assuefazione.

È bene verificare le droghe assunte: test rapido multi-droghe

Con il test rapido multi-droghe è possibile rilevare sulla base di un campione di urina, in modo rapido e sicuro, tracce di **anfetamine, benzodiazepine (tranquillanti), cocaina, marijuana (THC), metadone nonché oppiacei**. Il test indica quali droghe sono state usate.

Quanto è affidabile il test Veroval®?

Il test rapido multi-droghe è stato realizzato allo scopo di rendere disponibile anche per uso domestico la precisione e la sicurezza della moderna diagnostica. Il test è una procedura di analisi immunocromatografica in grado di determinare le droghe o i loro prodotti di degradazione nell'urina. **La sensibilità misurata da uno studio di valutazione delle prestazioni del prodotto risulta superiore al 96%.**

L'esecuzione del test è difficile?

No: basta lavarsi le mani, avere un orologio, un bicchiere e la superficie piana di un tavolo. La corretta procedura di esecuzione del test è descritta sul retro di questo foglio.

Dati di prestazione:

Il test rapido multi-droghe può rilevare contemporaneamente le seguenti classi di sostanze. Viene utilizzato un agente per calibrare ogni sostanza; la soglia di sensibilità (cut-off) è indicata a seguire:

Test	Abbreviazione	Calibratore	Cut-off (ng/ml)	Rilevabilità nell'urina dall'ultima assunzione ¹
Anfetamina	AMP	D-anfetamina	1.000	Da 1 a 3 giorni
Benzodiazepina	BZO	Oxazepam	300	Assunzione occasionale: fino a 3 giorni Assunzione regolare: fino a 6 settimane
Cocaina	COC	Benzoilecgonina	300	La cocaina è rilevabile solo per alcune ore, il prodotto di degradazione da 2 a 3 giorni
Marijuana	THC	11-nor-Δ9-THC-9 COOH	50	Assunzione occasionale: da 2 a 4 giorni Assunzione continua: da 2 a 6 settimane
Metadone	MET	Metadone	300	Da 2 a 3 giorni
Oppiaceo	OPI	Morfina	300	Fino a 8 ore

Il test rapido multi-droghe rileva, oltre alle sostanze calibrate, anche altri derivati simili o metaboliti.

¹ Si prega di notare che si tratta di dati di riferimento approssimativi. La rilevabilità delle droghe nell'urina è influenzata da molti singoli fattori.

Avvertenza importante:

Risultati positivi e poco chiari devono essere confermati con un ulteriore metodo analitico.

² **Falso positivo** = viene erroneamente visualizzato un risultato positivo, anche se il test è in effetti negativo.

www.veroval.ch
www.veroval.it

Materiali

- 1 Confezione di alluminio con strisce multi-test a cassetta e agente essiccante
- 1 Istruzioni per l'uso

Legenda dei simboli

 Attenersi alle istruzioni per l'uso	 Conservare in luogo asciutto a una temperatura compresa tra +4 °C e +30 °C.	 Scadenza (vedere la scritta sulla confezione)
 Contenuto sufficiente per 1 test		 Non riutilizzare
 Produttore		 Codice di lotto (vedere la scritta sulla confezione)
 Tempo di reazione nella striscia multi-test		 Self-test rapido

NanoRepro AG
Untergasse 8
D-35037 Marburg


Distribuito da:
CH – IVF HARTMANN AG
8212 Neuhausen
office@ivf.hartmann.info
IT – PAUL HARTMANN S.p.A.
37139 Verona
info@it.hartmann.info

Droghe

Test rapido multi-droghe per l'autodiagnosi

Ecco come funziona:

1

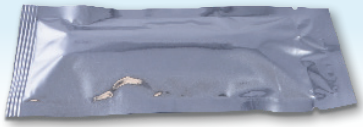

Preparazione:


Prima di iniziare il test, portare a temperatura ambiente (15°C–27°C) il test a cassetta nel sacchetto di alluminio. Estrarre il test antidroga dalla confezione di alluminio.

2




- Raccogliere l'urina in un bicchiere. In caso di urina torbida, attendere finché non diventa limpida.
- Rimuovere il tappo protettivo e immergere il test antidroga per almeno 10 secondi nell'urina fino al contrassegno. Assicurarsi che il test a cassetta sia immerso solo fino al bordo inferiore.
- Accertarsi di non toccare la finestra di valutazione e di non farvi posare l'urina.

3

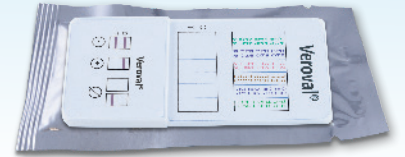

- Riapplicare il tappo sul test a cassetta e collocare quest'ultimo su una superficie piana. Non toccare o muovere più il test a cassetta. Attendere finché non compaiono le linee colorate nel campo di reazione.

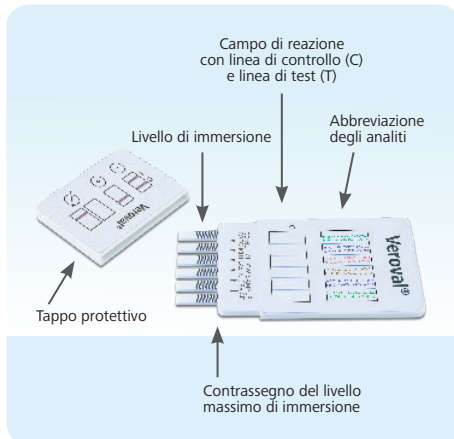


4

- Leggere il risultato dopo circa 5 minuti ma non oltre 10 minuti.
- Il test antidroga deve essere valutato in condizioni di illuminazione adeguate in modo da poter rilevare anche le linee colorate meno intense.

Per la valutazione del risultato, verificare se nel campo di controllo (C) è visibile una linea. Non è importante se la linea di controllo è debole o accentuata. Ogni striscia di test deve essere valutata singolarmente.


Risultato negativo

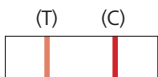

In caso di risultato negativo, ovvero di un **campione di urina senza droghe**, nei campi di reazione compaiono **linee di test (T) da rosso chiaro a rosso scuro** e **linee di controllo (C) da rosso chiaro a rosso scuro**.

La concentrazione di queste droghe specifiche (o dei derivati) nel campione è inferiore al valore limite.


Risultato positivo

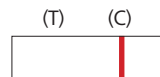

In caso di **risultato positivo**, nei campi di reazione **non** compaiono **linee di test (T)** ma soltanto **linee di controllo (C) da rosso chiaro a rosso scuro**.

La concentrazione di queste droghe specifiche (o dei derivati) nel campione è superiore al valore limite. Non è possibile trarre conclusioni sul livello di concentrazione e sulla gravità dell'assunzione.

Risultato non valido

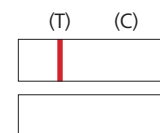

Se nei campi di reazione sono presenti **solo linee di test (T)**, e **nessuna linea di controllo (C)** o **nessun tipo di linea**, il test non è valido.

Accertarsi di aver seguito esattamente tutti i punti delle istruzioni per l'uso. Condurre di nuovo il test con un altro campione di urina.

Avvertenze e limitazioni:

- Il self-test multi-droghe non è un prodotto medico e non deve pertanto essere utilizzato per scopi diagnostici.
- Il test è positivo solo se non sono visibili **linee di test (T)**.
- L'impiego intenzionale di sostanze adulteranti può compromettere il test. In caso di sospetta alterazione, il test deve essere ripetuto con un nuovo campione di urina.
- Il self-test non è in grado di differenziare fra droghe d'abuso e medicinali simili prescritti dal medico.
- Sebbene sia possibile escludere una compromissione del test dovuta a una varietà di sostanze, non si può escludere che altre sostanze nonché errori tecnici o legati alle procedure alterino il risultato del test.