

Fertilidad masculina

Test rápido para la detección de la concentración de espermatozoides en el semen

7 min



Precisión
> 95 %



Importante para buscar un hijo: suficientes espermatozoides

Las parejas que no pueden tener hijos suelen preguntarse cuál es la causa. Si la respuesta está en el hombre, puede que un número de espermatozoides en el semen inferior a la media sea el motivo.

Es bueno saber qué pasa: test rápido de fertilidad masculina

Puede averiguar de forma rápida y segura si su semen contiene suficientes espermatozoides para la reproducción. Si no fuera el caso, consulte con el médico las medidas que debe tomar. Producto bajo prescripción médica en España.

¿Es fiable el auto-test Veroval®?

El test rápido de fertilidad masculina se ha diseñado con el fin de poner a disposición la precisión y la fiabilidad del diagnóstico moderno al alcance del uso privado desde casa. El test rápido calcula si la cantidad de espermatozoides se encuentra en el intervalo normal (según la OMS, manual número 4, al menos 20 millones de espermatozoides/ml). **Precisión superior al 95 %, demostrada en estudios de evaluación de funcionalidad.**

¿Es complicado realizar el test?

No: lo único que necesita son las manos limpias, un reloj y una mesa lisa. Encontrará el procedimiento a seguir para la realización de la prueba en la parte posterior. Para determinar e interpretar el resultado, lea detenidamente las instrucciones de uso. Debe entender todos los detalles antes de realizar el test.

Resultados:

	Test de referencia			Total
		Positivo	Negativo	
Test rápido de fertilidad masculina	Positivo	97	5	102
	Negativo	3	89	92
	Total	100	94	194

Sensibilidad: 97,00 % Especificidad: 94,68 % Precisión: 95,10 %

Nota importante:

Este test valora únicamente la concentración de espermatozoides y no puede dar más información sobre fertilidad. Este test no es adecuado como método anticonceptivo, prueba de paternidad, ni protección de enfermedades de transmisión sexual.

¿Qué debe tener en cuenta?

Advertencias e indicaciones importantes:

- El test es solo para uso externo.
- No ingiera ningún componente.
- Evite el contacto dérmico y ocular con el tampón diluyente de muestras.
- Mantenga el test fuera del alcance de los niños.
- No exponga el test a la luz solar directa o a temperaturas heladas. No congele. No almacene en un lugar seco a una temperatura de entre 2 °C y 30 °C.
- El test solo puede realizarse una vez.
- Todos los componentes del test pueden tirarse a la basura doméstica.
- El producto no debe utilizarse después de la fecha de caducidad impresa en el embalaje.
- Si tiene dificultades visuales, es daltónico o si la iluminación es insuficiente, es posible que no pueda consultar correctamente el resultado del test.
- En caso de no seguir las instrucciones de uso correctamente, es posible que el resultado del test sea incorrecto. El médico deberá darle un diagnóstico definitivo.
- No utilice el test si el embalaje está dañado. No utilice componentes del test dañados.
- El test debe realizarse inmediatamente después de abrir la bolsa de aluminio o en un plazo de una hora.

Preparación del test:

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones antes de extraer el semen mediante estimulación manual (masturbación):

- Espere al menos 48 horas y menos de 7 días tras la última eyaculación.
- No utilice geles, lubricantes ni lociones.
- No utilice preservativos.

www.veroval.es

Materiales


- 1 dispositivo test
- 1 recipiente con tampón diluyente de muestras
- 1 jeringa para extraer el semen



- 1 vaso para recoger el semen
- 1 folleto de instrucciones de uso

Significado de los símbolos

Consulte las instrucciones de uso	Producto sanitario de diagnóstico in vitro (para uso externo)	Fecha de caducidad (véase impresión en el embalaje)
Conservar en un lugar seco a 2 °C–30 °C. No congelar.	Contenido suficiente para 1 prueba	No reutilizar
Fabricante	Esterilización mediante óxido de etileno	Lote (véase impresión en el embalaje)
Tiempo de reacción en el dispositivo de test	Test rápido para auto-diagnóstico	

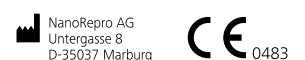

Distribución:
ES – Laboratorios HARTMANN S.A.
08302 Mataró
informacion@hartmann.info

Fertilidad masculina

Auto-test rápido

Así es como se hace:

1 • Coloque los componentes del test encima la mesa. Retire la jeringa de su envoltorio. No abra todavía la bolsa de aluminio con el test.

Contenido:
 (1) Vaso
 (2) Jeringa
 (3) Frasco con tampón diluyente de muestras
 (4) Dispositivo test en bolsa de aluminio

2

15–30 °C

- Recoja el semen en el vaso incluido (1). (Si se pierde semen, tire toda la muestra y lave el vaso solo con agua del grifo (1). Espere entre 48 horas y 7 días tras la última eyaculación antes de obtener la muestra.)
- Deje la muestra al menos 20 minutos (pero menos de 3 horas) a temperatura ambiente (15 – 30 °C) sobre una superficie lisa.

3

- Remueva la muestra con la jeringa (2) aproximadamente 10 veces en el vaso y con cuidado.
- Introduzca la jeringa (2) en el semen de forma que evite el material sólido o pegajoso. Llene la jeringa de semen exactamente hasta la marca de 0,1 ml. Evite la formación de burbujas extrayendo la jeringa con frecuencia, sacando el aire y volviéndola a introducir en el semen.

4

- El frasco con tampón diluyente de muestras dispone de un cierre dividido en dos. Abra el frasco por el borde inferior (ancho) girando todo el cierre.
- Introduzca la jeringa (2) en la abertura del frasco (3) y introduzca toda la cantidad de muestra (0,1 ml) presionando la jeringa en el frasco.

5

- Vuelva a cerrar el frasco (3) y oscílelo con cuidado.
- **No agite** el frasco (3), puesto que podría formarse espuma.

6

- Deje reposar el frasco con la muestra 2 minutos y compruebe que todo esté bien mezclado. Si no fuera así, vuelva a oscilar el frasco.
- A continuación, abra la bolsa de aluminio con el dispositivo test (4) y coloque el test en una superficie lisa, limpia y seca.

7

- Gire la tapa superior del frasco (3) y añada exactamente 6 gotas en el campo de aplicación redondo (S) del test (1). **Tenga cuidado de que no caiga líquido en la ventana de resultados (T) o (C).** Después de verter las gotas, no vuelva a tocar ni a mover el test.
- **Tras añadir las 6 gotas, consulte el resultado al cabo de 7 minutos exactos.**

Para valorar el resultado, compruebe si en la ventana de control (C) se observa una línea. La intensidad del color de la línea de la ventana de control (C) no es relevante.

Resultado positivo

Si se ve la línea de control (C) y la línea del test (T), el resultado es positivo. Este resultado significa que su cantidad de espermatozoides es de al menos 20 millones/ml y que es suficiente para la reproducción.

El resultado positivo no significa que sea fértil. Existen otros diversos factores que pueden afectar a la fertilidad del hombre. Tras varios meses intentando concebir a un hijo, usted y su pareja deberán consultar a un médico para que les asesore.

Resultado negativo

Si el resultado del test muestra una línea en la ventana de control (C) y no muestra ninguna línea en la ventana del test (T), el test es negativo. Su cantidad de espermatozoides es inferior a 20 millones/ml.

Un resultado negativo por sí solo no es prueba de infertilidad. Además, la cantidad de espermatozoides puede variar de un día a otro, de forma que repetir el test rápido puede dar un resultado positivo. Consulte a su médico para que le asesore y le realice un análisis completo de esperma si usted y su pareja llevan varios meses intentando sin éxito concebir un hijo.

Resultado no válido

Si en la ventana de control (C) no aparece ninguna línea o solo aparece una línea del test (T), el test no se ha realizado correctamente o es inválido. El test no responde a su consulta sobre la cantidad de espermatozoides. Repita el test con un nuevo dispositivo test y espere al menos 48 horas y menos de 7 días tras la última eyaculación.